

Inhoud

Gebruik van de handleiding	11
Inleiding	13
A Technische specificaties	15
B Veiligheidsvoorschriften en onderhoud	17
1 Veiligheidsvoorschriften	18
2 Beschermhoes	19
3 Het toestel reinigen	20
4 Herstellingen	20
C Aan de slag	21
1 Wat is er met de Smart meegeleverd?	22
2 Kennismaken met de Smart	23
3 De Smart van de beschermhoes voorzien	28
4 De Smart aanzetten	29
5 Het toestel opladen	29
6 De batterijstatus bekijken	30

7	Het resterend batterijvermogen opvragen	31
8	Het aanraakscherm gebruiken	31
9	Werken met bestanden	32
10	Tekst ingeven	32
10.1	Tekst ingeven	32
10.2	Het schermtoetsenbord weergeven	34
10.3	Het schermtoetsenbord verbergen	34
10.4	Tekst ingeven met het schermtoetsenbord	35
11	Algemene instellingen	36
11.1	De programmataal instellen	36
11.2	De spraak instellen	36
11.3	De datum en tijd instellen	36
11.4	De helderheid van het scherm aanpassen	37
11.5	Het algemeen volume instellen	37
11.6	Het scherm draaien	38
11.7	De uitschakeltijd van de Smart instellen	38
11.8	De menubalk verbergen	38
11.9	De menubalk terugzetten	39
11.10	De opstartopties instellen	39
11.11	Opname instellen	39

12	De Smart in slaapstand zetten	40
13	De Smart resetten	40
14	De Smart afsluiten	41

D Specifieke instellingen, back-up en opslagruimte 43

1	Gebruiker-specifieke instellingen aanpassen	44
1.1	Selecteren	44
1.2	Uitspraakwoordenboek, zin- en woordvoorspelling	44
1.2.1	<i>Het uitspraakwoordenboek</i>	44
1.2.2	<i>Woordvoorspelling</i>	45
1.2.3	<i>Zinsvoorspelling</i>	45
2	Back-up en opslagruimte	46
2.1	Een back-up van de Smart maken	46
2.2	Een back-up naar de Smart terugzetten	46
2.3	Het opslaggeheugen van de Smart opruimen	47
2.4	Een bestand van de Smart verwijderen	48

E	Een boodschap opnemen	49
1	Een boodschap opnemen.....	50
2	Een boodschap in Opname mode opnemen.....	50
3	Een boodschap in Muis mode opnemen	51
4	Een boodschap van de Smart verwijderen	51
F	De camera	53
1	De camera.....	54
2	Een foto nemen.....	54
3	Een foto nemen om een vakje in te vullen.....	54
4	Een foto bekijken	55
5	Een foto verwijderen.....	55
6	Een foto verwijderen (via schijf opruimen).....	56
G	Persoonlijke toepassingen	57
1	De agenda.....	58
1.1	De agenda bekijken.....	58
1.2	Een alarm toevoegen.....	58
1.3	Een alarm wijzigen.....	59

1.4	Een alarm verwijderen	60
1.5	Een activiteit toevoegen.....	61
1.6	Een activiteit wijzigen	63
1.7	Een activiteit verwijderen	64
1.8	De achtergrond van de agenda instellen.....	65
2	Het adresboek	66
2.1	Een contactpersoon toevoegen	66
2.2	Een contactpersoon bewerken	66
2.3	Een contactpersoon verwijderen	67

H Verbinding met de Eddy 69

- 1 Wat is de Eddy? 70
- 2 Bluetooth 70
- 3 De Eddy instellen 71
- 4 De Eddy zoeken..... 72
- 5 Een verbinding met de Eddy maken 72
- 6 De verbinding met de Eddy verbreken 73

I Verbinding met computer en USB-aansluitingen 75

- 1 Verbinding met de computer 76
- 2 Het toestel met de computer verbinden 76
- 3 De verbinding tussen het toestel en de computer verbreken..... 76
- 4 Extern toetsenbord aansluiten..... 77
- 5 Externe muis aansluiten 77
- 6 Een USB-stick aansluiten 78

J Telefoeren 79

1 Telefoon 80

2 De bluetooth aanzetten 80

3 De telefoonopties van de Smart instellen 80

4 De telefoon met de Smart verbinden 81

5 Een telefoonnummer bellen 81

6 De telefoon opnemen 82

7 De telefoon inhaken 82

K Omgevingsbediening 83

1 Omgevingsbediening 84

2 Een infraroodcode aanleren 84

3 Een back-up van infraroodcodes maken 85

4 Een back-up van infraroodcodes terugzetten 86

L Communicatie 87

1 Communicatie 88

2 Een specifieke Smart actie toevoegen 88

3 Een Eddy actie toevoegen 89

4	Een omgevingsbedieningactie toevoegen	90
5	Een Smart 3 Camera actie toevoegen	90
6	Een Smart3 actie toevoegen	91
7	Een scherm draaien actie toevoegen	92

M Problemen oplossen **93**

1	Het serienummer van de Smart opzoeken	94
2	De versie van Mind Express controleren op de Smart	94
3	Geactiveerde symbolenbibliotheken bekijken	94
4	Problemen oplossen	96

N Bijlagen **99**

1	Acapela	100
2	Met de Smart SMS'en	102
2.1	De versie van Android op je smartphone controleren	102
2.2	De Jabbla BT app downloaden en installeren	103
2.3	Sms'en	104

Index **107**

Gebruik van de handleiding

Deze gebruikershandleiding beschrijft de Smart. De handleiding is opgesteld zodat je als gebruiker snel en op een eenvoudige manier wegwijs raakt tijdens het gebruik van de Smart en de software Mind Express.

Voor een efficiënt gebruik van de software vragen wij om deze gebruikshandleiding zeer zorgvuldig te lezen en kennis te nemen van alle aspecten eigen aan het toestel en aan de software.

Mochten er onduidelijkheden zijn, raadpleeg dan gerust Jabbla.

Door de voortdurende evolutie in de software draagt Jabbla geen aansprakelijkheid voor eventuele wijzigingen van de inhoud of afbeeldingen sinds de publicatie van deze handleiding. Bij deze wijzigingen kunnen geen rechten worden ontleend voor reeds geleverde software.

Jabbla is in geen enkel geval aansprakelijk voor enige (in)directe, toevallige of speciale schade voortvloeiend uit enig gebruik van (de inhoud van) de documentatie. Deze uitsluiting geldt voor elke rechtsvordering, op welke juridische grond dan ook.

De inhoud van deze handleiding is niet bindend. Vergissingen voorbehouden.

Druk, kopie of gedeeltelijke overname, is verboden zonder schriftelijke toelating van Jabbla.

Wij houden ons het recht wijzigingen aan te brengen aan de software, die nuttig worden geoordeeld voor de goede werking ervan.

De klant kan in dit geval noch het contract verbreken noch dezelfde wijzigingen eisen aan de apparaten die reeds besteld zouden zijn.

Inleiding

De Smart is een klein en handig draagbaar communicatietoestel met een dynamisch scherm. Aan de hand van symbolen, foto's of andere visuele voorstellingen kunnen willekeurige boodschappen door het toestel worden uitgesproken. De Smart is gebaseerd op een Windows Mobile computer platform en gebruikt de Mind Express software.

De Smart beschikt over een kwaliteitsvolle interne microfoon en degelijke geluidsversterking, zodat gevormde en/of gekozen boodschappen natuurgetrouw worden weergegeven en klaar en duidelijk verstaanbaar zijn.

De Smart heeft een communicatie-ondersteunende functie. Dit toestel is bedoeld voor algemeen gebruik in het dagelijks leven voor mensen (vanaf de leeftijd van 3 jaar) met een communicatieve beperking (niet of slecht kunnen spreken). Ze beschikken ook over voldoende motorische en mentale capaciteiten om het toestel te gebruiken. Het toestel is niet inzetbaar voor klinische, therapeutische of diagnostische toepassingen. Er kunnen infraroodcodes door het toestel worden aangeleerd en uitgezonden om zo andere apparaten te bedienen. Dit betreft apparaten voor algemeen gebruik zoals toestellen voor audiovisuele en domotica toepassingen. Deze uitbreiding is niet inzetbaar voor klinische, therapeutische of diagnostische toepassingen.

Meer informatie over het maken van bestanden op de Smart, kan je terugvinden in de Mind Express handleiding die bij de Smart is meegeleverd.

Voor een optimaal gebruik van de Smart is het aangewezen deze handleiding te lezen.

A Technische specificaties

Tabel 1: Technische specificaties

Specificatie	Uitleg
Processor	NVIDIA© Tegra 2 1GHz
Besturingssysteem	Microsoft Windows® Mobile™6.0
Intern geheugen	512 MB SDRAM + 1 GB FLASH
Scherm	Helder 4,3 inch WVGA TFT aanraakscherm <ul style="list-style-type: none">• 480 x 800 pixels• 262.144 kleuren• LED backlight
USB	1 x USB 2.0 OTG (slave + master)
Batterij	Interne batterij
Gewicht	Toestel 250 g, beschermhoes 41 g
Afmetingen	<ul style="list-style-type: none">• Toestel: 135 mm x 79 mm x 25 mm• Toestel met cover: 140,5 mm x 85 mm x 30 mm

B Veiligheidsvoorschriften en onderhoud

1 Veiligheidsvoorschriften

De Smart is dankzij zijn beperkt gewicht zeer draagbaar en mobiel. We raden aan om de Smart steeds te gebruiken met de meegeleverde beschermhoes.



Het toestel maakt gebruik van een Li-ion batterij. Gooi de batterij niet zomaar weg indien die eventueel werd vervangen. Volg de afvalvoorschriften die van toepassing zijn in uw regio. Je kunt de batterij ook terugbezorgen aan uw leverancier.



Wanneer je het toestel voor een langere periode niet gebruikt, berg het dan op met een opgeladen batterij. Zorg er ook voor dat het toestel is uitgeschakeld (druk gedurende 4 seconden op de aan/uit knop).



Vermijd warmtebronnen in de buurt van het toestel, of ruimtes waarin het bijzonder warm kan worden. In de zomer kan het bijvoorbeeld erg warm worden in een auto. Te hoge temperaturen kunnen de werking en de levensduur van de batterij negatief beïnvloeden.



De Smart is niet waterdicht maar het toestel is wel zodanig ontworpen dat het aan de bovenkant spatwaterdicht is. Aan de onderkant zijn er echter luidsprekeropeningen waarlangs vocht of vuil kan binnendringen in de luidsprekerholtes. Dit kan de kwaliteit van de luidsprekers aantasten. Probeer dus situaties te vermijden waarbij vocht of vuil gemakkelijk in de luidsprekeropeningen kan geraken. Neem ook uw voorzorgen bij het reinigen van het toestel en volg de reinigingsvoorschriften.



Het toestel kan worden bediend door het scherm met de vinger aan te raken. Je hoeft daarvoor geen grote krachten uit te oefenen. Een lichte druk volstaat om bijvoorbeeld een symbool op het scherm te selecteren. Je kunt dit ook doen door middel van een stylus of iets wat daarvoor kan doorgaan, maar gebruik hiervoor echter geen scherpe voorwerpen.



Je kunt met de Smart zeer eenvoudig geluiden opnemen. Voor het maken van de opnames hoeft je niet luid te spreken. Het toestel zal de opnames versterken en zo natuurgetrouw mogelijk weergeven. Hierbij kan je het volume aanpassen. Zorg ervoor dat het geproduceerde volume niet storend of schadelijk wordt voor jou en jouw omgeving.

2 Beschermhoes

De Smart heeft een beschermhoes (15) waarin je het toestel op een veilige manier kan gebruiken. De beschermhoes zorgt er ook voor dat het toestel minder kwetsbaar is voor stoten en beter beschermd is tegen vocht en vuil.



3 Het toestel reinigen

Reinig het toestel regelmatig zodat je bacteriën de kans niet geeft zich te verspreiden.

Gebruik bij voorkeur een droge zachte doek voor het verwijderen van stof. Voor lokale vlekken op de behuizing kan je een licht bevochtigde doek gebruiken. Let vooral op dat er geen vocht binnendringt op de plaats van de luidsprekeropeningen, de microfoonopening en de connectoren. Vuil ter hoogte van de connectoren kan je het best verwijderen met een wattenstaafje.

Ook voor het reinigen van het aanraakscherm gebruik je best een droge doek, geen keukenpapier omdat dit kleine krassen kan maken. Voor het verwijderen van vet of vlekken op het scherm kan je beter reinigingsmiddelen gebruiken die speciaal ontwikkeld zijn voor het reinigen van schermen (spuitbus of vochtige doekjes). Druk niet te hard op het scherm tijdens het reinigen.

Het reinigen van de Smart gebeurt bij voorkeur met een droge of licht bevochtigde doek.

4 Herstellingen

Bij schade aan het toestel neem je contact op met de verdeler van het toestel of contacteer je de supportafdeling van Jabbla.

Probeer zelf geen herstellingen uit te voeren. Hierdoor zou het toestel beschadigd kunnen raken en hierdoor vervalt ook de garantie.

C Aan de slag

1 Wat is er met de Smart meegeleverd?

De Smart wordt geleverd met volgende onderdelen:


- beschermhoes
- stylus
- voeding met stekker en kabel
- USB kabel om aansluiting te maken met een USB-toetsenbord, USB-stick, USB-muis
- USB kabel om aansluiting te maken met de computer
- handleiding Smart
- Mind Express (software + handleiding)

2 Kennismaken met de Smart



Figuur 1: Smart zijaanzicht links


Nr	Benaming	Uitleg
1	Reset	Deze knop wordt gebruikt om het menu te verbergen / tonen en om het toestel te resetten.
2	USB poort	Via de USB poort kan een back-up worden gemaakt / teruggezet, verbinding met een computer worden gemaakt en een extern toetsenbord of een muis worden aangesloten.

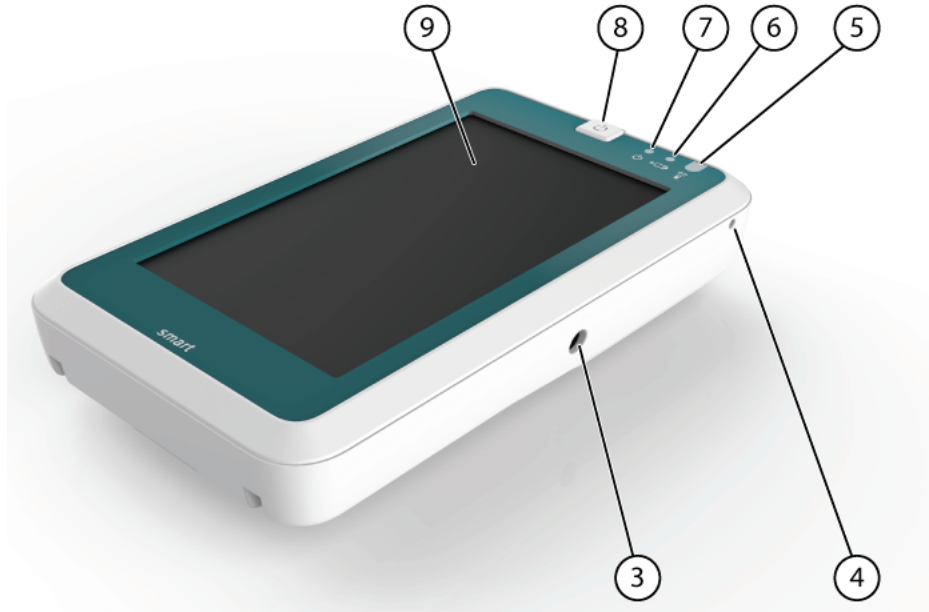

Figuur 2: Smart zijaanzicht rechts

Nr	Benaming	Uitleg
3	Aansluiting voeding	Via deze aansluiting kan het toestel worden opgeladen met de meegeleverde voedingsadapter.
4	Microfoonopening	Dit is de microfoonopening waarlangs het geluid bij opnames de interne microfoon van het toestel bereikt.
5	Infraroodontvanger	De infraroodontvanger wordt gebruikt voor het aanleren van infraroodcodes.

Nr	Benaming	Uitleg
6	Batterij laden indicator	De batterij laden indicator licht op van zodra het toestel met de meegeleverde voedingsadapter wordt aangesloten op het stroomnet. Tijdens het laden kleurt de indicator oranje. De indicator wordt groen van zodra de batterij is opgeladen.
7	Aan/uit indicator	De aan/uit indicator geeft aan in welke toestand het toestel zich bevindt: <ul style="list-style-type: none">• licht niet op: toestel is uitgeschakeld• rood: batterijvermogen tussen 0% en 29%• oranje: batterijvermogen tussen 30% en 50%• groen: batterijvermogen tussen 51% en 100%
8	Aan/uit knop	Hiermee kan het toestel aan, uit en in slaapstand worden gezet.
9	Aanraakscherm	Het toestel is voorzien van een 4,3 inch aanraakscherm.

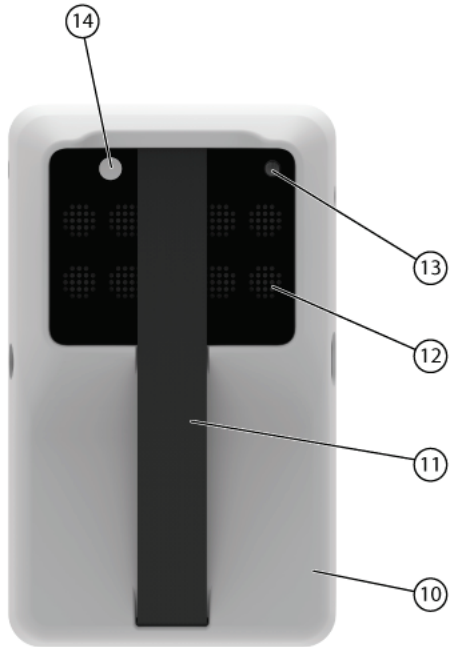

Figuur 3: Smart achteraanzicht

Nr	Benaming	Uitleg
10	Beschermhoes	De beschermhoes zorgt er voor dat het toestel minder kwetsbaar is voor stoten en beter beschermd is tegen vocht en vuil.
11	Riem	De riem zorgt ervoor dat het toestel goed in de hand kan worden gehouden.
12	Luidsprekers	Het toestel is voorzien van een aantal krachtige luidsprekers.
13	Infraroodzender	Hiermee kunnen infraroodsignalen worden uitgezonden naar andere toestellen.
14	Camera	Het toestel is voorzien van een camera, waarmee foto's kunnen worden genomen.

3 De Smart van de beschermhoes voorzien

De Smart heeft een beschermhoes (15) waarin je het toestel op een veilige manier kan gebruiken. De beschermhoes zorgt er ook voor dat het toestel minder kwetsbaar is voor stoten en beter beschermd is tegen vocht en vuil.

- 1 Leg de Smart neer met de riem naar boven.



- 2 Maak de sluiting (11b) van de riem los.
- 3 Steek de sluiting (11b) door de langwerpige opening van de beschermhoes.
- 4 Steek het onderste deel van de riem (11a) ook door de langwerpige opening van de beschermhoes.
- 5 Druk de beschermhoes over het onderste deel van de Smart terwijl je de 2 delen (11a en 11b) vast houdt.
- 6 Hou het bovenste deel van de riem (11c) vast terwijl je het bovenste deel van de beschermhoes over de Smart drukt.
- 7 Maat de sluiting (11b) terug vast aan het bovenste deel van de riem (11c).
- 8 Draai de Smart om en controleer of de beschermhoes de Smart goed omsluit.

4 De Smart aanzetten

- 1 Druk op de aan/uit knop (8) van de Smart.

Indien de Smart uit slaapstand komt, kan hij onmiddellijk worden gebruikt.

Indien de Smart uit afgesloten toestand komt, dan moet eerst Mind Express worden ingeladen.

ZIE OOK:

"De Smart afsluiten" op pagina 41

"De Smart in slaapstand zetten" op pagina 40

5 Het toestel opladen

De tijd dat je het toestel kan gebruiken zonder op te laden, is sterk afhankelijk van:

- het volume van de audio
- de ingestelde uitschakeltijd
- het gebruik van de bluetooth

Wanneer de Smart veelvuldig wordt gebruikt, is het aangeraden het toestel dagelijks op te laden. Gebruik hiervoor enkel de meegeleverde voedingsadapter. Tijdens het opladen kan het toestel verder worden gebruikt.


- 1 Controleer het resterend batterijvermogen.
- 2 Sluit de meegeleverde voedingsadapter aan tussen het toestel en de netstroom.

De batterij laden indicator zal oranje oplichten en blijft oranje tijdens het laden. Van zodra de batterij volledig is opgeladen wordt batterij laden indicator groen.

6 De batterijstatus bekijken

- 1 Bekijk de aan/uit indicator op het toestel.
- 2 De aan/uit indicator kan volgende kleuren aannemen:

Groen	Batterijstatus tussen 51% en 100%
Oranje	Batterijstatus tussen 30% en 50%
Rood	Batterijstatus tussen 0% en 29%

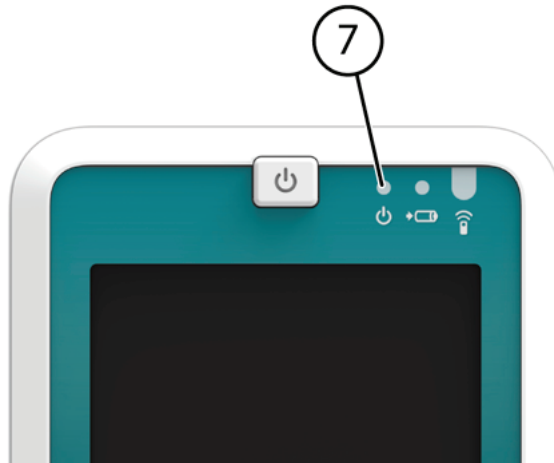

7 Het resterend batterijvermogen opvragen

- 1 Kies **Extra > Batterij**.
- 2 Bekijk de status van de batterij:
 - **Op de batterij**, het toestel werkt op de batterij.
 - **Opladen**, het toestel is aangesloten met de meegeleverde adapter en is aan het opladen.
- 3 Bekijk het resterend batterijvermogen.
- 4 Indien het resterend batterijvermogen lager is dan 30% (of de aan/uit indicator kleurt rood), dan is het aanbevolen om het toestel op te laden.

8 Het aanraakscherm gebruiken

Met het aanraakscherm van het toestel kan je eenvoudig vakjes selecteren. Gebruik hierbij je vinger(nagels) of een stylus. De druk die moet worden uitgeoefend op het scherm om iets te selecteren, zal bij het gebruik van de vinger iets hoger zijn dan bij het gebruik van de stylus.

De manier van selecteren op het scherm, kan worden aangepast aan de gebruiker. Zie handleiding Mind Express.



Controleer of de beschermende folie is verwijderd van het toestel.



Gebruik geen scherpe hulpmiddelen, om krassen op het aanraakscherm te voorkomen.



Zorg dat het aanraakscherm niet met water in aanraking komt.



Het aanraakscherm wordt automatisch uitgeschakeld wanneer het toestel in slaapstand gaat of in slaapstand wordt gezet.

Gebruik de volgende technieken om het aanraakscherm te bedienen:

- Tikken: één keer met je vinger of stylus aanraken om een vakje te selecteren.
- Aanraken (ingedrukt houden): tik met je vinger of stylus op een vakje en blijf dit meer dan de ingestelde acceptatietijd aanraken om het vakje te selecteren.
- Slepen: tik met uw vinger of stylus en veeg hiermee omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om items te verplaatsen (in mode bewerken of in muismode).



De mogelijkheid om te slepen in communicatiekaarten, is een instelling die in Mind Express kan worden ingesteld.

9 Werken met bestanden

De Smart gebruikt Mind Express 4.

Je kan nieuwe bestanden maken, bestaande bestanden openen, bewerken en opslaan.



Voor het werken met bestanden, zie de handleiding van Mind Express.



Het is gemakkelijker om op een computer met Mind Express bestanden aan te maken en te bewerken en die vervolgens door te sturen naar de Smart via een USB verbinding, dan de bestanden rechtstreeks op de Smart aan te maken en te bewerken.

10 Tekst ingeven

10.1 Tekst ingeven

Indien je in een dialoogvenster tekst moet ingeven, kan je gebruik maken van het schermtoetsenbord van het toestel. Je kan 4 verschillende toetsenborden oproepen.

Input Panel													
Esc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	=	←
Tab	q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	[]	↵
Caps Lock	a	s	d	f	g	h	j	k	l	;	'	↵	
Shift	z	x	c	v	b	n	m	,	.	/	↑	àü	pgup
Ctrl	Alt	`						ins	del	←	↓	→	pgdn

Figuur 4: Standaard schermtoetsenbord

Input Panel													
Esc	!	@	#	\$	%	^	&	*	()	_	+	←
Tab	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	{	}	
Caps Lock	A	S	D	F	G	H	J	K	L	:	"	↵	
Shift	Z	X	C	V	B	N	M	<	>	?	↑	àü	Home
Ctrl	Alt	~						ins	del	←	↓	→	End

Figuur 5: Schermtoetsenbord met Caps Lock aan

Input Panel													
Esc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	i	ı	←
Tab	æ	à	á	â	ã	ä	å	è	é	ê	ë	ç	ñ
Caps Lock	œ	ì	í	î	ï	ò	ó	ô	õ	ö	ø	↵	
Shift	ß	ù	ú	û	ü	ý	ÿ	ð	š	ž	↑	àü	pgup
Ctrl	Alt	€						ins	del	←	↓	→	pgdn

Figuur 6: Schermtoetsenbord met speciale tekens aan



Figuur 7: Schermtoetsenbord met speciale tekens en Caps Lock aan

10.2 Het schermtoetsenbord weergeven

- 1 Tik rechtsonderaan in de menubalk op  om het schermtoetsenbord te activeren.



Het pictogram  zal enkel zichtbaar zijn als er een dialoogvenster actief is waar een tekstveld kan worden bewerkt.

- 2 Tik in de titelbalk en sleep het dialoogvenster **Input Panel** naar de gewenste plaats op het scherm.

ZIE OOK:

"Het schermtoetsenbord verbergen" op pagina 34

"Tekst ingeven met het schermtoetsenbord" op pagina 35

10.3 Het schermtoetsenbord verbergen

- 1 Tik rechtsonderaan in de menubalk op  om het schermtoetsenbord te verbergen.

ZIE OOK:

"Het schermtoetsenbord weergeven" op pagina 34

10.4 Tekst ingeven met het schermtoetsenbord

In een dialoogvenster met een bewerkbaar tekstveld kan tekst worden ingegeven.

- 1 Geef het schermtoetsenbord weer.
- 2 Tik in het bewerkbaar tekstveld.
- 3 Tik op de toetsen van het toetsenbord om tekst in te geven.



Tik op Caps Lock om hoofdletters en/of andere tekens in te geven. Tik op àü om speciale tekens in te geven.

ZIE OOK:

"Het schermtoetsenbord weergeven" op pagina 34

11 Algemene instellingen

11.1 De programmataal instellen

De taal van het programma of de interface kan worden aangepast aan de taal van de gebruiker.



Voor het instellen van de programmataal, zie de handleiding van Mind Express.

11.2 De spraak instellen


De spraakuitvoer spreekt de berichten die je toewijst aan de vakjes van een communicatiekaart, luidop uit. Je kan zelf de kenmerken van de spraak bepalen, zoals de taal, stem, stemvolume, het algemeen volume en de spreeknelheid.



Voor het instellen van de spraak, zie de handleiding van Mind Express.

11.3 De datum en tijd instellen

De tijd, de dag en de datum kan worden voorgelezen door de Smart. Zorg er dus voor dat de datum en tijd correct is ingesteld.

- 1 Kies **Extra > Datum/Tijd**.
- 2 Tik in het veld **Tijd** op het uur en gebruik de pijltjes om het uur aan te passen. Doe hetzelfde voor de minuten en de seconden.
- 3 Tik op de knop  in het veld **Datum** en selecteer in de kalender de huidige datum.

- 4 Selecteer in de vervolkeuzelijst **Tijdnotatie**, één van de volgende keuzes:
 - **24u (15:30)**, de tijd wordt als 24-uursklok weergegeven.
 - **12u (3:30)**, de tijd wordt als 12-uursklok weergegeven.
 - **AM/PM (3:30 PM)**, de tijd wordt weergegeven met de indicatie AM (voormiddag) en PM (namiddag).
- 5 Tik op **OK**.

11.4 De helderheid van het scherm aanpassen

- 1 Kies **Extra > Smart3 > Instellingen**.
- 2 Verplaats de schuifknop naast **Helderheid** tot het scherm de gewenste helderheid heeft.
- 3 Tik op **OK**.

11.5 Het algemeen volume instellen

Het algemeen volume van het toestel zorgt voor het volume van de spraakuitvoer maar ook voor het volume van de systeemgeluiden (het geluid bij het tikken op het scherm).

- 1 Kies **Extra > Opties**.
- 2 Voer één van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster **Opties**:
 - sleep de schuifregelaar naar links om het volume te verlagen
 - sleep de schuifregelaar naar rechts om het volume te verhogen
- 3 Tik op **OK**.



Het algemeen volume kan ook worden ingesteld via Spraak.

11.6 Het scherm draaien

Het scherm kan zowel staand als liggend worden weergegeven.

- 1 Kies **Extra > Scherm draaien**.
- 2 Om het scherm opnieuw te draaien, herhaal stap 1.

11.7 De uitschakeltijd van de Smart instellen

De Smart kan automatisch worden uitgeschakeld.

Bijvoorbeeld: je kan instellen dat de Smart automatisch uitschakelt, nadat hij 5 uur in slaapstand is gegaan.

- 1 Kies **Extra > Smart3 > Instellingen**.
- 2 Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Afsluiten na: (na stand-by)** één van de volgende opties:
 - **Nooit**
 - **5 uur**
 - **10 uur**
 - **20 uur**
 - **25 uur**
- 3 Tik op **OK**.

11.8 De menubalk verbergen

Om te vermijden dat de gebruiker van het toestel aanpassingen maakt, kan je de menubalk verbergen.

- 1 Kies **Extra > Menu verbergen**

ZIE OOK:

"De menubalk terugzetten" op pagina 39

11.9 De menubalk terugzetten

Om aanpassingen te maken op het toestel moet de menubalk beschikbaar zijn. Indien de menubalk niet beschikbaar is, moet je die terugzetten.

Om de menubalk terug te zetten, ga als volgt te werk:

- 1 Druk met een balpen de resetknop in.
- 2 Indien het weergeven van de menubalk is voorzien van een wachtwoord, verschijnt het dialoogvenster **Wachtwoord**. Typ het wachtwoord in en tik op **OK**.
De menubalk verschijnt onderaan.

ZIE OOK:

"De menubalk verbergen" op pagina 38

11.10 De opstartopties instellen

Je kan instellen in welke mode Mind Express moet opstarten, of het menu zichtbaar moet zijn, of de toegang tot het menu is beschermd door een wachtwoord, welk document moet verschijnen bij de opstart.



Voor het instellen van de opstartopties, zie de handleiding van Mind Express.

11.11 Opname instellen



Voor het instellen van de opname, zie de handleiding van Mind Express.

12 De Smart in slaapstand zetten

Slaapstand is de toestand waarbij de Smart niet helemaal is uitgeschakeld en snel weer kan worden ingeschakeld.



Zet het toestel in slaapstand als je het toestel een kortere periode niet gaat gebruiken. Hierdoor gaat het toestel minder verbruiken dan als het zou blijven aan staan. Sluit het toestel af als je het toestel een langere tijd niet gaat gebruiken.

1 Voer één van de volgende handelingen uit:

- Kies **Extra > Smart3 > Slaapstand**.
- Druk op de aan/uit knop.

ZIE OOK:

"De Smart aanzetten" op pagina 29

13 De Smart resetten



Enkel wanneer het toestel volledig is vastgelopen, mag je het toestel resetten.

1 Druk met de meegeleverde stylus of met de punt van een balpen in de resetopening en hou gedurende minstens 5 seconden ingedrukt.

Het toestel wordt uitgeschakeld.

2 Druk op de aan/uit-knop (8) van het toestel.

Het toestel start terug op en kan opnieuw worden gebruikt.

14 De Smart afsluiten

Indien je de Smart langere tijd niet gebruikt, kan je de Smart het best afsluiten.

- 1 Voer één van de volgende handelingen uit:
 - Kies **Extra > Smart3 > Afsluiten**.
 - Druk minstens 4 seconden op de aan/uit knop.

ZIE OOK:

"De Smart aanzetten" op pagina 29

D Specifieke instellingen, back-up en opslagruimte

1 Gebruiker-specifieke instellingen aanpassen

1.1 Selecteren

Er zijn heel wat instellingen voorzien om het selecteren af te stellen op de noden van de gebruiker. De selectie kan met een kleur worden omlijnd, de selectie kan worden vergroot, het selecteren kan gebeuren bij indrukken of bij loslaten, er kan dwell selectie worden ingesteld, het is mogelijk om geluid af te spelen bij selectie en er kan auditieve feedback van de selectie worden weergegeven.



Voor het instellen van de manier van selecteren, zie de handleiding van Mind Express.

1.2 Uitspraakwoordenboek, zin- en woordvoorspelling

1.2.1 Het uitspraakwoordenboek

Het is mogelijk dat sommige woorden niet correct worden uitgesproken. Bijvoorbeeld: namen of woorden die uit een andere taal ontleend zijn. Je kan deze woord met hun nieuwe uitspraak toevoegen aan een uitspraakwoordenboek. Er kunnen meerdere uitspraakwoordenboeken worden toegevoegd:

- uitspraakwoordenboeken per taal
- uitspraakwoordenboeken per gebruiker, indien het toestel door meerdere personen wordt gebruikt
- uitspraakwoordenboeken per stem. De fonetische notatie kan verschillen per stem.



Voor het gebruik van het uitspraakwoordenboek, zie de handleiding van Mind Express.



Instellingen in het uitspraakwoordenboek moeten rechtstreeks op de Smart gebeuren. Een uitspraakwoordenboek kan niet worden geïmporteerd!

1.2.2 Woordvoorspelling

Als de gebruiker in staat is om tekst te gebruiken, kan woordvoorspelling de communicatiesnelheid aanzienlijk verhogen. Je kunt Mind Express zo instellen dat deze voorspellingen in de vakjes verschijnen. Zo kan de gebruiker deze voorspellingen selecteren om woorden of zinnen veel sneller te typen. Van zodra de gebruiker een letter of een woord in de communicatiekaart selecteert, verschijnen de voorspellingen in de voorspellingsvakjes.

De woordvoorspeller is context gebaseerd. Dit betekent dat de woordvoorspeller niet alleen het woord dat wordt gevormd, probeert te voorspellen, maar ook het daarop volgende woord.



Voor het gebruik van de woordvoorspelling, zie de handleiding van Mind Express.



Instellingen in de woordvoorspelling moeten rechtstreeks op de Smart gebeuren. Een woordvoorspellingslijst kan niet worden geïmporteerd!

1.2.3 Zinsvoorspelling

Als de gebruiker in staat is om tekst te gebruiken, kan zinsvoorspelling de communicatiesnelheid aanzienlijk verhogen. Je kunt Mind Express zo instellen dat deze voorspellingen in de vakjes verschijnen. Zo kan de gebruiker deze voorspellingen selecteren. Van zodra de gebruiker een letter of een woord in de communicatiekaart selecteert, verschijnen de voorspellingen in de voorspellingsvakjes van Mind Express. Zinsvoorspelling zoekt naar zinnen. Als je het woord 'thee' invoert, zal de zinsvoorspelling bijvoorbeeld de zin 'Ik wil een kopje thee' voorspellen.



Wanneer je Mind Express voor het eerst gebruikt, is zinsvoorspelling leeg.



Voor het gebruik van de zinsvoorspelling, zie de handleiding van Mind Express.




Instellingen in de zinsvoorspelling moeten rechtstreeks op de Smart gebeuren. Een zinsvoorspellingslijst kan niet worden geïmporteerd!

2 Back-up en opslagruimte

2.1 Een back-up van de Smart maken

Er kan een back-up worden gemaakt van de inhoud van de Smart op een USB-stick. Zo kan bij problemen met de Smart de inhoud worden terug gezet van de USB-stick naar de Smart

- 1 Sluit de USB-stick aan op de Smart.
- 2 Kies **Extra > Smart3 > Back-up naar USB-stick**.
- 3 Tik in het veld **Naam**.
- 4 Tik rechtsonderaan op  om het schermtoetsenbord te activeren.
- 5 Tik opnieuw in het veld **Naam**.
- 6 Tik op het schermtoetsenbord de naam in van de back-up.
BIJVOORBEELD: back-up juni
- 7 Tik op **OK**.
- 8 Tik op **Ja** in het dialoogvenster **Back-up naar USB-stick**.
Het maken van de back-up wordt gestart. Dit kan enkele minuten duren tot het dialoogvenster **Back-up succesvol beëindigd** verschijnt.
- 9 Tik op **OK**.

ZIE OOK:

"Een back-up naar de Smart terugzetten" op pagina 46

2.2 Een back-up naar de Smart terugzetten

Bij problemen met de Smart kan een back-up worden teruggezet van de USB-stick naar de Smart

- 1 Sluit de USB-stick aan op de Smart met de meegeleverde USB-verloopkabel.
- 2 Druk met een balpen in de resetopening en hou gedurende minstens 5 seconden ingedrukt.
- 3 Druk op de aan/uit knop.
Het dialoogvenster **Restore Files** verschijnt.
- 4 Tik op **Yes** om een back-up terug te zetten.
- 5 Selecteer de back-up die je wil terugzetten.
- 6 Vink eventueel de optie **Format drive first, then restore** aan, indien een vorige back-up, zonder deze optie aangevinkt, geen goed resultaat gaf.
- 7 Tik op **OK**.

ZIE OOK:

"Een back-up van de Smart maken" op pagina 46

2.3 Het opslaggeheugen van de Smart opruimen

Indien je meerdere geluidsopnames maakt onder één en hetzelfde vakje, dan blijven de wave files die niet worden gebruikt, toch bewaard in het opslaggeheugen van de Smart. Hierdoor kan het opslaggeheugen van de Smart vol geraken.

- 1 Kies **Extra > Smart3 > Schijf opruimen**.
- 2 Tik op **Opruimen**.
- 3 Tik op **Ja**.
Het opslaggeheugen wordt vrijgemaakt. In het dialoogvenster **Schijf opruimen** zie je hoeveel vrije ruimte er is.
- 4 Tik op **OK**.

ZIE OOK:



"Een bestand van de Smart verwijderen" op pagina 48

2.4 Een bestand van de Smart verwijderen

Documenten, sjablonen, figuren, geluiden en muziek kunnen uit het opslaggeheugen van de Smart worden verwijderd.

- 1 Kies **Extra > Smart3 > Schijf opruimen**.
- 2 Tik op **Bestandsbeheer**.
- 3 Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Type**, één van de volgende keuzes:
 - **Documenten**
 - **Sjablonen**
 - **Figuren**
 - **Geluiden**
 - **Muziek**
- 4 Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Map**, eventueel een map of submap.
- 5 Vink de bestanden aan die je wil verwijderen.



Tik eventueel op  om de bestanden alfabetisch te sorteren of tik eventueel op  om de bestanden te sorteren volgens bestandsgrootte (van groot naar klein).

- 6 Tik op **Bestanden verwijderen**.
- 7 Tik op **Ja** in het dialoogvenster **Bestand verwijderen**.
- 8 Tik op **Sluiten**.
- 9 Tik op **OK**.

ZIE OOK:

"Het opslaggeheugen van de Smart opruimen" op pagina 47

E Een boodschap opnemen

1 Een boodschap opnemen

Je kan met het toestel een zelf ingesproken boodschap of geluid opnemen en onder een vakje bewaren. Je kan een opname maken in de Opname mode, Muis mode en in de mode Bewerken.

2 Een boodschap in Opname mode opnemen

1 Kies **Bewerken > Opname mode**.

2 Tik op het vakje waar je een boodschap wil aan toevoegen.


Het dialoogvenster **Opname** verschijnt.

3 Tik op de knop  en hou ingedrukt tijdens de volledige opname.





Spreek tijdens de opname op normale toon en met een normaal volume. Hou een afstand van ongeveer 30 centimeter tot het toestel.

4 Laat de knop los om de opname te beëindigen.

5 Tik op  om te luisteren naar de opname. Herhaal vanaf stap 3 indien je niet tevreden bent van de opname.






6 Voer één van de volgende handelingen uit:

- Tik op  om de opname op te slaan onder het geselecteerde vakje.
- Tik op  om de opname te verwijderen.

ZIE OOK:

"Een boodschap in Muis mode opnemen" op pagina 51

3 Een boodschap in Muis mode opnemen

- 1 Controleer of **Snelle opname** is ingesteld. Kies **Extra > Opties**.
- 2 Tik op het vakje waar je een boodschap wil aan toevoegen en hou het vakje ingedrukt tot het dialoogvenster **Opname** verschijnt. De tijd dat je het vakje ingedrukt moet houden is ingesteld in de opties.
- 3 Tik op de knop  en hou ingedrukt tijdens de volledige opname.
 *Spreek tijdens de opname op normale toon en met een normaal volume. Hou een afstand van ongeveer 30 centimeter tot het toestel.*
- 4 Laat de knop los om de opname te beëindigen.
- 5 Tik op  om te luisteren naar de opname. Herhaal vanaf stap 3 indien je niet tevreden bent van de opname.
- 6 Voer één van de volgende handelingen uit:
 - Tik op  om de opname op te slaan onder het geselecteerde vakje.
 - Tik op  om de opname te verwijderen.

ZIE OOK:

"Een boodschap in Opname mode opnemen" op pagina 50

4 Een boodschap van de Smart verwijderen



Een geluidsopname genomen met de Smart kan uit het opslaggeheugen van de Smart worden verwijderd.

- 1 Kies **Extra > Smart3 > Schijf opruimen**.
- 2 Tik op **Bestandsbeheer**.

Smart

- 3 Selecteer **Geluiden** in de vervolgkeuzelijst **Type**.
- 4 Selecteer **Rec** in de vervolgkeuzelijst **Map**.
- 5 Vink de bestanden aan die je wil verwijderen.



Tik eventueel op  om de bestanden alfabetisch te sorteren of tik eventueel op  om de bestanden te sorteren volgens bestandsgrootte (van groot naar klein).

- 6 Tik op **Bestanden verwijderen**.
- 7 Tik op **Ja** in het dialoogvenster **Bestand verwijderen**.
- 8 Tik op **Sluiten**
- 9 Tik op **OK**.



F De camera

1 De camera

De Smart is uitgerust met een camera. Met de camera kan je foto's nemen, maar je kan er geen video's mee maken. De foto's worden automatisch opgeslagen en kunnen worden gebruikt in de communicatiekaarten.

2 Een foto nemen

Je kan een foto nemen met de Smart als er op de communicatiekaart een vakje is voorzien waar de actie **Foto's voor Media Library** is aan toegevoegd.

- 1 Tik op het vakje in de communicatiekaart.
- 2 Richt de lens op het voorwerp en wacht tot het beeld scherp wordt.
- 3 Tik op  om een foto te maken.
- 4 Herhaal stap 4 om nog foto's te maken.
- 5 Tik op  om terug te keren naar de communicatiekaart.






Gebruik de vakjes Vorige foto, Volgende foto om genomen foto's te bekijken. Gebruik eventueel het vakje Foto verwijderen om een foto te verwijderen.


3 Een foto nemen om een vakje in te vullen

Een vakje in een communicatiekaart kan worden ingevuld met een foto, genomen met het toestel.

- 1 Open het bestand met de communicatiekaart, waarvan je één of meerdere vakjes wil invullen door een genomen foto.
- 2 Kies **Bewerken > Foto mode**.

- 3 Tik op het vakje in de communicatiekaart.
- 4 Richt de lens op het voorwerp en wacht tot het beeld scherp wordt.
- 5 Tik op  om een foto te maken.
- 6 Controleer de genomen foto en voer één van de volgende handelingen uit:
 - Tik op  de foto wordt opgeslagen op het toestel.
 - Tik op , de foto wordt verwijderd van het toestel.



Om terug te keren naar de communicatiekaart zonder een foto te gebruiken, tik op .

4 Een foto bekijken

- 1 Kies **Bestand > Openen**.
- 2 Open een communicatiekaart die ontworpen is om foto's te bekijken.
- 3 Bekijk de foto's.



Tik eventueel op de vakjes Vorige foto, Volgende foto om de genomen foto's te bekijken. Tik eventueel op het vakje Foto verwijderen om een foto te verwijderen.

5 Een foto verwijderen

- 1 Kies **Bestand > Openen**.
- 2 Open een communicatiekaart die ontworpen is om foto's te bekijken.



- 3 Tik op de vakjes **Vorige foto** en/of **Volgende foto** tot je de foto ziet die je wil verwijderen.
- 4 Tik op het vakje **Foto verwijderen**.

6 Een foto verwijderen (via schijf opruimen)

Een foto genomen met de Smart kan uit het opslaggeheugen van de Smart worden verwijderd. Foto's genomen door de gebruiker via een communicatiekaart (bijvoorbeeld via het standaard meegeleverde bestand *app_camera_smart*) worden opgeslagen in de map **Smart3Camera**. Foto's genomen door de begeleider om vakjes in een communicatiekaart mee te vullen worden opgeslagen in de map **Smart3Fotos**

- 1 Kies **Extra > Smart3 > Schijf opruimen**.
- 2 Tik op **Bestandsbeheer**.
- 3 Selecteer **Figuren** in de vervolgkeuzelijst **Type**.
- 4 Selecteer de map **Smart3Camera** of de map **Smart3Fotos** in de vervolgkeuzelijst **Map**.
- 5 Vink de bestanden aan die je wil verwijderen.



Tik eventueel op  om de bestanden alfabetisch te sorteren of tik eventueel op  om de bestanden te sorteren volgens bestandsgrootte (van groot naar klein).

- 6 Tik op **Bestanden verwijderen**.



Wanneer je een foto verwijdert die wordt gebruikt in een communicatiekaart, dan zal die foto niet meer worden weergegeven in die communicatiekaart!

- 7 Tik op **Ja** in het dialoogvenster **Bestand verwijderen**.
- 8 Tik op **Sluiten**
- 9 Tik op **OK**.

G Persoonlijke toepassingen

1 De agenda

Met het toestel kan je afspraken organiseren in je agenda. Je kunt de agenda ook gebruiken om alarmen toe te voegen. Bijvoorbeeld om je te herinneren aan verjaardagen van vrienden en familieleden.

1.1 De agenda bekijken

- 1 Kies **Extra > Agenda > Agenda bewerken**.
- 2 Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Toon** één van de volgende opties:
 - **Één dag**
 - **Week**
 - **Maand**
- 3 Selecteer in de 2de vervolgkeuzelijst de datum die je wil weergeven.
- 4 Tik op **OK**.

1.2 Een alarm toevoegen

- 1 Kies **Extra > Agenda > Alarm toevoegen**.

- 2 Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Tijdstip** de herhaling van het alarm:
 - **Eenmalig**
 - **Elke Dag**
 - **Elke Werkdag**
 - **Elke Week**
 - **Elke Maand**
 - **Elk Jaar**
- 3 Geef in het veld **Om** het tijdstip in van het alarm. Gebruik hiervoor de pijltjes.
- 4 Voer één van de volgende handelingen uit:
 - Bij een eenmalig alarm, tik op in het veld eronder en selecteer de datum van het alarm.
 - Bij een herhaald alarm, tik in **Startdatum** op om de datum te selecteren waarop de afspraak start en tik in **Einddatum** op om de datum te selecteren waarop de afspraak eindigt.
- 5 Typ in het veld **Bericht** de tekst in van het alarm.
- 6 Vink de optie **Spreek uit** aan als het bericht moet worden voorgelezen.
- 7 Vink de optie **Toon bericht** aan als het bericht moet verschijnen op het toestel.
- 8 Om een geluid toe te voegen aan het alarm, tik op naast **Geluid**, selecteer een geluid en tik op **Openen**.
- 9 Tik op **Opslaan**.

1.3 Een alarm wijzigen

- 1 Kies **Extra > Agenda > Agenda bewerken**.
- 2 Selecteer het alarm dat je wil wijzigen.
- 3 Tik op **Bewerken**.

- 4 Wijzig eventueel in de vervolgkeuzelijst **Tijdstip** de herhaling van het alarm:
 - **Eenmalig**
 - **Elke Dag**
 - **Elke Werkdag**
 - **Elke Week**
 - **Elke Maand**
 - **Elk Jaar**
- 5 Wijzig eventueel in het veld **Om** het tijdstip in van het alarm. Gebruik hiervoor de pijltjes.
- 6 Voer één van de volgende handelingen uit:
 - Bij een eenmalig alarm, tik op in het veld eronder en selecteer de datum van het alarm.
 - Bij een herhaald alarm, tik in **Startdatum** op om de datum te selecteren waarop de afspraak start en tik in **Einddatum** op om de datum te selecteren waarop de afspraak eindigt.
- 7 Wijzig eventueel in het veld **Bericht** de tekst van het alarm.
- 8 Wijzig eventueel de optie **Spreek uit** als het bericht wel of niet moet worden voorgelezen.
- 9 Wijzig eventueel de optie **Toon bericht** als het bericht wel of niet moet verschijnen op het toestel.
- 10 Wijzig eventueel het geluid van het alarm, tik op naast **Geluid**, selecteer een geluid en tik op **Openen**.
- 11 Tik op **Opslaan**.
- 12 Tik op **OK**.

1.4 Een alarm verwijderen

- 1 Kies **Extra > Agenda > Agenda bewerken**.
- 2 Selecteer het alarm dat je wil verwijderen.


- 3 Tik op **Bewerken**.
- 4 Tik op **Verwijderen** in het dialoogvenster **Alarm bewerken**.
- 5 Tik op **OK**.

1.5 Een activiteit toevoegen

- 1 Kies **Extra > Agenda > Agenda bewerken**.
- 2 Tik op **Voeg toe**.
- 3 Vul in het veld **Activiteit** de naam in van de activiteit of afspraak.
- 4 Tik naast het veld **Figuur** op  om een afbeelding toe te voegen aan de activiteit.
- 5 Maak gebruik van de vervolgkeuzelijsten in het dialoogvenster **Symbol** om de afbeelding op te zoeken, selecteer de afbeelding en tik op **OK**.
- 6 Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Tijdstip** de herhaling van de activiteit:
 - **Eenmalig**
 - **Elke Dag**
 - **Elke Werkdag**
 - **Elke Week**
 - **Elke Maand**
 - **Elk Jaar**
- 7 Kies in het veld **Duur** één van de volgende opties:
 - **Volledige dag**
 - **Van Tot**

- 8 Indien je gekozen hebt voor de optie **Van Tot**, geef je in de velden **Van** en **Tot** de starttijd en de stoptijd in van de activiteit. Tik op de cijfers van het uur en gebruik de pijltjes om het uur aan te passen. Tik op de cijfers van de minuten en gebruik de pijltjes om de minuten aan te passen.
- 9 Vink eventueel de optie **Alarm** aan, indien je een alarm wenst te ontvangen wanneer de activiteit start of voor de activiteit start.
- 10 Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Alarm** één van de volgende opties
 - **Wanneer het start**
 - **5 minuten voor start**
 - **15 minuten voor start**
 - **30 minuten voor start**
 - **1 uur voor start**
 - **2 uur voor start**
 - **1 dag voor start**
- 11 Tik op om het alarm in te stellen.
- 12 Typ in het veld **Bericht** de tekst in van het alarm.
- 13 Vink de optie **Spreek uit** aan als het bericht moet worden voorgelezen.
- 14 Vink de optie **Toon bericht** aan als het bericht moet verschijnen op het toestel.
- 15 Om een geluid toe te voegen aan het alarm, tik op naast **Geluid**, selecteer een geluid en tik op **Openen**.
- 16 Tik op **OK**.
- 17 Tik op **Opslaan**.
- 18 Tik op **OK**.

1.6 Een activiteit wijzigen

- 1 Kies **Extra > Agenda > Agenda bewerken**.
- 2 Selecteer de activiteit die je wil wijzigen.
- 3 Tik op **Bewerken**.
- 4 Wijzig eventueel in het veld **Activiteit** de naam in van de activiteit of afspraak.
- 5 Tik eventueel naast het veld **Figuur** op  om een afbeelding toe te voegen aan de activiteit of de afbeelding van de activiteit te wijzigen.
- 6 Maak gebruik van de vervolgkeuzelijsten in het dialoogvenster **Symbol** om de afbeelding op te zoeken, selecteer de afbeelding en tik op **OK**.
- 7 Wijzig eventueel in de vervolgkeuzelijst **Tijdstip** de herhaling van de activiteit:
 - **Eenmalig**
 - **Elke Dag**
 - **Elke Werkdag**
 - **Elke Week**
 - **Elke Maand**
 - **Elk Jaar**
- 8 Wijzig eventueel in het veld **Duur** één van de volgende opties:
 - **Volledige dag**
 - **Van Tot**
- 9 Indien je gekozen hebt voor de optie **Van Tot**, geef je in de velden **Van** en **Tot** de starttijd en de stoptijd in van de activiteit. Tik op de cijfers van het uur en gebruik de pijltjes om het uur aan te passen. Tik op de cijfers van de minuten en gebruik de pijltjes om de minuten aan te passen.
- 10 Vink eventueel de optie **Alarm** aan, indien je een alarm wenst te ontvangen wanneer de activiteit start of voor de activiteit start.

- 11 Selecteer in de vervolkeuzelijst **Alarm** één van de volgende opties
 - **Wanneer het start**
 - **5 minuten voor start**
 - **15 minuten voor start**
 - **30 minuten voor start**
 - **1 uur voor start**
 - **2 uur voor start**
 - **1 dag voor start**
- 12 Tik op om het alarm in te stellen.
- 13 Typ in het veld **Bericht** de tekst in van het alarm.
- 14 Vink de optie **Spreek uit** aan als het bericht moet worden voorgelezen.
- 15 Vink de optie **Toon bericht** aan als het bericht moet verschijnen op het toestel.
- 16 Om een geluid toe te voegen aan het alarm, tik op naast **Geluid**, selecteer een geluid en tik op **Openen**.
- 17 Tik op **OK**.
- 18 Tik op **Opslaan**.
- 19 Tik op **OK**.


1.7 Een activiteit verwijderen

- 1 Kies **Extra > Agenda > Agenda bewerken**.
- 2 Selecteer de activiteit die je wil verwijderen.
- 3 Tik op **Bewerken**.

- 4 Tik op **Verwijderen**.
- 5 Tik op **OK**.

1.8 De achtergrond van de agenda instellen



Bij een communicatiekaart, die gebruik maakt van agendavakjes, kan per maand een aangepaste achtergrond worden ingesteld.

- 1 Open een communicatiekaart met agendavakjes.
- 2 Kies **Extra > Agenda > Aangepaste achtergrond**.
- 3 Tik op  naast de maand waarvan je de achtergrond wil aanpassen.
- 4 Maak gebruik van de vervolgkeuzelijsten in het dialoogvenster **Symbol** om de afbeelding op te zoeken, selecteer de afbeelding en tik op **OK**.
- 5 Herhaal vanaf stap 2 voor de andere maanden.
- 6 Tik op **OK**.
- 7 Voer één van de volgende handelingen uit om de wijzigingen in de communicatiekaart op te slaan:
 - Kies **Bestand > Opslaan**.
 - Druk op **Ctrl + S**.



2 Het adresboek

In het toestel kan je alle namen en telefoonnummers van je vrienden en contactpersonen opslaan in het adresboek. Het adresboek kan worden gebruikt in een communicatiekaart, om bijvoorbeeld een contactpersoon op te bellen.

2.1 Een contactpersoon toevoegen


- 1 Kies **Extra > Adresboek**.
- 2 Tik op **Contactpersoon toevoegen** .
- 3 Tik op  om een afbeelding toe te voegen aan de contactpersoon.
- 4 Maak gebruik van de vervolgkeuzelijsten in het dialoogvenster **Symbol** om de afbeelding op te zoeken, selecteer de afbeelding en tik op **OK**.
- 5 Tik in het veld **Naam** en vul de naam in van de contactpersoon. Dit veld is verplicht in te vullen!
- 6 Tik in het veld **Telefoon** en vul het telefoonnummer in van de contactpersoon.
- 7 Tik op **OK**.

2.2 Een contactpersoon bewerken

- 1 Kies **Extra > Adresboek**.
- 2 Tik op **Contactpersoon bewerken** .
- 3 Tik op  om eventueel een (andere) afbeelding toe te voegen aan de contactpersoon.
- 4 Maak gebruik van de vervolgkeuzelijsten in het dialoogvenster **Symbol** om de afbeelding op te zoeken, selecteer de afbeelding en tik op **OK**.
- 5 Tik in het veld **Naam** en wijzig eventueel de naam van de contactpersoon. Dit veld is verplicht in te vullen!

- 6 Tik in het veld **Telefoon** en wijzig eventueel het telefoonnummer van de contactpersoon.
- 7 Tik op **OK**.

2.3 Een contactpersoon verwijderen

- 1 Kies **Extra > Adresboek**.
- 2 Selecteer de contactpersoon die je wil verwijderen.
- 3 Tik op **Contactpersoon verwijderen** .
- 4 Tik op **OK**.

H **Verbinding met de Eddy**

1 Wat is de Eddy?

De Eddy is een klein draagbaar display met ingebouwde luidspreker. Via bluetooth kan er verbinding worden gemaakt tussen jouw toestel en de Eddy. Er kan naar keuze tekst en/of geluid worden doorgestuurd. De tekst verschijnt op 1, 2 of 3 tekstlijnen afhankelijk van de instellingen.



Figuur 1: De Eddy

ZIE OOK:

"De Eddy instellen" op pagina 71

2 Bluetooth

Bluetooth is een communicatietechnologie die draadloos werkt over een korte afstand. Met bluetooth is er geen fysieke verbinding nodig. Je kunt gegevens uitwisselen over een afstand van ongeveer 10 meter. Bij bluetooth is het niet nodig om de apparaten op elkaar te richten. Als de apparaten zich binnen elkaars bereik bevinden, kunnen er gegevens worden overgedragen, ook als de apparaten zich in aparte ruimten bevinden.

Bij jouw toestel kan je gebruik maken van bluetooth om verbinding te maken met andere bluetooth apparaten. Bijvoorbeeld de Eddy of een GSM.



Sommige apparaten zijn mogelijk niet compatibel met jouw toestel.



Voorwerpen tussen de apparaten doen de afstand afnemen waartussen de apparaten kunnen communiceren.

3 De Eddy instellen

- 1 Kies **Extra > Eddy > Instellingen**.
- 2 Vink eventueel de volgende opties aan:


Maak automatisch verbinding wanneer Mind Express start	Indien aangevinkt zal het toestel automatisch proberen verbinding te maken met de Eddy.
Zend audio	Indien aangevinkt zal het geluid enkel nog uit de luidsprekers van de Eddy komen.
Zend tekst	Indien aangevinkt verschijnt de tekst op de Eddy.
Schrijf in hoofdletters	Indien aangevinkt verschijnt de tekst in hoofdletters op de Eddy.
Aantal tekstlijnen op scherm	Selecteer in de vervolgkeuzelijst hoeveel lijnen tekst (1,2 of 3) op het scherm van de Eddy moeten verschijnen.

- 3 Tik op **OK**.


ZIE OOK:

"Wat is de Eddy?" op pagina 70

4 De Eddy zoeken

- 1 Kies **Extra > Eddy > Verbinden**.
- 2 Tik op **Zoek** .
De gevonden Eddy verschijnt in de vervolgkeuzelijst.
- 3 Voer één van de volgende handelingen uit:
 - Tik op **OK**.
 - Maak verbinding met de Eddy. Zie "Een verbinding met de Eddy maken" op pagina 72.

5 Een verbinding met de Eddy maken

- 1 Kies **Extra > Eddy > Verbinden**.
- 2 Tik op **Verbinden** .
Het dialoogvenster **Eddy** verschijnt met de melding **Verbonden met Eddy**.
- 3 Tik op **OK**.
- 4 Tik op **OK**.

ZIE OOK:

"De verbinding met de Eddy verbreken" op pagina 73

6 De verbinding met de Eddy verbreken

- 1 Kies **Extra > Eddy > Verbreken**.

De verbinding met de Eddy is verbroken.

ZIE OOK:

"Een verbinding met de Eddy maken" op pagina 72

I Verbinding met computer en USB-aansluitingen

1 Verbinding met de computer

Je kan het toestel met de meegeleverde USB-kabel op een computer aansluiten. Door het toestel op een computer aan te sluiten, kan je gegevens van en naar het toestel overbrengen met behulp van Mind Express.

2 Het toestel met de computer verbinden

- 1 Sluit de meegeleverde USB-kabel aan tussen het toestel en de PC.
Het dialoogvenster **Windows Mobile Apparaatcentrum** verschijnt op de PC.

ZIE OOK:

"De verbinding tussen het toestel en de computer verbreken" op pagina 76

3 De verbinding tussen het toestel en de computer verbreken

Om te vermijden dat er gegevens op het toestel verloren gaan of om te vermijden dat het opslaggeheugen van het toestel wordt beschadigd, gebruik je best onderstaande werkwijze om de verbinding tussen het toestel en de computer te verbreken.

- 1 Klik op het USB-pictogram in het systeemvak van Windows.
- 2 Klik op de optie om het toestel veilig te verwijderen.
- 3 Verwijder de USB-kabel tussen het toestel en de computer.

ZIE OOK:

"Het toestel met de computer verbinden" op pagina 76

4 Extern toetsenbord aansluiten

- 1 Sluit het extern toetsenbord via de meegeleverde USB-verloopkabel aan op jouw toestel.
- 2 Afhankelijk van het toestel waarmee je werkt, voer je één van de volgende handelingen uit:

Toestel	Handeling
Smart	Kies Extra > Smart3 > Instellingen .
Zingui	Kies Extra > Zingui > Instellingen .

- 3 Selecteer in de vervolgkeuzelijst **USB toetsenbord** de toetsenbordindeling van het toetsenbord dat je hebt aangesloten.
- 4 Tik op **OK**.

5 Externe muis aansluiten

- 1 Sluit de externe muis via de meegeleverde USB-verloopkabel aan op jouw toestel.

Als je ook het toetsenbord wil gebruiken, sluit je eerst het toetsenbord aan op jouw toestel en sluit je de muis aan op de USB-ingang van het toetsenbord.



Het toetsenbord dat wordt meegeleverd met de Zingui is voorzien van een USB-ingang.

6 Een USB-stick aansluiten

Je kan een back-up te nemen van jouw toestel op een USB-stick.

- 1 Sluit de USB-stick via de meegeleverde USB-verloopkabel aan op jouw toestel.

J Telefoneren

1 Telefoon

Via bluetooth kan er verbinding worden gemaakt tussen de Smart en je mobiele telefoon. Eens de verbinding is gemaakt kan je met de Smart bellen naar een zelf in te geven telefoonnummer of naar personen uit het adresboek (bijvoorbeeld via het bestand *app_bellen_smart*).

2 De bluetooth aanzetten

Om verbinding te kunnen maken tussen de mobiele telefoon en de Smart moet je van beide toestellen de bluetooth aanzetten.

- 1 Kies **Extra > Telefoon > Zet bluetooth aan**.

Er wordt een geluidsignaal weergegeven op het moment dat de bluetooth aan staat.

ZIE OOK:

"Sms'en" op pagina 104

3 De telefoonopties van de Smart instellen

Je kan de bluetooth naam van de Smart wijzigen en je kan de bluetooth automatisch aanzetten bij het opstarten van de Smart. Je kan ook gebeurtenissen visualiseren. Bijvoorbeeld wanneer de bluetooth wordt aangezet, wanneer je wordt gebeld, ...

- 1 Kies **Extra > Telefoon > Instellingen**.
- 2 Wijzig eventueel de bluetooth naam van de Smart in het veld **Bluetooth naam**.
Deze naam verschijnt in de lijst van de gekoppelde apparaten op je mobiele telefoon.
- 3 Vink eventueel de optie **Initialisatie bij opstarten** om de bluetooth aan te zetten bij het opstarten van de Smart.
- 4 Vink eventueel de optie **Toon extra informatie** aan om bepaalde gebeurtenissen te verduidelijken op het scherm.

BIJVOORBEELD: Het aanzetten van de bluetooth.

- 5 Vink eventueel de optie **Bericht tonen indien u gebeld wordt** aan.
Op de Smart verschijnt een bericht wanneer je wordt gebeld.
- 6 Tik op **OK**.

4 De telefoon met de Smart verbinden

Het verbinden van een mobiele telefoon met de Smart hangt af van het merk en type mobiele telefoon. Hieronder volgt een algemene werkwijze.



Raadpleeg de handleiding van je mobiele telefoon.

- 1 Zet de bluetooth aan van de Smart.
- 2 Zet de bluetooth aan van je mobiele telefoon en laat de telefoon zoeken naar beschikbare apparaten.
- 3 Ga op zoek naar de bluetooth naam van de Smart in de lijst met beschikbare apparaten en maak verbinding.
- 4 Geef de pincode in van de Smart. De standaardcode is 1111.
Wanneer de verbinding is geslaagd kan je de Smart gebruiken om te bellen, op te nemen, in te haken.

5 Een telefoonnummer bellen

Je kan met de Smart een zelf in te geven telefoonnummer bellen.



Via het bestand `app_bellen_smart` kan je naar personen uit het adresboek bellen.

- 1 Kies **Extra > Telefoon > Bellen**.

- 2 Geef in het invoervak van het dialoogvenster **Telefoonnummer** het telefoonnummer in (enkel cijfers).
- 3 Tik op **OK**.

6 De telefoon opnemen

Je kan met de Smart een binnenkomende telefoon opnemen.



Je kan ook via het bestand `app_bellen_smart` de telefoon opnemen.

- 1 Kies **Extra > Telefoon > Opnemen**.

7 De telefoon inhaken

Je kan met de Smart de telefoon inhaken.



Je kan ook via het bestand `app_bellen_smart` de telefoon inhaken.

- 1 Kies **Extra > Telefoon > Inhaken**.

K Omgevingsbediening

1 Omgevingsbediening

Jouw toestel is voorzien van een infraroodontvanger en infraroodzender. Hiermee kan je met jouw toestel andere toestellen zoals televisie, radio, dvd-speler bedienen via infraroodcodes. De infraroodcodes van de toestellen kunnen worden aangeleerd door jouw toestel.

2 Een infraroodcode aanleren

1 Kies **Extra > Omgevingsbediening > Aanleren**.

2 Selecteer een infraroodcode in het dialoogvenster **JabblaIR**

3 Tik in het veld **Naam** de naam in van de infraroodcode.

BIJVOORBEELD: Televisie luider

4 Hou de afstandsbediening van het toestel (bijvoorbeeld de afstandsbediening van de televisie) op een afstand van ongeveer 5 cm van de infraroodontvanger (5) van de Smart.

5 Tik op **Aanleren**.

In het veld **Status** verschijnt de melding **Toets indrukken**.

6 Druk kort op de toets van de afstandsbediening (bijvoorbeeld de volume knop luider).

In het veld **Status** verschijnt de melding **OK**. Indien **Fout** verschijnt, herhaal vanaf stap 5.

7 Richt jouw toestel naar het toestel waarvan je de infraroodcode wilt testen.



Het infraroodsignaal wordt uitgestuurd door de infraroodzender aan de achterkant van jouw toestel.

8 Tik op **Test**.

Indien de infraroodcode de bedoelde bediening heeft uitgevoerd, is de test ok. Indien niet, dan moet de code opnieuw worden aangeleerd.

- 9 Herhaal vanaf stap 2 om nog andere infraroodcodes aan te leren.
- 10 Tik op **OK**.

3 Een back-up van infraroodcodes maken

Er kan een back-up worden genomen van de infraroodcodes om bij problemen terug te zetten. Het kan ook nuttig zijn indien jouw toestel wordt gebruikt op verschillende locaties. Je kunt de infraroodcodes voor locatie A aanleren. Je maakt een back-up. Doe hetzelfde voor locatie B. Via **Back-up terugzetten** kan je wisselen tussen de infraroodcodes afhankelijk van de locatie.

- 1 Kies **Extra > Omgevingsbediening > Back-up**.
- 2 Tik in het veld **Naam** de naam in van de back-up.
BIJVOORBEELD: Thuis
- 3 Tik op **OK**.
- 4 Tik op **Ja** in het dialoogvenster **Back-up**
De back-up wordt gemaakt.

ZIE OOK:

"Een back-up van infraroodcodes terugzetten" op pagina 86

4 Een back-up van infraroodcodes terugzetten

Er kan een back-up worden genomen van de infraroodcodes om bij problemen terug te zetten. Het kan ook nuttig zijn indien jouw toestel wordt gebruikt op verschillende locaties. Je kunt de infraroodcodes voor locatie A aanleren. Je maakt een back-up. Doe hetzelfde voor locatie B. Via Back-up terugzetten kan je wisselen tussen de infraroodcodes afhankelijk van de locatie.

- 1 Kies **Extra > Omgevingsbediening > Back-up terugzetten**.
- 2 Tik in de lijst **Kies Back-up** op de naam van de back-up die je wil terugzetten.



Het terugzetten van een back-up kan enkele minuten duren.

- 3 Tik op **OK**.
De back-up wordt teruggezet.

ZIE OOK:

"Een back-up van infraroodcodes maken" op pagina 85

L Communicatie

1 Communicatie

Op de Smart is Mind Express 4 geïnstalleerd.

Mind Express is een eenvoudig te gebruiken computerprogramma waarin alles zit wat een logopedist of leerkracht nodig heeft om nieuwe communicatieroosters en oefeningen te maken. Een ruim aanbod aan symbolen, afbeeldingen, tekst naar spraak berichten, muziek en geluiden kunnen worden gebruikt om interessante en stimulerende communicatieroosters te maken.

Mensen kunnen dankzij Mind Express gesproken boodschappen vormen door het selecteren van afbeeldingen en/of symbolen. Mind Express heeft onder meer ook een ingebouwde grammaticamodule, die onder andere automatisch werkwoorden vervoegt.

Er is ook een uitgebreid gamma symbolen en pictogrammen beschikbaar. Deze kunnen worden gebruikt om communicatiekaarten, spelletjes, oefeningen of andere toepassingen te maken en je kunt ook eigen tekeningen, foto's of nieuwe symbolen toevoegen.



Je kan documenten aanmaken en bewerken op de Smart, maar het is gemakkelijker om een document aan te maken op de computer en die vervolgens door te sturen naar de Smart via een USB verbinding.



Om documenten aan te maken of te bewerken op de computer, volg de procedure in de handleiding van Mind Express.

2 Een specifieke Smart actie toevoegen

Naast de standaard acties die beschikbaar zijn in Mind Express kan je ook specifieke acties voor de Smart toewijzen aan vakjes in je communicatierooster:

- Eddy
- Omgevingsbediening
- Scherm draaien
- Smart 3 Camera
- Smart3

3 Een Eddy actie toevoegen

Voeg je één van de acties Eddy toe aan een vakje in de communicatiekaart, dan kan je bij het selecteren van dat vakje de verbinding met de Eddy maken of verbreken, de tekst aan of uit zetten, het geluid aan of uit zetten en het volume verhogen of verlagen.

- 1 Kies **Bewerken > Mode bewerken**.
- 2 Dubbeltik op een vakje waar je een actie wil invoegen.
- 3 Kies **Eddy** in het groepsvak **Acties**.
- 4 Kies in de vervolgkeuzelijst **Acties > Eddy** één van de volgende opties:

(Opnieuw) verbinding maken	Maakt de verbinding met de Eddy.
Verbreken	Verbreekt de verbinding met de Eddy.
Tekst wissen	Wist de tekst op de Eddy.
Geluid: aan	Zet het geluid van de Eddy aan.
Geluid: af	Zet het geluid van de Eddy af.
Geluid: aan/af	Wisselt de toestand van het geluid op de Eddy. Staat het geluid aan, dan wordt het geluid na deze actie afgezet. Staat het geluid af, dan wordt het geluid na deze actie aangezet.
Tekst: aan	Zet de tekst op de Eddy aan.
Tekst: af	Zet de tekst op de Eddy af.
Tekst: aan/af	Wisselt de toestand van de tekst op de Eddy. Staat de weergave van de tekst aan, dan wordt de weergave van de tekst na deze actie afgezet. Staat de weergave van de tekst af, dan wordt de weergave van de tekst na deze actie aangezet.
Volume: omhoog	Verhoogt het volume van de Eddy.
Volume: omlaag	Verlaagt het volume van de Eddy.

4 Een omgevingsbedieningactie toevoegen

Voeg je één van de acties **Omgevingsbediening** toe aan een vakje in de communicatiekaart, dan kan je bij het selecteren van dat vakje een toestel in de omgeving bedienen.

- 1 Kies **Bewerken > Mode bewerken**.
- 2 Dubbeltik op een vakje waar je een actie wil invoegen.
- 3 Kies **Omgevingsbediening** in het groepsvak **Acties**.
- 4 Kies in de vervolgkeuzelijst **Acties > Omgevingsbediening** één van de volgende opties:

Pauze	Wijzig in het veld Duur eventueel het aantal milliseconden dat de pauze mag duren. De actie pauze wordt gebruikt om tijd te maken tussen 2 omgevingsbedieningacties. Bijvoorbeeld: als een toestel een te snelle opeenvolging van de signalen niet aanvaardt.
IR1	Hier kan ook de zelfgekozen naam voor deze omgevingsbediening staan. Wijzig eventueel in het veld Herhaal het aantal keren dat het signaal moet worden uitgestuurd. Bijvoorbeeld: als je het volume van een toestel een stuk hoger wil zonder dat je 10 keer op het vakje moet tikken, kan je bij Herhaal 10 ingeven.

5 Een Smart 3 Camera actie toevoegen

Voeg je één van de acties **Smart 3 Camera** toe aan een vakje in de communicatiekaart, dan kan je bij het selecteren van dat vakje een foto nemen, de vorige foto of volgende foto weergeven of een foto verwijderen.



Om de foto's te kunnen bekijken moet de communicatiekaart een vakje van het type Smart 3 Camera bevatten.

- 1 Kies **Bewerken > Mode bewerken**.
- 2 Dubbeltik op een vakje waar je een camera-actie wil invoegen.

- 3 Kies **Smart 3 Camera** in het groepsvak **Acties**.
- 4 Kies in de vervolgkeuzelijst **Acties > Smart 3 Camera** één van de volgende opties:

Foto's voor Media Library	Hiermee kan je een foto nemen.
Volgende foto	De volgende foto uit de afbeeldingsbibliotheek wordt getoond.
Vorige foto	De vorige foto uit de afbeeldingsbibliotheek wordt getoond.
Verwijder foto	De actieve foto wordt verwijderd uit de afbeeldingsbibliotheek.

6 Een Smart3 actie toevoegen

Voeg je één van de acties **Smart3** toe aan een vakje in de communicatiekaart, dan kan je bij het selecteren van dat vakje de helderheid aanpassen, het toestel in slaapstand of uit zetten, de microfoon aan of uit zetten.

- 1 Kies **Bewerken > Mode bewerken**.
- 2 Dubbeltik op een vakje waar je een actie wil invoegen.
- 3 Kies **Smart3** in het groepsvak **Acties**.
- 4 Kies in de vervolgkeuzelijst **Acties > Smart3** één van de volgende opties:

Verhoog helderheid	Verhoogt de helderheid van het scherm.
Verlaag helderheid	Verlaagt de helderheid van het scherm.
Slaapstand	Plaats het toestel in slaapstand.
Afsluiten	Sluit het toestel af.

Microfoon aan	Zet de microfoon van het toestel aan.
Microfoon uit	Zet de microfoon van het toestel uit.
Microfoon aan/uit	Wisselt de toestand van de microfoon. Staat de microfoon aan, dan wordt hij na deze actie uit gezet. Staat de microfoon uit, dan wordt het na deze actie aan gezet.

7 Een scherm draaien actie toevoegen

Voeg je één van de acties **Schermdraaien** toe aan een vakje in de communicatiekaart, dan kan je bij het selecteren van dat vakje het scherm staand of liggend weergeven of je kan wisselen van de staande weergave naar de liggende weergave of omgekeerd.

- 1 Kies **Bewerken > Mode bewerken**.
- 2 Dubbeltik op een vakje waar je een actie wil invoegen.
- 3 Kies **Schermdraaien** in het groepsvak **Acties**.
- 4 Kies in de vervolkeuzelijst **Acties > Schermdraaien** één van de volgende opties:

Staan	Het scherm wordt staand weergegeven.
Liggend	Het scherm wordt liggend weergegeven.
Weergave Draaien	Het scherm wordt gedraaid. Wordt het scherm staand weergegeven, dan wordt het na deze actie liggend weergegeven. Wordt het scherm liggend weergegeven, dan wordt het na deze actie staand weergegeven.

M Problemen oplossen

1 Het serienummer van de Smart opzoeken

Bij ieder contact met de supportafdeling zal worden gevraagd naar het serienummer van de Smart.

- 1 Leg de Smart neer met de riem naar boven.
- 2 Voer één van de volgende handelingen uit:

Toestel is voorzien van beschermhoes	Maak de sluiting van de riem los en maak de beschermhoes los om de zelfklever met het serienummer te kunnen bekijken.
Toestel is niet voorzien van beschermhoes	Maak de sluiting van de riem los of schuif de riem opzij om de zelfklever met het serienummer te kunnen bekijken.

2 De versie van Mind Express controleren op de Smart

- 1 Kies **Bestand > Info**.
- 2 Bovenaan het dialoogvenster **Mind Express** staat de versie van Mind Express. Bijvoorbeeld 4.2.3.1267.

3 Geactiveerde symbolenbibliotheken bekijken

- 1 Kies **Bestand > Info**.

- 2 Bekijk in de lijst de symbolenbibliotheken. Gebruik eventueel de verticale schuifbalk om de volledige lijst te zien.

Aanduiding	Uitleg
zwart	geïnstalleerd + licentie
grijs + *	niet geïnstalleerd of niet beschikbaar in de gekozen taal
lichtgrijs	geïnstalleerd, maar geen licentie



Wil je graag een licentie aanvragen voor andere symbolenbibliotheken, contacteer de verdeler waar je het toestel hebt aangekocht.

4 Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
Het aanraakscherm reageert langzaam of niet naar behoren.	<ul style="list-style-type: none">• Gebruik eventueel een stylus om het aanraakscherm aan te tikken.• Start het toestel opnieuw op om eventuele softwarefouten te verhelpen.• Controleer of de meest recente versie van de software is geïnstalleerd.• Als er krassen of beschadigingen zijn op het aanraakscherm, contacteer dan de supportafdeling van de verdeler waar je het toestel hebt aangekocht.
Het toestel reageert niet meer.	Hou de resetknop gedurende 5 seconden ingedrukt. Het toestel schakelt uit. Druk op de startknop om het toestel opnieuw op te starten.
Het toestel wordt warm.	Bij langdurig en intensief gebruik van het toestel, kan het toestel warm worden. Dit is normaal en dit heeft geen invloed op de levensduur of prestaties van het toestel.
Geen bluetooth apparaten gevonden.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of bluetooth is ingeschakeld op het toestel waarmee je verbinding wil maken.• Zorg dat jouw toestel en het andere apparaat zich binnen de maximale afstand van 10 meter bevinden.• Verwijder eventuele voorwerpen tussen het toestel en het andere apparaat.• Het apparaat is mogelijk niet compatibel met jouw toestel.

Probleem	Oplossing
Geen verbinding tussen het toestel en de computer.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de kabel tussen het toestel en de computer correct is aangesloten.• Controleer of Windows Mobile Apparaatcentrum op de computer is geïnstalleerd.
Het toestel kan niet worden aangezet. Bij het aanzetten van het toestel knippert de aan/uit indicator.	De batterij is onvoldoende opgeladen. Sluit de voeding aan en laat het toestel enkele minuten opladen vooraleer het terug aan te zetten.
De batterij wordt niet goed opgeladen.	Als de batterij niet meer volledig kan worden opgeladen, contacteer dan de supportafdeling van de verdeler waar je het toestel hebt aangekocht.

N Bijlagen

1 Acapela

Tabel 1: Klinkers en tweeklanken

Symbol	Transcriptie	Zoals in:
I	b I I t	bid
E	b E I t	bed
Y	b Y I t s	butts
O	b O I s	bos
@	r e I d @	rede
i	b i I t	bied
e	b e I t	beet
y	b y I t	buut
2	b 2 I k	beuk
a	b a I t	baat
u	b u I k	boek
o	b o I t	boot
Ei	b E i I t	bijt
9y	b 9 y I t	buit
Au	b A u I t	bout
E:	k A r j E: I r @	carrière
E~	t E~ I b r @	timbre

Symbol	Transcriptie	Zoals in:
A~	S A~ s O~1	chanson
O~	b O~ b O~1	bonbon
A	b A1 k	bak

Tabel 2: Medeklinkers

Symbol	Transcriptie	Zoals in:
p	p A1 t	pad
t	t A1 k	tak
tj	p O1 tj@	potje
k	k A1 t	kat
b	b A1 t	bad
d	d A1 k	dak
g	z A1 g d u k	zakdoek
f	f i1 t s	fiets
s	s A1 p	sap
S	S a1 l	sjaal
x	l A1 x	lach
v	v A1 t	vat
z	z A1 t	zat
Z	p l A n t a1 Z@	plantage
G	r e1 G@	regen
h	h 9y1 s	huis

Symbool	Transcriptie	Zoals in:
w	s n e l w @	sneeuwen
j	a l j @	aaien
l	A l l @	alle
r	h a l r	haar
m	m A l t	mat
n	n A l t	nat
N	l A l N	lang
nj	A l n j @ r	anjer

2 Met de Smart SMS'en

Vanuit een communicatierooster (bijvoorbeeld: **app_sms** en **app_sms_eenv** in Mind Express) kan je sms-berichten versturen en ontvangen. De sms-berichten kunnen worden opgebouwd via tekst of via symbolen. De ontvangen sms-berichten worden luidop voorgelezen.

Om te kunnen sms'en met de Smart moet je beschikken over een smartphone met daarop het Android besturingssysteem 4.2 of hoger. Je hoeft enkel de telefoonopties van de Smart in te stellen (zie "De telefoonopties van de Smart instellen" op pagina 80) en de Jabbla BT app te installeren op je smartphone (zie "De Jabbla BT app downloaden en installeren" op pagina 103).

ZIE OOK:

"De versie van Android op je smartphone controleren" op pagina 102

2.1 De versie van Android op je smartphone controleren

1 Kies **Instellingen**.

2 Veeg alles naar boven.

3 Tik op **Toestel-info**.



Toestel-info bevindt zich helemaal onderaan de lijst. Op sommige toestellen staat er Over de telefoon of iets gelijkaardig.

4 Bekijk bij **Android-versie** de versie die op jouw toestel is geïnstalleerd.

ZIE OOK:

"Met de Smart SMS'en" op pagina 102

"De Jabbla BT app downloaden en installeren" op pagina 103

2.2 De Jabbla BT app downloaden en installeren

1 Tik op je smartphone op **Play Store**.

2 Geef Jabbla in in het zoekvak en tik op  onderaan rechts op het schermtoetsenbord.

3 Tik op de Jabbla BT app.



Indien je de app niet terug vindt in de Play Store, dan beschikt je smartphone niet over de Android versie 4.2 of hoger.

4 Tik op **INSTALLEREN**.



De app JABBLA BT is een gratis app. Je hoeft dus geen betalingsoptie in te stellen.

5 Tik op **ACCEPTEREN**.

6 Tik op **OPENEN**.

- 7 Ga op zoek naar de bluetooth naam van jouw toestel (Smart of Tellus) in de lijst met beschikbare apparaten en maak verbinding.



Klik eventueel op Scannen om de beschikbare apparaten te zien.

- 8 Geef de pincode in van jouw toestel (Smart of Tellus) en tik op **OK**. De standaardcode is 1111.
Wanneer de verbinding is geslaagd, kan je jouw toestel (Smart of Tellus) gebruiken om te sms'en.

ZIE OOK:

"Sms'en" op pagina 104

"De versie van Android op je smartphone controleren" op pagina 102

2.3 Sms'en

Mind Express bevat 2 voorbeeldbestanden om te sms'en:

- **App_sms**, met toetsenbord en woordvoorspelling
- **App_sms_eenv**, eenvoudig versie om te sms'en via symbolen



Zorg dat de bluetooth op jouw toestel en op de smartphone aan staat. De app Jabbla BT moet op de smartphone geïnstalleerd zijn.

- 1 Open het startdocument **me4_ned**.
- 2 Kies de categorie **computer**.

3 Kies één van de volgende apps:

App	Uitleg
SMS	Via deze app kan je je berichten volledig beheren. Je kan nieuwe berichten opstellen, verzenden, ontvangen, beantwoorden, verwijderen.
SMS (eenvoudig)	Via deze app kan je eenvoudige berichten versturen aan de hand van gekozen symbolen.



Voor het gebruik van de sms-voorbeeldbestanden, zie de handleiding van Mind Express.

ZIE OOK:

"De Jabbla BT app downloaden en installeren" op pagina 103

"De bluetooth aanzetten" op pagina 80

A

Aan/uit

- indicator 23
- knop 23

Aanraakscherm 23

- gebruiken 31

Aanraken 31

Aanzetten 29

Acapela 100

Actie

- afsluiten 91
- camera 90
- foto nemen 54
- geluid van de Eddy aan/uitzetten 89
- helderheid 91
- microfoon 91
- omgevingsbediening 90
- Scherm draaien 92
- slaapstand 91
- tekst van de Eddy aan/uitzetten 89
- tekst van de Eddy wissen 89

toevoegen 88

- verbinding met de Eddy maken 89
- verbinding met de Eddy verbreken 89
- volume van de Eddy verhogen/verlagen 89

Activiteit

- toevoegen 61
- verwijderen 64
- wijzigen 63

Adresboek 66

Afmetingen 15

Afsluiten 41

- actie toevoegen 91

Agenda 58

- achtergrond instellen 65

Agenda bekijken 58

Alarm

- toevoegen 58
- verwijderen 60
- wijzigen 59

Android

- besturingssysteem 102
- versie controleren op smartphone 102

App

voor smartphone om te sms'en 103

B

Back-up maken

van de infraroodcodes 85

van de Smart 46

Back-up terugzetten

van de 46

van infraroodcodes 86

Batterij 15

indicator bij het laden 23

resterend vermogen opvragen 31

status bekijken 30

Beschermhoes 19, 23

voorzien op de Smart 28

Bestand 32

verwijderen 48

Besturingssysteem 15

Bijlagen 99

Bluetooth 70

aanzetten 80

Boodschap opnemen 50

in muis mode 51

in opname mode 50

C

Camera 23, 54

actie toevoegen 90

Communicatie 88

Computer

toestel met computer verbinden 76

Contactpersoon

bewerken 66

toevoegen 66

verwijderen 67

D

Datum instellen 36

E

Eddy

actie toevoegen 89

instellen 71

verbinding maken 72

verbinding verbreken 73

wat is de Eddy? 70

zoeken 72

F

Fonetische transcriptie 100

Foto 54

 bekijken 55

 nemen 54

 verwijderen 55, 56

G

Geheugen

 intern 15

 opruimen 47

Geluid

 algemeen volume instellen 37

 opnemen 50

H

Handleiding

 gebruik 11

Helderheid

 actie toevoegen 91

Helderheid scherm aanpassen 37

Herstelling 20

I

Indicator

 aan/uit 23

 batterij 23

Infrarood 84

 ontvanger 23

 zender 23

Infraroodcodes

 aanleren 84

 back-up maken 85

 back-up terugzetten 86

Intern geheugen 15

J

Jabbla BT

 downloaden en installeren 103

K

Knop

 Aan/uit 23

 Resetknop 23

L

Luidsprekers 23

M

Menubalk

terugzetten 39

verbergen 38

Microfoon 23

actie toevoegen 91

Mind Express

versie controleren 94

Muis

externe muis aansluiten 77

Muis mode

boodschap opnemen 51

O

Omgevingsbediening

actie toevoegen 90

Opladen 29

Opname

instellen 39

verwijderen 51

Opname mode

boodschap opnemen 50

Opnemen

boodschap 50

geluid 50

in muis mode 51

in opname mode 50

Opslag

geheugen opruimen 47

Opstart

opties instellen 39

P

Problemen oplossen 96

Processor 15

Programmataal instellen 36

R

Reinigen 20

Reset knop 23

Resetten 40

Riem 23

S

Scherf 15

helderheid aanpassen 37

Scherm draaien 38

actie toevoegen 92

Schermtoetsenbord 32

verbergen 34

weergeven 34

Serienummer

Smart opzoeken 94

Slaapstand 40

actie toevoegen 91

Slepen 31

Smart

achteraanzicht 23

gebruik 13

kennismaken 23

met telefoon verbinden 81

onderdelen meegeleverd 22

serienummer opzoeken 94

zijaanzicht links 23

zijaanzicht rechts 23

Sms'en 104

Spraak

instellen 36

Spreeksnelheid instellen 36

Stand-by 40

Stem

soort stem instellen 36

volume instellen 36

Storingen oplossen 96

Symbolenbibliotheken

beschikbare bekijken 94

T

Taal

instellen 36

programmataal instellen 36

Technische specificaties 15

Tekst ingeven 32, 35

Telefoon 80

inhaken 82

instellen 80

met Smart verbinden 81

opnemen 82

telefoonnummer bellen 81

Tijd instellen 36

Tikken 31

Toestel

aanzetten 29

afsluiten 41

in stand-by zetten 40

voorzien van beschermhoes 28

Toetsenbord 32

extern toetsenbord aansluiten 77

verbergen op het scherm 34

weergeven op het scherm 34

U

Uitschakeltijd instellen 38

Uitspraakwoordenboek 44

USB 15

extern toetsenbord aansluiten 77

externe muis aansluiten 77

USB-stick aansluiten 78

verbinding met de computer maken 76

USB poort 23

USB-stick

aansluiten 78

V

Veiligheidsvoorschriften 18

Verbinding

met de computer maken 76

met Eddy maken 72

met Eddy verbreken 73

tussen toestel en computer verbreken 76

Voeding 23

Volume

algemeen volume instellen 36, 37

stemvolume instellen 36

W

Woordvoorspelling 45

Z

Zinsvoorspelling 45