

# Innehållsförteckning

<b>Att använd bruksanvisningen</b>	<b>11</b>
<b>Inledning</b>	<b>13</b>
<b>A Tekniska specifikationer</b>	<b>15</b>
<b>B Säkerhetsföreskrifter och underhåll</b>	<b>17</b>
1 Säkerhetsföreskrifter .....	18
2 Skyddshölje .....	19
3 Rengöra enheten .....	20
4 Reparationer .....	20
<b>C Komma igång</b>	<b>21</b>
1 Vad finns i Smarts förpackning.....	22
2 Presentation av Smart.....	23
3 Sätta på skyddshöljet på Smart .....	28
4 Aktivera Smart.....	29
5 Ladda enheten.....	29

---

<b>6</b>	<b>Visa batteristatus</b> .....	<b>30</b>
<b>7</b>	<b>Kontrollera batteriets laddning</b> .....	<b>31</b>
<b>8</b>	<b>Använda pekskärmen</b> .....	<b>31</b>
<b>9</b>	<b>Arbeta med filer</b> .....	<b>32</b>
<b>10</b>	<b>Skriva in text</b> .....	<b>33</b>
10.1	Skriva in text .....	33
10.2	Visa indatapanelen på skärmen .....	34
10.3	Dölj indatapanelen på skärmen .....	35
10.4	Ange text med indatapanelen på skärmen .....	35
<b>11</b>	<b>Allmänna inställningar</b> .....	<b>36</b>
11.1	Ställa in programspråket .....	36
11.2	Ställa in tal .....	36
11.3	Ställa in tid och datum .....	36
11.4	Justera bildskärmens ljusstyrka .....	37
11.5	Ställa in volymen .....	37
11.6	Rotera skärmen .....	38
11.7	Ställa in avstängningstiden för Smart .....	38
11.8	Dölja menyfältet .....	39
11.9	Återställa menyfältet .....	39
11.10	Ställa in startalternativen .....	39
11.11	Ställa in inspelningen .....	40

12	Ställa Smart i standbyläge .....	41
13	Stänga av Smart .....	41

## **D Specifika inställningar, säkerhetskopiering och lagringsutrymme 43**

<b>1</b>	<b>Justera användarspecifika inställningar .....</b>	<b>44</b>
1.1	Välja .....	44
1.2	Uttalslexikon, menings- och ordprediktion .....	44
1.2.1	<i>Uttalslexikon .....</i>	<i>44</i>
1.2.2	<i>Prediktion av ord .....</i>	<i>45</i>
1.2.3	<i>Prediktion av mening .....</i>	<i>45</i>
<b>2</b>	<b>Säkerhetskopiering och lagringsutrymme .....</b>	<b>46</b>
2.1	Säkerhetskopiera Smart .....	46
2.2	Återställa säkerhetskopiering till Smart .....	47
2.3	Rensa minnet i Smart .....	47
2.4	Ta bort en fil från Smart .....	48

---

## **E Spela in ett meddelande 49**

- 1 Spela in ett meddelande..... 50
- 2 Spela in ett meddelande i inspelningsläge ..... 50
- 3 Spela in ett meddelande i musläge ..... 51
- 4 Ta bort ett meddelande från Smart..... 52

## **F Kameran 53**

- 1 Kameran ..... 54
- 2 Ta en bild..... 54
- 3 Ta en bild att infoga i en ruta ..... 54
- 4 Visa en bild ..... 55
- 5 Ta bort en bild ..... 55
- 6 Ta bort en bild (genom att rensa disken)..... 56

## **G Personliga program 57**

- 1 Agendan ..... 58
  - 1.1 Visa agendan ..... 58
  - 1.2 Lägga till larm..... 59

1.3	Ändra ett larm .....	60
1.4	Ta bort ett larm .....	61
1.5	Lägga till en aktivitet .....	61
1.6	Ändra en aktivitet .....	63
1.7	Ta bort en aktivitet .....	65
1.8	Ställa in bakgrunden på agenda .....	65
<b>2</b>	<b>Adressboken .....</b>	<b>66</b>
2.1	Lägga till en kontakt .....	66
2.2	Redigera en kontakt .....	66
2.3	Radera en kontakt .....	67

---

## **H Anslutning till Eddy 69**

1	Vad är Eddy?.....	70
2	Bluetooth .....	70
3	Ställa in Eddy .....	71
4	Söka efter Eddy .....	71
5	Ansluta till Eddy .....	72
6	Koppla från Eddy .....	72

## **I Ansluta till datorn och USB-anlutningar 73**

1	Anslutning till datorn .....	74
2	Ansluta enheten till datorn .....	74
3	Koppla bort enheten från datorn.....	74
4	Ansluta till en extern Input Panel .....	75
5	Ansluta en extern mus.....	75
6	Ansluta ett USB-minne .....	75

## **J Ringa upp 77**

1	Telefon.....	78
2	Aktivera Bluetooth.....	78
3	Ställa in Smart telefonalternativ .....	78
4	Ansluta telefonen till Smart.....	79
5	Ringa ett telefonnummer.....	80
6	Svara i telefonen.....	80
7	Lägga på .....	81

## **K Miljökontroll 83**

1	Miljökontroll .....	84
2	Hämta en infraröd kod .....	84
3	Skapa en säkerhetskopia av infraröda koder.....	85
4	Återställa säkerhetskopia av infraröda koder .....	86

## **L Kommunikation 87**

1	Kommunikation .....	88
2	Lägga till viss Smart-åtgärd.....	88



---

3	Lägga till Eddy-åtgärd.....	89
4	Lägga till en miljökontrollåtgärd.....	90
5	Lägga till en Smart 3 Camera-åtgärd .....	91
6	Lägga till en Smart3-åtgärd.....	92
7	Lägga till åtgärd för rotera skärm .....	93

## **M Felsökning** **95**

1	Hitta serienumret till Smart.....	96
2	Kontrollera Mind Express-versionen på Smart .....	96
3	Visa de aktiverade symbolbiblioteken.....	97
4	Felsökning .....	98

## **N Bilagor** **99**

1	Acapela .....	100
---	---------------	-----

## **Index** **105**



# Att använd bruksanvisningen

Den här bruksanvisningen beskriver Smart. Anvisningarna är sammanställda så att det går snabbt och lätt att hitta i programvaran Smart och Mind Express.

Få ut det mesta av programvaran genom att läsa bruksanvisningarna noggrant och bekanta dig med olika aspekter av enheten och programvaran.

Se Jabbla om du är osäker.

På grund av kontinuerlig utveckling av programvaran, tar Jabbla inget ansvar för ändringar i innehåll eller bilder efter publicering av den här bruksanvisningen. I händelse av ändringar går det inte att härleda rättigheter för programvara som redan har levererats.

Jabbla ansvarar inte för (in)direkt, oförutsedd eller särskild skada som orsakas av användning av dokumentationens innehåll. Det här undantaget gäller för alla eventuella rättsliga anspråk.

Innehållet i den här bruksanvisningen är inte bindande. Med reservation för fel.

Utskrift, kopiering eller delvis reproduktion är förbjudet utan skriftligt tillstånd från Jabbla.

Vi förbehåller oss rätten att ändra programvaran om vi anser att ändringarna är nödvändiga för korrekt funktion.

I det här fallet har kunden inte rätt att säga upp avtalet eller kräva att samma ändringar utförs på redan beställda enheter.

# Inledning

# Smart

---

Smart är en liten och smidig bärbar kommunikationsenhet med en dynamisk skärm. Det går att tala meddelanden med enheten genom symboler, bilder eller andra visuella bilder. Smart bygger på datorplattformen Windows Mobile och använder programvaran Mind Express.

Smart har en inbyggd mikrofon med hög kvalitet och robust ljudförstärkning så att sammanställda och/eller valda meddelanden reproduceras realistiskt med hög och klar volym.

Smart har en funktion för kommunikationsstöd. Den här enheten är avsedd att användas i vardagen av personer (från tre års ålder) med kommunikationssvårigheter (som inte kan tala eller inte kan tala tydligt). De måste även ha tillräcklig motorisk och mental förmåga att använda enheten. Enheten är inte lämplig i kliniskt, terapeutiskt eller i diagnostiskt syfte. Enheten kan lära in infraröda koder och överföra dessa för att styra andra enheter. Detta inkluderar enheter för allmän användning som t.ex. audiovisuella och tillämpningar för automatisering i hemmet. Det här tillägget är inte lämpligt i kliniskt, terapeutiskt eller i diagnostiskt syfte.

Det finns mer information om att skapa filer på Smart i bruksanvisningen till Mind Express som medföljer Smart.

Läs bruksanvisningen noggrant för bästa resultat med Smart.

# A Tekniska specifikationer

**Tabell 1:** Tekniska specifikationer

Specifikation	Förklaring
Processor	NVIDIA® Tegra 2 1GHz
Operativsystem	Microsoft Windows® Mobile™ 6.0
Internminne	512 MB SDRAM + 1 GB FLASH
Skärm	Ljusstark 4,3-tums WVGA TFT pekskärm <ul style="list-style-type: none"><li>• 480 x 800 bildpunkter</li><li>• 262 144 färger</li><li>• LED bakgrundsbelysning</li></ul>
USB	1 x USB 2.0 OTG (slav + master)
Batteri	Internt batteri
Vikt	Enhet 250 g, skydd 41 g
Mått	<ul style="list-style-type: none"><li>• Enhet: 135 mm x 79 mm x 25 mm</li><li>• Enhet med skydd: 140,5 mm x 85 mm x 30 mm</li></ul>



## **B**    **Säkerhetsföreskrifter och underhåll**

## 1 Säkerhetsföreskrifter

Den låga vikten gör Smart mycket bärbar och rörlig. Vi rekommenderar att du alltid använder Smart med det medföljande skyddshöljet på.



Enheten använder ett Li-ion-batteri. Kasta inte det gamla batteriet när du byter ut det. Följ reglerna för avfallshantering som gäller i ditt område. Det går även att skicka tillbaka batteriet till leverantören.



Förvara enheten avstängd med fullt laddat batteri om du inte tänker använda enheten under en längre tidsperiod. Kontrollera alltid att enheten är avstängd (tryck på och håll ned strömbrytaren i fyra sekunder).



Undvik att placera enheten i närheten av värmekällor eller på platser som kan bli mycket varma. På sommaren kan det till exempel bli mycket varmt i en bil. Höga temperaturer kan påverka batteritiden negativt.



Smart är inte vattentålig, men översidan är stänkskyddad. På undersidan finns det öppningar för högtalare som kan göra det möjligt för fukt eller smuts att komma in. Det kan påverka högtalarens ljudkvalitet. Försök alltid att undvika situationer som orsakar att fukt eller smuts tränger in i högtalaröppningarna. Var försiktig när du rengör enheten och följ alltid rengöringsanvisningarna.



Enheten går att använda med fingertryck på skärmen. Du behöver inte använda kraft. En lätt tryckning räcker för att till exempel välja en symbol på skärmen. Det går även att göra detta med en penna eller liknande, men använd aldrig vassa föremål.



Det är mycket lätt att spela in ljud med Smart. Du behöver inte tala med hög röst när du spelar in. Enheten förstärker inspelningen och reproducerar dem så naturligt som möjligt. Det går alltid att justera volymen. Säkerställ alltid att volymen inte är irriterande eller skadlig för dig och din omgivning.

## 2 Skyddshölje

Smart har ett skyddshölje (15) som ger ytterligare skydd av enheten. Skyddshöljet gör enheten mindre sårbar mot stötar och skyddar den mot fukt och smuts.



## 3 Rengöra enheten

Rengör enheten regelbundet så att bakterier inte får chansen att sprida sig.

Ta bort damm med en torr, mjuk trasa. Ta bort fläckar på höljet med en fuktig trasa. Låt inte fukt tränga in i högtalarens, mikrofonens eller anslutningarnas öppningar. Smuts nära kontakterna går att ta bort med en bomullspinne.

Rengör pekskärmen med en torr trasa. Använd inte hushållspapper eftersom detta kan repa. Ta bort fett eller fläckar på skärmen med rengöringsmedel avsedda för rengöring av bildskärmar (spray eller duk). Tryck inte för hårt mot skärmen under rengöring.

Det är bäst att rengöra Smart med en torr eller lätt fuktad trasa.

## 4 Reparationer

I händelse av skada på enheten, kontakta distributören eller Jabblas supportavdelning.

Försök inte att reparera enheten själv. Detta kan skada enheten och upphäva garantin.

# C Komma igång

## 1 Vad finns i Smarts förpackning

Smart levereras med följande delar:


- skydd
- penna
- nätadapter med kontakt och kabel
- USB-kabel för anslutning till en indatapanel, flashenhet och mus med USB
- USB-kabel för anslutning till dator
- bruksanvisning Smart
- Mind Express (programvara + bruksanvisning)

## 2 Presentation av Smart



**Figur 1:** Smart, vy från vänster

Nr.	Identifiering	Förklaring
1	Återställ	Den här knappen döljer/visar menyn och återställer enheten.
2	USB-port	USB-porten går att använda till att skapa/återställa en säkerhetskopiering, ansluta till en dator och till en extern indatapanel eller till en mus.

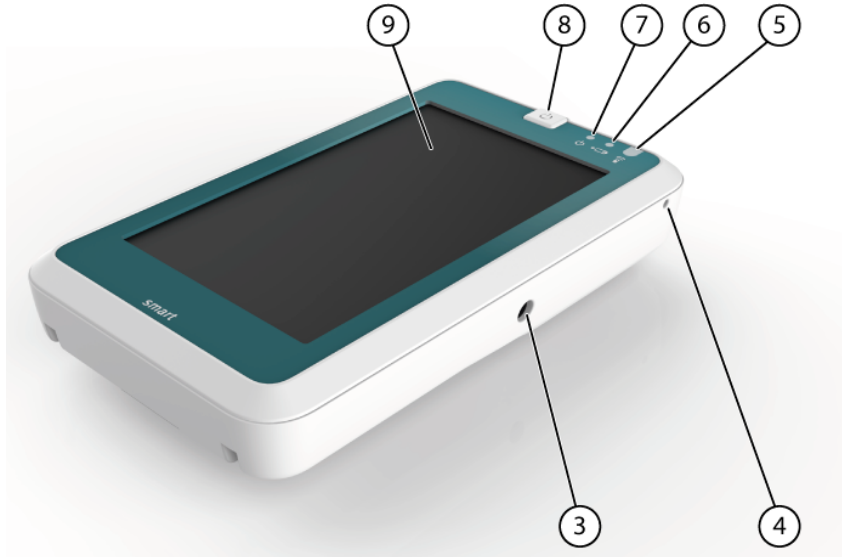


**Figur 2:** Smart, vy från höger

Nr.	Identifiering	Förklaring
3	Anslutning till nätadapter	Den här anslutningen laddar enheten med den medföljande nätadaptern.
4	Mikrofonöppning	Det här är mikrofonöppningen där ljudet når enhetens inbyggda mikrofon vid inspelning.
5	Infraröd mottagare	Den infraröda mottagaren som tar emot infraröda koder.
6	Batteriladdningsindikator	Batteriladdningsindikator tänds när enheten ansluts till elnätet genom den medföljande nätadaptern. Indikatorn är gul när batteriet laddas. Den blir grön när batteriet är fulladdat.



Nr.	Identifiering	Förklaring
7	Strömindikator	Strömindikatorn visar enhetens status: <ul data-bbox="452 219 872 347" style="list-style-type: none"><li>• Ingen indikator: enheten är avstängd</li><li>• Röd: batteriladdning mellan 0 och 29 %</li><li>• Gul: batteriladdning mellan 30 och 50 %</li><li>• Grön: batteriladdning mellan 51 och 100 %</li></ul>
8	Strömbrytare	Stänger av eller slår på enheten eller standbyläget
9	Pekskärm	Enheten har en 4,3-tums pekskärm.

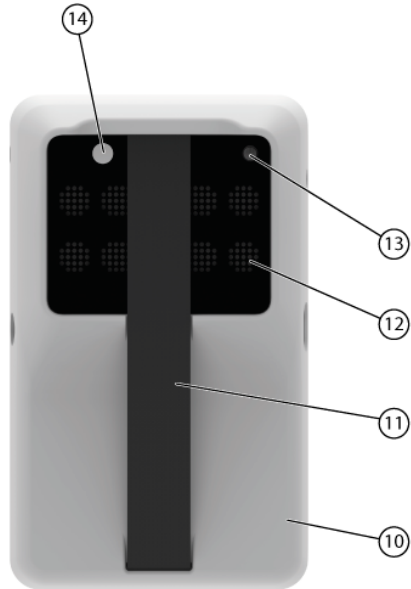

**Figur 3:** Smart, vy från baksidan

Nr.	Identifiering	Förklaring
10	Skyddshölje	Skyddshöljet gör enheten mindre sårbar mot stötar och skyddar den mot fukt och smuts.
11	Rem	Med remmen hålls enheten säkert i handen.

---

Nr.	Identifiering	Förklaring
12	Högtalare	Enheter har ett antal kraftfulla högtalare.
13	Infraröd sändare	Skickar infraröda signaler till andra enheter.
14	Kamera	Enheter har en kamera för fotografering.

## 3 Sätta på skyddshöljet på Smart

Smart har ett skyddshölje (15) som ger ytterligare skydd av enheten. Skyddshöljet gör enheten mindre sårbar mot stötar och skyddar den mot fukt och smuts.

- 1 Placera Smart på ett sådant sätt att remmen är uppåt.



- 2 Lossa på fästet (11b) på remmen.
- 3 För in fästet (11b) genom den avlånga öppningen i skyddshöljet.
- 4 För in fästets nedre del (11a) genom den avlånga öppningen i skyddshöljet.
- 5 Tryck på skyddshöljet på den nedre delen av Smart och greppa samtidigt de båda delarna (11a och 11b).
- 6 Håll i remmens övre del (11c) och tryck samtidigt skyddshöljets övre del över Smart.
- 7 Fäst (11b) till remmens övre del (11c).
- 8 Vänd på Smart och kontrollera att skyddshöljet sitter säkert runt Smart.

## 4 Aktivera Smart

Tryck på strömbrytaren (8) på Smart.

Om Smart var i standbyläge, går den att använda direkt.  
Om Smart var avstängd måste Mind Express först läsas in.

### SE ÄVEN:

"Stänga av Smart" på sidan 41  
"Ställa Smart i standbyläge" på sidan 41

## 5 Ladda enheten

Tiden det går att använda enheten utan att ladda den beror till största delen på:

- ljudvolymen
- inställd avstängningstid
- Bluetooth-användning


Om Smart används ofta, rekommenderar vi att ladda enheten dagligen. Ladda endast enheten med den medföljande nätadaptern. Det går att använda enheten när den laddas.

- 1 Kontrollera batteriets laddning.
- 2 Anslut den medföljande strömkabeln mellan enheten och nätadaptern.  
Indikatorn för batteristatus tänds och är gul under laddning. När batteriet är fulladdat blir indikatorn grön.

## 6 Visa batteristatus

- 1 Visa enhetens strömindikator.
- 2 Strömindikatorn visar följande färger:

Grön	Batteriladdning mellan 51 och 100 %
Gul	Batteriladdning mellan 30 och 50 %
Röd	Batteriladdning mellan 0 och 29 %

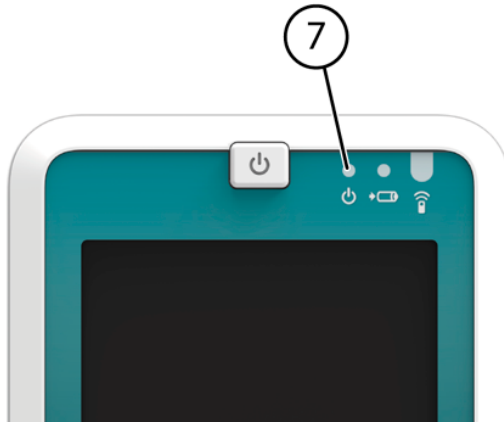

## 7 Kontrollera batteriets laddning

- 1 Öppna **Extra > Batteristatus**.
- 2 Visa batteristatus:
  - **Vid batteridrift**, enheten använder batteriet.
  - **Uppladdat**, enheten är ansluten till adaptern och laddas.
- 3 Visa batteriets laddning
- 4 Om batteriets laddning ligger under 30 % (eller om indikatorn är röd) rekommenderar vi att ladda batteriet.

## 8 Använda pekskärmen

Det är enkelt att välja rutor på pekskärmen. Gör detta med fingernaglarna eller med en penna. Du måste trycka lite hårdare om du väljer ett objekt med fingret än när du använder en penna.

Användaren kan justera sättet att välja på skärmen. Se Mind Express bruksanvisning.



*Kontrollera att skyddsfilmen har tagits bort från enheten.*



*Använd inte vassa verktyg som kan repa pekskärmen.*



*Pekskärmen får inte komma i kontakt med vatten.*



*Pekskärmen inaktiveras automatiskt när enheten går i standbyläge eller om användaren väljer Gå i standbyläge.*

Använd pekskärmen på följande sätt:

- Tryck: välj en ruta genom att trycka på den en gång med fingret eller pennan.
- Vidrör (och håll): välj en ruta genom att trycka på en ruta med fingret eller pennan och håll den längre än vanligt.
- Dra: flytta objekt genom att trycka på ett objekt och med fingret eller pennan och dra det upp, ned, åt vänster eller höger (i redigerings- eller musläge).



*Möjligheten att dra i ett kommunikationsrutnät går att ställa in i Mind Express.*

## 9 Arbeta med filer

Smart använder Mind Express 4.

Det går att skapa nya filer och att öppna, redigera och spara befintliga filer.



Se Mind Express bruksanvisning om att arbeta med filer.



Det är enklare att skapa och redigera filer på en dator med Mind Express och skicka dem till Smart med en USB-anslutning, än att skapa och redigera filerna direkt på Smart.



## 10 Skriva in text

### 10.1 Skriva in text

Det går att skriva in text i en dialogruta med enhetens indatapanel på skärmen. Det finns fyra olika indatapaneler att välja bland.

Input Panel															
Esc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	=	←		
Tab	q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	[	]	\		
Caps Lock	a	s	d	f	g	h	j	k	l	;	'	←			
Shift	z	x	c	v	b	n	m	,	.	/	↑	àú	pgup		
Ctrl	Alt	`						ins	del	←	↓	→	pgdn		

**Figur 4:** Vanlig indatapanel på skärmen

Input Panel															
Esc	!	@	#	\$	%	^	&	*	(	)	_	+	←		
Tab	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	{	}			
Caps Lock	A	S	D	F	G	H	J	K	L	:	"	←			
Shift	Z	X	C	V	B	N	M	<	>	?	↑	àú	Home		
Ctrl	Alt	~						ins	del	←	↓	→	End		

**Figur 5:** Indatapanel på skärmen med Caps Lock aktiverat


Input Panel													
Esc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	ı	ı	←
Tab	æ	à	á	â	ã	ä	å	è	é	ê	ë	ç	ñ
Caps Lock	œ	ı	ı	ı	ı	ö	ó	ô	õ	ö	ø	↵	
Shift	ß	ú	ú	ü	ý	ÿ	ð	š	ž	↑	àú	pgup	
Ctrl	Alt	€						ins	del	←	↓	→	pgdn

Figur 6: Indatapanel på skärmen med specialtecken aktiverade


Input Panel													
Esc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	°	μ	←
Tab	Æ	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	È	É	Ê	Ë	Ç	Ñ
Caps Lock	Œ	ı	ı	ı	ı	ö	ó	ô	õ	ö	ø	↵	
Shift	ß	Ú	Ú	Ü	Ý	ÿ	Ð	Š	Ž	↑	àú	Home	
Ctrl	Alt	£						ins	del	←	↓	→	End

Figur 7: Indatapanel på skärmen med specialtecken och Caps Lock aktiverade

## 10.2 Visa indatapanelen på skärmen

- 1 Tryck på  på menyfältet längst ned till höger på skärmen för att aktivera indatapanelen på skärmen.



*Ikonen  visas endast om en dialogruta med redigerbar text är aktiverad.*


- 2 Tryck på och dra dialogrutan **Input Panel** på titelfältet till önskad plats.

SE ÄVEN:

"Dölj indatapanelen på skärmen" på sidan 35

"Ange text med indatapanelen på skärmen" på sidan 35

## 10.3 Dölj indatapanelen på skärmen

- 1 Tryck på  på menyfältet längst ned till höger på skärmen för att dölja indatapanelen på skärmen.

SE ÄVEN:

"Visa indatapanelen på skärmen" på sidan 34

## 10.4 Ange text med indatapanelen på skärmen

Det går att skriva in text i en dialogruta med ett redigerbart textfält.

- 1 Visa indatapanelen på skärmen.
- 2 Tryck på det redigerbara fältet.
- 3 Skriv text genom att trycka indatapanelens tangenter



*Tryck på Caps Lock om du vill skriva stora bokstäver och/eller andra tecken. Tryck på äü om du vill skriva specialtecken.*

SE ÄVEN:

"Visa indatapanelen på skärmen" på sidan 34

## 11 Allmänna inställningar

### 11.1 Ställa in programspråket

Programvarans eller gränssnittets språk går att ställa in till användarens språk.



*Se Mind Express bruksanvisning om inställning av programspråk.*

### 11.2 Ställa in tal

Meddelanden som du lägger till i rutor i kommunikationsrutnätet läses upp av talenheten. Du ställer in talets egenskaper, såsom språk, röst, röstvolym, allmän volym och hastighet.



*Se Mind Express bruksanvisning om inställning av tal.*

### 11.3 Ställa in tid och datum

Smart kan läsa upp tid, dag och datum. Kontrollera därför att tid och datum är korrekta.

- 1 Öppna **Extra > Datum/tid**.
- 2 Tryck på timma och ställ in timmen med pilarna i fältet **Tid**. Upprepa för minuter och sekunder.
- 3 Tryck på knappen  i fältet **Datum** och välj aktuellt datum i kalendern.

- 4 Välj ett av följande alternativ i listrutan **Tidsbeteckning**:
  - **24t (15:30)**, tiden visas i 24-timmarsformat.
  - **12t (3:30)**, tiden visas i 12-timmarsformat.
  - **FM/EM (3:30 EM)**, tiden visas med indikation om AM (förmiddag) och EM (eftermiddag).
- 5 Tryck på **OK**.

## 11.4 Justera bildskärmens ljusstyrka

- 1 Öppna **Extra > Smart3 > Inställninga**.
- 2 Flytta skjutreglaget intill **Ljusstyrka** tills skärmen har önskad ljusstyrka.
- 3 Tryck på **OK**.

## 11.5 Ställa in volymen

Enhetens allmänna ljudvolym bestämmer talets volym och även systemljudens volym (ljuden vid skärmtryckningar).

- 1 Öppna **Extra > Alternativ**.
- 2 Slutför en av följande åtgärder i dialogrutan **Alternativ**:
  - dra skjutreglaget till vänster om du vill sänka volymen
  - dra skjutreglaget till höger om du vill höja volymen
- 3 Tryck på **OK**.



*Det går även att ställa in volymen i Tal.*

## 11.6 Roter skärmen

Bildskärmen går att visa både stående och liggande.

- 1 Öppna **Extra > Roter vy**.
- 2 Roter skärmen genom att upprepa steg 1.

## 11.7 Ställa in avstängningstiden för Smart

Smart går att stänga av automatiskt.

Det går till exempel att ange att Smart stänger av automatiskt efter fem timmar i standbyläge.

- 1 Öppna **Extra > Smart3 > Inställninga**.
- 2 Välj något av följande alternativ i listrutan **Stäng av efter: (efter intaget Standbyläge)**:
  - **Aldrig**
  - **5 timmar**
  - **10 timmar**
  - **20 timmar**
  - **25 timmar**
- 3 Tryck på **OK**.

## 11.8 Dölja menyfältet

Förhindra att enhetens användaren gör ändringar genom att dölja menyfältet.

- 1 Öppna **Extra > Dölj meny**

SE ÄVEN:

"Återställa menyfältet" på sidan 39

## 11.9 Återställa menyfältet

Menyfältet måste vara tillgängligt om du vill utföra justeringar på enheten. Om menyfältet inte är tillgängligt måste du återställa det.

Återställ menyfältet så här:

- 1 Tryck på återställningsknappen med en kulspetspenna.
- 2 Om du behöver ett lösenord för att visa menyfältet öppnas dialogrutan **Lösenord**. Ange lösenordet och klicka på **OK**.  
Menyfältet visas längst ned.

SE ÄVEN:

"Dölja menyfältet" på sidan 39

## 11.10 Ställa in startalternativen

Det går att ställa in läget som Mind Express startar i, om menyn visas eller om åtkomst till menyn är lösenordsskyddad och vilka dokument som visas vid start.



Se *Mind Express bruksanvisning* om att ställa in startalternativen.

## 11.11 Ställa in inspelningen



*Se Mind Express bruksanvisning om inställning av inspelningen.*



## 12 Ställa Smart i standbyläge

Standbyläge innebär att Smart inte är helt avstängd och startar snabbt igen.



*Ställ enheten i standbyläge om du inte använder enheten under en kortare tidsperiod. Enheten drar mindre ström än om den fortfarande är på. Stäng av enheten om du inte använder den under en längre tidsperiod.*

Utför någon av följande aktiviteter:

- Öppna **Extra > Smart3 > Gå i Standbyläge**.
- Tryck på strömbrytaren.

SE ÄVEN:

"Aktivera Smart" på sidan 29

## 13 Stänga av Smart

Förvara Smart avstängd med fullt laddat batteri om du inte tänker använda Smart under en längre tidsperiod.

Utför någon av följande aktiviteter:

- Öppna **Extra > Smart3 > Stäng av**.
- Tryck på och håll ned strömbrytaren i minst fyra sekunder.

SE ÄVEN:

"Aktivera Smart" på sidan 29



## D Specifika inställningar, säkerhetskopiering och lagringsutrymme

## 1 Justera användarspecifika inställningar

### 1.1 Välja

Det finns ett stort antal inställningar för anpassning av valen så att de uppfyller användarens krav. En markering går att visa i en viss färg, den går att förstora, det går att markera med tryck eller släpp, det går att ställa in väntetid, det är även möjligt att spela upp ett ljud efter markering och visa en hörbar feedback på en markering.



*Se Mind Express bruksanvisning om inställning av markeringar.*

### 1.2 Uttalslexikon, menings- och ordprediktion

#### 1.2.1 Uttalslexikon

Det är möjligt att en del ord inte uttalas rätt. Till exempel namn eller ord på ett annat språk. Det går att lägga till ordet med sitt nya uttal till ett uttalslexikon. Det går att lägga till flera uttalslexikon:

- uttalslexikon per språk
- uttalslexikon per användare, om enheten används av flera personer
- uttalslexikon per röst Det fonetiska formatet varierar för varje röst.



*Se Mind Express bruksanvisning om hur uttalslexikonet används.*



*Inställningar i uttalslexikonet måste göras direkt i Smart. Det går inte att importera ett uttalslexikon.*

### 1.2.2 Prediktion av ord

Om användaren kan använda text, kan prediktion av ord öka kommunikationshastigheten betydligt. Det går att ställa in Mind Express på ett sådant sätt att prediktionen visas i rutorna. Det gör att användaren kan välja prediktioner och skriva ord eller meningar mycket snabbare. När användaren väljer en bokstav eller ett ord i kommunikationskortet visas prediktionen i prediktionscellerna.

Prediktion av ord är kontextbaserad. Det innebär att prediktion av ord inte endast försöker förutsäga ordet som skrivs, utan även nästa ord.



*Se Mind Express bruksanvisning om att använda prediktion av ord.*



*Inställningar i prediktion av ord måste göras direkt i Smart. En lista med prediktion av ord går inte att importera.*

### 1.2.3 Prediktion av mening

Om användaren kan använda text, kan prediktion av mening öka kommunikationshastigheten betydligt. Det går att ställa in Mind Express på ett sådant sätt att prediktionen visas i rutorna. Det gör att användaren kan välja prediktionerna. När användaren väljer en bokstav eller ett ord i kommunikationskortet visas prediktionen i prediktionscellerna i Mind Express. Prediktion av mening söker efter meningar. Om du skriver in ordet "te" visar prediktion av mening t.ex. meningar som "en kopp te".



*När du använder Mind Express första gången är prediktion av mening tomt.*



*Se Mind Express bruksanvisning om att använda prediktion av mening.*




*Inställningar i prediktion av mening måste göras direkt i Smart. En lista med prediktion av meningar går inte att importera.*

## 2 Säkerhetskopiering och lagringsutrymme

### 2.1 Säkerhetskopiera Smart

En säkerhetskopiera av innehållet i Smart går att göra på ett USB-minne. I händelse av problem med Smart går det att återställa säkerhetskopieringen från USB-minnet till Smart

- 1 Anslut USB-minnet till Smart.
- 2 Öppna **Extra > Smart3 > Kopiera disken till USB**.
- 3 Tryck i fältet **Ange namn**.
- 4 Tryck på  nere till höger för att aktivera indatapanelen på skärmen.
- 5 Tryck en gång till i fältet **Ange namn**.
- 6 Ange säkerhetskopieringsnamn med indatapanelen på skärmen.  
*EXEMPEL: säkerhetskopiera juni*
- 7 Tryck på **OK**.
- 8 Tryck på **Ja** i dialogrutan **Kopiera disken till USB**.  
Säkerhetskopieringen startar. Det kan ta några minuter tills dialogrutan **Backup till USB-minne har utförts** öppnas.
- 9 Tryck på **OK**.

SE ÄVEN:

"Återställa säkerhetskopiering till Smart" på sidan 47

## 2.2 Återställa säkerhetskopiering till Smart

I händelse av problem med Smart går det att återställa säkerhetskopian från USB-minnet till Smart

- 1 Anslut USB-minnet till Smart med den medföljande USB-kabeln.
- 2 För in spetsen på en kulspetspenna i återställningsöppningen och tryck in i minst fem sekunder.
- 3 Tryck på strömbrytaren.  
Dialogrutan **Restore Files** öppnas.
- 4 Tryck på **Ja** för att återställa en säkerhetskopia.
- 5 Välj säkerhetskopian som du vill ändra.
- 6 Välj vid behov först alternativet **Format drive first, then restore** om en tidigare säkerhetskopiering utan det här alternativet markerat inte fick avsett resultat.
- 7 Tryck på **OK**.

SE ÄVEN:

"Säkerhetskopiera Smart" på sidan 46

## 2.3 Rensa minnet i Smart

Om du skapar flera ljudinspelningar i samma ruta, sparas ljudfilerna som inte används fortfarande i minnet på Smart. Det här innebär att lagringsutrymmet i Smart kan ta slut.

- 1 Öppna **Extra > Smart3 > Rensa disken**.
- 2 Tryck på **Rensa**.
- 3 Tryck på **Ja**  
Minnet rensas. Det går att visa hur mycket ledigt lagringsutrymme som finns i dialogrutan **Rensa disken**.
- 4 Tryck på **OK**.

SE ÄVEN:

"Ta bort en fil från Smart" på sidan 48



- D Specifika inställningar, säkerhetskopiering och lagringsutrymme
- 2 Säkerhetskopiering och lagringsutrymme

## 2.4 Ta bort en fil från Smart

Dokument, mallar, bilder, ljud och musik går att ta bort från minnet i Smart.

- 1 Öppna **Extra > Smart3 > Rensa disken**.
- 2 Tryck på **Filhanterare**.
- 3 Välj ett av följande alternativ på listrutan **Filtyp**.
  - **Dokument**
  - **Mallar**
  - **Bilder**
  - **Ljud**
  - **Musik**
- 4 Välj **Mapp**, vid behov en mapp eller undermapp.
- 5 Välj filerna som du vill ta bort.



Tryck vid behov på  om du vill sortera filerna i bokstavsordning eller tryck på  om du vill sortera filerna efter storlek (från mindre till större).

- 6 Tryck på **Radera filer**.
- 7 Tryck på **Ja** i dialogrutan **Radera fil**.
- 8 Tryck på **Stäng**.
- 9 Tryck på **OK**.

SE ÄVEN:

"Rensa minnet i Smart" på sidan 47




# E Spela in ett meddelande

## 1 Spela in ett meddelande




Det går att spela in ett talat meddelande på enheten eller spela in ett ljud och spara det i en ruta. Det går att spela in i Inspelningsläge, Musläge och i Redigeringsläge.

## 2 Spela in ett meddelande i inspelningsläge

- 1 Öppna **Redigera > Inspelningsläge**.
- 2 Tryck på rutan där du vill lägga till meddelandet.  
Dialogrutan **Spelar in** öppnas.
- 3 Tryck på och håll ned knappen  under hela inspelningen.




*Tala med normal röst och styrka under inspelningen. Håll ett avstånd på ungefär 30 cm från enheten.*

- 4 Släpp knappen om du vill avsluta inspelningen.
- 5 Tryck på  om du vill lyssna på inspelningen. Upprepa från steg 3 om du inte är nöjd med inspelningen.
- 6 Utför någon av följande aktiviteter:
  - Tryck på  om du vill spara inspelningen i vald ruta.
  - Tryck på  om du vill ta bort inspelningen.

SE ÄVEN:




"Spela in ett meddelande i musläge" på sidan 51

### 3 Spela in ett meddelande i musläge

- 1 Kontrollera att inspelningen är inställd på **Snabbinspelning**. Öppna **Extra > Alternativ**.
- 2 Tryck på och håll ned rutan där du vill lägga till meddelandet tills dialogrutan **Spelar in** öppnas. Tiden du måste trycka på och hålla ned rutan anges i alternativet.
- 3 Tryck på och håll ned knappen  under hela inspelningen.



*Tala med normal röst och styrka under inspelningen. Håll ett avstånd på ungefär 30 cm från enheten.*

- 4 Släpp knappen om du vill avsluta inspelningen.
- 5 Tryck på  om du vill lyssna på inspelningen. Upprepa från steg 3 om du inte är nöjd med inspelningen.
- 6 Utför någon av följande aktiviteter:
  - Tryck på  om du vill spara inspelningen i vald ruta.
  - Tryck på  om du vill ta bort inspelningen.

#### SE ÄVEN:



"Spela in ett meddelande i inspelningsläge" på sidan 50

## 4 Ta bort ett meddelande från Smart

En ljudinspelning som har gjorts med Smart går att ta bort från minnet i Smart.

- 1 Öppna **Extra > Smart3 > Rensa disken**.
- 2 Tryck på **Filhanterare**.
- 3 Välj **Ljud** i listrutan **Filtyp**.
- 4 Välj **Rec** i listrutan **Mapp**.
- 5 Välj filerna som du vill ta bort.



Tryck vid behov på  om du vill sortera filerna i bokstavordning eller tryck på  om du vill sortera filerna efter storlek (från mindre till större).

- 6 Tryck på **Radera filer**.
- 7 Tryck på **Ja** i dialogrutan **Radera fil**.
- 8 Tryck på **Stäng**.
- 9 Tryck på **OK**.



# F Kameran

## 1 Kameran

Smart är utrustad med en kamera. Det går att ta bilder med kameran men det går inte att filma. Bilderna sparas automatiskt och går att använda i kommunikationsrutnätet.

## 2 Ta en bild

Smart gör det möjligt att ta bilder om det finns en ruta i kommunikationsrutnätet som inkluderar åtgärden **Ta ett foto**.

- 1 Tryck på rutan i kommunikationsrutnätet.
- 2 Rikta kameraobjektivet mot motivet och vänta tills bilden är skarp.
- 3 Tryck på  för att ta en bild.
- 4 Upprepa steg 4 om du vill ta fler bilder.
- 5 Tryck på  om du vill återvända till kommunikationsrutnätet.






*Visa bilderna med rutorna Föregående bild, Nästa bild. Tryck på rutan Radera bild om du vill ta bort en bild.*


## 3 Ta en bild att infoga i en ruta

Det går att infoga en bild som du har tagit med enheten i en ruta i kommunikationsrutnätet.

- 1 Öppna filen med kommunikationsrutnätet om du vill infoga bilden du har tagit i en eller flera rutor.
- 2 Öppna **Redigera > Fotografi läge**.
- 3 Tryck på rutan i kommunikationsrutnätet.
- 4 Rikta kameraobjektivet mot motivet och vänta tills bilden är skarp.

- 5 Tryck på  för att ta en bild.
- 6 Kontrollera bilden du har tagit och slutför en av följande åtgärder:
  - Tryck på  om du vill spara bilden på enheten.
  - Tryck på  om du vill ta bort bilden från enheten.



Återvänd till kommunikationsrutnätet utan av använda en bild genom att trycka på .

## 4 Visa en bild

- 1 Öppna **Fil > Öppna**.
- 2 Öppna ett kommunikationsrutnät avsett för att visa bilder.
- 3 Visa bilderna.



Tryck på rutorna **Föregående bild**, **Nästa bild** för att visa bilderna du har tagit. Tryck på rutan **Radera bild** om du vill ta bort en bild.

## 5 Ta bort en bild



- 1 Öppna **Fil > Öppna**.
- 2 Öppna ett kommunikationsrutnät avsett för att visa bilder.
- 3 Tryck på rutorna **Föregående bild** och/eller **Nästa bild** tills du ser bilderna du vill ta bort.
- 4 Tryck på rutan **Radera bild**.

## 6 Ta bort en bild (genom att rensa disken)

Det går att ta bort en bild du har tagit från minnet i Smart med Smart. Bilder tagna av användaren med ett kommunikationsrutnät (till exempel med den medföljande standardfilen *app\_kamera\_smart*) sparas i mappen **Smart3Camera**. Bilder tagna av handledaren för att fylla rutorna i kommunikationsrutnätet sparas i mappen **Smart3Pictures**.

- 1 Öppna **Extra > Smart3 > Rensa disken**.
- 2 Tryck på **Filhanterare**.
- 3 Välj **Bilder** i listrutan **Filtyp**.
- 4 Välj mappen **Smart3Camera** eller **Smart3Pictures** i listrutan **Mapp**.
- 5 Välj filerna som du vill ta bort.



Tryck vid behov på  om du vill sortera filerna i bokstavsordning eller tryck på  om du vill sortera filerna efter storlek (från mindre till större).

- 6 Tryck på **Radera filer**.



Om du tar bort en bild som används i ett kommunikationsrutnät, visas den bilden inte längre i kommunikationsrutnätet.

- 7 Tryck på **Ja** i dialogrutan **Radera fil**.
- 8 Tryck på **Stäng**.
- 9 Tryck på **OK**.



# G Personliga program

## 1 Agendan

Den här enheten gör det möjligt att ordna dina möten i din agenda. Det går även att lägga till larm med agendan. För att till exempel påminna dig om vänners och familjemedlemmars födelsedagar.

### 1.1 Visa agendan

- 1 Öppna **Extra > Agenda > Ändra agenda**.
- 2 Välj ett av följande alternativ i listrutan **Visa**:
  - **En dag**
  - **Vecka**
  - **Månad**
- 3 Välj datumet du vill visa i den andra listrutan.
- 4 Tryck på **OK**.

## 1.2 Lägga till larm

- 1 Öppna **Extra > Agenda > Lägg till alarm**.
- 2 Välj att upprepa larmet i listrutan **När**:
  - **En gång**
  - **Varje dag**
  - **Varje arbetsdag**
  - **Varje vecka**
  - **Varje månad**
  - **Varje år**
- 3 Ange tiden till larmet i fältet **Vid**. Använd pilarna.
- 4 Utför någon av följande aktiviteter:
  - Tryck på  för ett icke-upprepande larm i fältet nedan och välj datum för larmet.
  - Upprepa larmet genom att trycka på  i **Startdatum** och välja datum när larmet startar och trycka på  i **Slutdatum** och välja datum när larmet slutar.
- 5 Ange texten till larmet i fältet **Meddelande**.
- 6 Välj alternativet **Tal** om du vill att meddelandet läses upp.
- 7 Välj alternativet **Visa meddelande** om du vill visa meddelandet på enheten.
- 8 Lägg till ett ljud till larmet genom att trycka på  intill **Ljud**, välj ett ljud och tryck på **Öppna**.
- 9 Tryck på **Spara**.


## 1.3 Ändra ett larm

- 1 Öppna **Extra > Agenda > Ändra agenda**.
- 2 Välj larmet som du vill ta ändra.
- 3 Tryck på **Redigera**.
- 4 Ändra vid behov larmets upprepningsintervall i listrutan **När**:
  - **En gång**
  - **Varje dag**
  - **Varje arbetsdag**
  - **Varje vecka**
  - **Varje månad**
  - **Varje år**
- 5 Ändra vid behov larmets upprepningstid i listrutan **Vid**: Använd pilarna.
- 6 Utför någon av följande aktiviteter:
  - Tryck på  för ett icke-upprepande larm i fältet nedan och välj datum för larmet.
  - Upprepa larmet genom att trycka på  i **Startdatum** och välj datum när larmet startar och trycka på  i **Slutdatum** och välj datum när larmet slutar.
- 7 Ändra vid behov larmets text i listrutan **Meddelande**:
- 8 Välj alternativet **Tal** om du vill att meddelandet läses upp eller inte alls.
- 9 Välj alternativet **Visa meddelande** om du vill visa meddelandet på enheten eller inte alls.
- 10 Lägg till ett ljud till larmet genom att trycka på  intill **Ljud**, välj ett ljud och tryck på **Öppna**.
- 11 Tryck på **Spara**.
- 12 Tryck på **OK**.

## 1.4 Ta bort ett larm


- 1 Öppna **Extra > Agenda > Ändra agenda**.
- 2 Välj larmet som du vill ta bort.
- 3 Tryck på **Redigera**.
- 4 Tryck på **Radera** i dialogrutan **Alarmredigerare**.
- 5 Tryck på **OK**.

## 1.5 Lägga till en aktivitet

- 1 Öppna **Extra > Agenda > Ändra agenda**.
- 2 Tryck på **Lägg till**.
- 3 Ange namnet på aktiviteten eller mötet i fältet **Aktivitet**.
- 4 Klicka på  intill fältet **Bild**: om du vill lägga till en bild för aktiviteten.
- 5 Använd listrutorna i dialogrutan **Symbol** till att söka efter bilden, välj bilden och tryck på **OK**.
- 6 Välj att upprepa aktiviteten i listrutan **När**.
  - **En gång**
  - **Varje dag**
  - **Varje arbetsdag**
  - **Varje vecka**
  - **Varje månad**
  - **Varje år**

- 7 Välj något av följande alternativ i fältet **Varaktighet**.
  - **Heldag**
  - **Från Till**
- 8 Om du har valt alternativet **Från Till**, ange aktivitetens start- och sluttid i fälten **Från** och **Till**. Tryck på timma och ställ in timmen med pilarna. Tryck på minut och ställ in minuten med pilarna.
- 9 Välj vid behov alternativet **Alarm** om du vill få en påminnelse när aktiviteten startar eller innan aktiviteten startar.
- 10 Välj ett av följande alternativ i listrutan **Alarm**:
  - **När den startar**
  - **5 minuter innan start**
  - **15 minuter innan start**
  - **30 minuter innan start**
  - **1 timme innan start**
  - **2 timmar innan start**
  - **1 dag innan start**
- 11 Ställ in larmet genom att trycka på .
- 12 Ange texten till larmet i fältet **Meddelande**.
- 13 Välj alternativet **Tal** om du vill att meddelandet läses upp.
- 14 Välj alternativet **Visa meddelande** om du vill visa meddelandet på enheten.
- 15 Lägg till ett ljud till larmet genom att trycka på  intill **Ljud**, välj ett ljud och tryck på **Öppna**.
- 16 Tryck på **OK**.
- 17 Tryck på **Spara**.
- 18 Tryck på **OK**.

## 1.6 Ändra en aktivitet

- 1 Öppna **Extra > Agenda > Ändra agenda**.
- 2 Välj aktiviteten du vill ändra.
- 3 Tryck på **Redigera**.
- 4 Ange vid behov namnet på aktiviteten eller mötet i fältet **Aktivitet**.
- 5 Klicka på  intill fältet **Bild** om du vill lägga till eller ändra aktivitetens bild.
- 6 Använd listrutorna i dialogrutan **Symbol** till att söka efter bilden, välj bilden och tryck på **OK**.
- 7 Ändra vid behov aktivitetens upprepning i listrutan **När**.
  - **En gång**
  - **Varje dag**
  - **Varje arbetsdag**
  - **Varje vecka**
  - **Varje månad**
  - **Varje år**
- 8 Ändra vid behov någon av följande alternativ i fältet **Varaktighet**.
  - **Heldag**
  - **Från Till**
- 9 Om du har valt alternativet **Från Till**, ange aktivitetens start- och sluttid i fälten **Från** och **Till**. Tryck på timma och ställ in timmen med pilarna. Tryck på minut och ställ in minuten med pilarna.
- 10 Välj vid behov alternativet **Alarm** om du vill få en påminnelse när aktiviteten startar eller innan aktiviteten startar.

- 11** Välj ett av följande alternativ i listrutan **Alarm**:
- **När den startar**
  - **5 minuter innan start**
  - **15 minuter innan start**
  - **30 minuter innan start**
  - **1 timme innan start**
  - **2 timmar innan start**
  - **1 dag innan start**
- 12** Ställ in larmet genom att trycka på .
- 13** Ange texten till larmet i fältet **Meddelande**.
- 14** Välj alternativet **Tal** om du vill att meddelandet läses upp.
- 15** Välj alternativet **Visa meddelande** om du vill visa meddelandet på enheten.
- 16** Lägg till ett ljud till larmet genom att trycka på  intill **Ljud**, välj ett ljud och tryck på **Öppna**.
- 17** Tryck på **OK**.
- 18** Tryck på **Spara**.
- 19** Tryck på **OK**.




## 1.7 Ta bort en aktivitet

- 1 Öppna **Extra > Agenda > Ändra agenda**.
- 2 Välj aktiviteten som du vill ta bort.
- 3 Tryck på **Redigera**.
- 4 Tryck på **Radera**.
- 5 Tryck på **OK**.

## 1.8 Ställa in bakgrunden på agenda



Det går att ställa in en anpassad bakgrund för varje månad på ett kommunikationsrutnät med agendarutor.

- 1 Öppna ett kommunikationsrutnät med agendarutor.
- 2 Öppna **Extra > Agenda > Anpassa bakgrund**.
- 3 Tryck på  intill månaden vars bakgrund du vill anpassa.
- 4 Använd listrutorna i dialogrutan **Symbol** till att söka efter bilden, välj bilden och tryck på **OK**.
- 5 Upprepa steg 2 för övriga månader.
- 6 Tryck på **OK**.
- 7 Utför någon av följande åtgärder för att spara ändringarna i kommunikationsrutnätet:
  - Välj **Fil > Spara**.
  - Tryck på **Ctrl + S**.



## 2 Adressboken

Enheten kan spara alla namn och telefonnummer till dina vänner och kontakter i adressboken. Adressboken går att använda i kommunikationsruknätet, till exempel till att ringa en kontakt.

### 2.1 Lägga till en kontakt


- 1 Öppna **Extra > Adressbok**.
- 2 Tryck på **Lägg till kontakt** .
- 3 Tryck på  om du vill lägga till en bild till kontakten.
- 4 Använd listrutorna i dialogrutan **Symbol** till att söka efter bilden, välj bilden och tryck på **OK**.
- 5 Tryck på fältet **Ange namn** och ange kontaktens namn. Det här är ett obligatoriskt fält.
- 6 Tryck på fältet **Telefon** och ange kontaktens telefonnummer.
- 7 Tryck på **OK**.

### 2.2 Redigera en kontakt

- 1 Öppna **Extra > Adressbok**.
- 2 Tryck på **Redigera kontakt** .
- 3 Tryck på  om du vill lägga till en (annan) bild till kontakten.
- 4 Använd listrutorna i dialogrutan **Symbol** till att söka efter bilden, välj bilden och tryck på **OK**.
- 5 Tryck på fältet **Ange namn** och ändra kontaktens namn. Det här är ett obligatoriskt fält.

- 6 Tryck på fältet **Telefon** och ändra kontaktens telefonnummer.
- 7 Tryck på **OK**.

## 2.3 Radera en kontakt

- 1 Öppna **Extra > Adressbok**.
- 2 Välj kontakten som du vill ta bort.
- 3 Tryck på **Radera kontakt** .
- 4 Tryck på **OK**.



# H Anslutning till Eddy

## 1 Vad är Eddy?

Eddy är en liten bärbar bildskärm med en inbyggd högtalare. Det går att ansluta Smart och Eddy med Bluetooth. Det går att välja att överföra text och/eller ljud. Texten visas på en, två eller tre textrader beroende på inställningarna.



**Figur 1:** Eddy

SE ÄVEN:

"Ställa in Eddy" på sidan 71

## 2 Bluetooth

Bluetooth är en trådlös kommunikationsteknologi som fungerar på korta avstånd. Bluetooth kräver ingen fysisk anslutning. Det går att överföra data inom ca. 10 meter. Bluetooth kräver inte att enheterna riktas mot varandra. Det går att överföra data om enheterna är inom varandras räckhåll, även om de befinner sig i olika rum.

Det går att ansluta med bluetooth till andra Bluetooth-enheter med Smart. Till exempel Eddy eller en mobiltelefon.



*Det kan hända att en del enheter inte är kompatibla med din enhet.*



*Föremål mellan enheterna kan minska avståndet över vilket enheterna kan kommunicera.*

## 3 Ställa in Eddy

- 1 Öppna **Extra > Eddy > Inställninga**.
- 2 Välj vid behov följande alternativ:


<b>Anslut automatiskt när Mind Express startar</b>	Om valt försöker enheten ansluta automatiskt till Eddy.
<b>Skicka Audio</b>	Om valt skickas ljudet endast genom högtalarna i Eddy.
<b>Skicka Text</b>	Om valt visas texten på Eddy.
<b>Skriv med versaler</b>	Om valt visas texten på Eddy med stora bokstäver.
<b>Antal rader på skärmen</b>	Välj hur i listrutan många textrader (1, 2 eller 3) som visas på skärmen på Eddy.

- 3 Tryck på **OK**.


SE ÄVEN:

"Vad är Eddy?" på sidan 70

## 4 Söka efter Eddy

- 1 Öppna **Extra > Eddy > Anslut**.
- 2 Tryck på **Sök** .  
Eddy-enheten som har hittats visas i listrutan.
- 3 Utför någon av följande aktiviteter:
  - Tryck på **OK**.
  - Anslut till Eddy.

## 5 Ansluta till Eddy

- 1 Öppna **Extra > Eddy > Anslut**.
- 2 Tryck på **Anslut** .  
Dialogrutan **Eddy** öppnas med meddelandet **Ansluten till Eddy**.
- 3 Tryck på **OK**.
- 4 Tryck på **OK**.

SE ÄVEN:

"Koppla från Eddy" på sidan 72

## 6 Koppla från Eddy

Öppna **Extra > Eddy > Koppla ifrån**.

Bortkopplad från Eddy

SE ÄVEN:

"Ansluta till Eddy" på sidan 72



# I Ansluta till datorn och USB-anslutningar

## 1 Anslutning till datorn

Anslut till en dator med den medföljande USB-kabeln. Genom att ansluta enheten till en dator går det att överföra data till och från enheten med Mind Express.

## 2 Ansluta enheten till datorn

Anslut den medföljande USB-kabeln mellan enheten och datorn.

Dialogrutan **Windows Mobile Device Center** öppnas på datorn.

SE ÄVEN:

"Koppla bort enheten från datorn" på sidan 74

## 3 Koppla bort enheten från datorn

Undvik att förlora data på enheten och att skada enhetens minne genom att följa proceduren nedan när du kopplar bort enheten från datorn.

- 1 Tryck på USB-ikonen i Windows meddelandefält.
- 2 Tryck på alternativet att ta bort enheten säkert.
- 3 Ta bort USB-kabeln mellan enheten och datorn.

SE ÄVEN:

"Ansluta enheten till datorn" på sidan 74

---

## 4 Ansluta till en extern Input Panel

- 1 Anslut den externa indatapanelen till Smart med den medföljande USB-kabeln.
- 2 Öppna **Extra > Smart3 > Inställninga**.
- 3 Välj den anslutna indatapanelens layout i listrutan **Tangentbord USB**.
- 4 Tryck på **OK**.

## 5 Ansluta en extern mus

Anslut den externa musen till Smart med den medföljande USB-kabeln.

## 6 Ansluta ett USB-minne

Det går att skapa en säkerhetskopia av Smart på ett USB-minne.

Anslut USB-minnet till Smart med den medföljande kabeln.



# J Ringa upp

## 1 Telefon

Det går att ansluta Smart med en mobiltelefon. När anslutningen har upprättats går det att ringa med Smart till ett telefonnummer du anger eller till personer i adressboken (till exempel med filen *app\_telefon\_smart*).

## 2 Aktivera Bluetooth

Om du vill skapa en anslutning mellan mobiltelefonen och Smart måste du aktivera Bluetooth på båda enheterna.

Öppna **Extra > Telefon > Aktivera bluetooth**.

Ett ljud hörs när Bluetooth aktiveras.

## 3 Ställa in Smart telefonalternativ

Det går att ändra Bluetooth-namnet för Smart och det går att aktivera Bluetooth automatiskt när Smart startar. Det går även att visualisera händelser. Till exempel när Bluetooth aktiveras eller när du blir uppringd...

- 1 Öppna **Extra > Telefon > Inställninga**.
- 2 Ändra vid behov Bluetooth-namnet för Smart i listrutan **Bluetooth namn**:  
Det här namnet visas på listan med parkopplade enheten på din mobiltelefon.
- 3 Välj vid behov alternativet **Anslut vid start** för att aktivera Bluetooth när Smart startar.
- 4 Välj vid behov alternativet **Visa ytterligare info** för att förklara vissa händelser på skärmen.

*EXEMPEL:* Aktivera Bluetooth.

- 5 Välj alternativet **Avisera inkommande samtal**.  
Ett meddelande visas när du blir uppringd på Smart.
- 6 Tryck på **OK**.

## 4 Ansluta telefonen till Smart

Anslutningen mellan en mobiltelefon och Smart beror på mobiltelefonens märke och typ. Den allmänna proceduren beskrivs nedan.



*Se mobiltelefonens bruksanvisning.*

- 1 Aktivera Bluetooth på Smart.
- 2 Aktivera Bluetooth på mobiltelefonen och låt telefonen söka efter tillgängliga enheter.
- 3 Sök efter Bluetooth-namnet på Smart på listan med enheter och parkoppla.
- 4 Ange PIN-koden till Smart. Standardkoden är 1111.  
Om anslutningen lyckas går det att ringa, svara och avsluta samtal med Smart.

## 5 Ringa ett telefonnummer

Det går att ringa upp ett telefonnummer med Smart.



*Det går att ringa upp personer från adressboken med filen `app_telefon_smart`.*

- 1 Öppna **Extra > Telefon > Ring upp**.
- 2 Ange telefonnumret (endast siffror) i dialogrutan **Sända Till ...**
- 3 Tryck på **OK**.

## 6 Svara i telefonen

Det går även att svara med Smart.



*Det går även att svara med filen `app_telefon_smart`.*

Öppna **Extra > Telefon > Besvara samtal**.



## 7 Lägga på

Lägg på med Smart.



*Det går även att lägga på med filen `app_telefon_smart`.*

Öppna **Extra** > **Telefon** > **Lägg på**.



# K Miljökontroll

## 1 Miljökontroll

Smart har en infraröd mottagare och sändare. De gör det möjligt att styra enheter som TV, radio och dvd-spelare med infraröda koder i Smart. Smart kan lära sig att känna igen enheternas infraröda koder.

## 2 Hämta en infraröd kod

1 Öppna **Extra > Miljökontroll > Spela in.**

2 Välj en infraröd kod i dialogrutan **JabblalR**

3 Tryck på den infraröda kodens namn i fältet **Ange namn.**

*EXEMPEL: TV högre*

4 Håll enhetens fjärrkontroll (t.ex. TV:ns fjärrkontroll) omkring 5 cm från Smarts infraröda mottagare (5).

5 Tryck på **Spela in.**

Meddelandet **Tryck ner tangenten och håll kvar** visas i fältet **Rang.**

6 Tryck kort på fjärrkontrollens knapp (t.ex. knappen höj volym).

Meddelandet **OK** visas i fältet **Rang.** Upprepa från steg 5 om **Fel** visas.

7 Rikta Smart mot enheten om du vill testa den infraröda koden.



*Den infraröda signalen skickas med den infraröda sändaren (13) på Smarts baksida.*

8 Tryck på **Testa.**

Om den infraröda koden utför det begärda kommandot har testet lyckats. Om inte måste koden hämtas igen.

9 Upprepa från steg 2 för att hämta ytterligare infraröda koder.

10 Tryck på **OK.**

### 3 Skapa en säkerhetskopia av infraröda koder

Det går att skapa en säkerhetskopia av de infraröda koderna så att går att återställa vid eventuella problem. Det här är praktiskt om Smart används på olika platser. Hämta de infraröda koderna för plats A. Skapa en säkerhetskopia. Gör samma sak för plats B. Växla mellan de olika infraröda koderna beroende på plats genom att öppna **Återställ säkerhetskopia**.

- 1 Öppna **Extra > Miljökontroll > Säkerhetskopiering**.
- 2 Tryck på säkerhetskopieringens namn i fältet **Ange namn**.  
*EXEMPEL:* Hem
- 3 Tryck på **OK**.
- 4 Tryck på **Ja** i dialogrutan **Säkerhetskopiering**  
Säkerhetskopian skapas.

SE ÄVEN:

"Återställa säkerhetskopia av infraröda koder" på sidan 86

## 4 Återställa säkerhetskopia av infraröda koder

Det går att skapa en säkerhetskopia av de infraröda koderna så att går att återställa vid eventuella problem. Det här är praktiskt om Smart används på olika platser. Hämta de infraröda koderna för plats A. Skapa en säkerhetskopia. Gör samma sak för plats B. Växla mellan de olika infraröda koderna beroende på plats genom att öppna Återställ säkerhetskopia.

- 1 Öppna **Extra > Miljökontroll > Återställ säkerhetskopia**.
- 2 Tryck på namnet på säkerhetskopian du vill återställa på listan **Välj säkerhetskopia**:



*Återställning av en säkerhetskopia kan ta några minuter.*

- 3 Tryck på **OK**.  
Säkerhetskopian återställs.

### SE ÄVEN:

"Skapa en säkerhetskopia av infraröda koder" på sidan 85

# L Kommunikation

## 1 Kommunikation

Mind Express 4 har installerats på Smart.

Mind Express är ett datorprogram som är enkelt att använda och innehåller allt en talpedagog behöver för att skapa nya kommunikationsrutnät och övningar. Ett stort antal symboler, bilder, text till tal-meddelanden, musik och ljud går att använda till att skapa intressanta och stimulerande kommunikationsrutnät.

Tack vare Mind Express går det att skapa röstmeddelanden genom att välja bilder och/eller symboler. Mind Express har även en inbyggd grammatikmodul som bland annat automatiskt böjer verb.

Det finns även ett stort antal olika symboler och ikoner. De går att använda till att skapa kommunikationskort, spel, övningar och annat. Det går även att lägga till sina egna teckningar, foton eller nya symboler.



*Det går att skapa och redigera dokument på Smart. Det är dock enklare att skapa ett dokument på datorn och sedan vidarebefordra det till Smart med en USB-anslutning.*



*Skapa eller redigera dokument på datorn genom att följa anvisningarna i Mind Express bruksanvisning.*

## 2 Lägga till viss Smart-åtgärd

Förutom standardåtgärderna i Mind Express, går det även att tilldela vissa åtgärder i Smart till rutor i din

- Eddy
- Miljökontroll
- Roterar vy
- Smart 3 Camera
- Smart3



### 3 Lägga till Eddy-åtgärd

Om du lägger till en av Eddy-åtgärderna till en ruta i kommunikationsrutnätet, går det att ansluta eller koppla från Eddy, aktivera eller inaktivera texten, slå på eller av ljudet och höja eller sänka volymen genom att välja den rutan.

- 1 Öppna **Redigera** > **Redigeringsläge**.
- 2 Dubbeltryck på rutan där du vill infoga en åtgärd.
- 3 Öppna **Eddy** i åtgärdsgruppen **Åtgärder**.
- 4 Välj ett av följande alternativ i listrutan **Åtgärder** > **Eddy**:

<b>(Åter)anslut</b>	Ansluter till Eddy.
<b>Koppla ifrån</b>	Koppla ifrån Eddy.
<b>Rensa text</b>	Rensar texten i Eddy.
<b>Ljud: på</b>	Aktiverar ljudet i Eddy.
<b>Ljud: av</b>	Stänger av ljudet i Eddy.
<b>Ljud: växla</b>	Växlar ljudstatus i Eddy. Om ljudet är på, stängs det av med den här åtgärden. Om ljudet är av, sätts det på med den här åtgärden.
<b>Text: på</b>	Aktiverar texten i Eddy.
<b>Text: av</b>	Stänger av texten i Eddy.
<b>Text: växla</b>	Växlar textstatus i Eddy. Om texten är på, stängs den av med den här åtgärden. Om texten är av, sätts den på med den här åtgärden.
<b>Volym: upp</b>	Höjer volymen på Eddy.
<b>Volym: ner</b>	Sänker volymen på Eddy.

## 4 Lägga till en miljökontrollåtgärd

Om du lägger till en **Miljökontroll** till en ruta i kommunikationsrutnätet, går det sedan att styra en enhet i miljön.

- 1 Öppna **Redigera > Redigeringsläge**.
- 2 Dubbeltryck på rutan där du vill infoga en åtgärd.
- 3 Öppna **Miljökontroll** i åtgärdsgruppen **Åtgärder**.
- 4 Välj ett av följande alternativ i listrutan **Åtgärder > Miljökontroll**:

<b>Paus</b>	Ändra vid behov antalet millisekunder pausen varar i fältet <b>Varaktighet</b> . Pausåtgärden används till att skapa tid mellan två miljökontrollåtgärder. Exempel: Om en enhet inte godkänner en snabb följd av signaler.
<b>IR1</b>	Det går att ange sitt eget användardefinierade namn för en viss miljökontrollåtgärd. Ändra vid behov antal gånger du vill att signalen skickas i fältet <b>Repetera</b> . Exempel: Om du vill öka volymen på enhet avsevärt utan att trycka på rutan tio gånger går det att ange <b>Repetera 10</b> .

## 5 Lägga till en Smart 3 Camera-åtgärd

Om du lägger till en av åtgärderna i **Smart 3 Camera** till en ruta i kommunikationsruånätet, går det att ta en bild, visa nästa eller föregående bild eller ta bort en bild genom att välja rutan.



Det går att visa bilderna om kommunikationsruånätet innehåller en ruta med typen Smart 3 Camera.

- 1 Öppna **Redigera > Redigeringsläge**.
- 2 Dubbeltryck på rutan där du vill infoga en kameraåtgärd.
- 3 Öppna **Smart 3 Camera** i åtgärdsgruppen **Åtgärder**.
- 4 Välj ett av följande alternativ i listrutan **Åtgärder > Smart 3 Camera**:

<b>Ta ett foto</b>	Gör det möjligt att ta en bild.
<b>Nästa bild</b>	Visar nästa bild i mediabiblioteket.
<b>Föregående bild</b>	Visar föregående bild i mediabiblioteket.
<b>Radera bild</b>	Den aktiva bilden tas bort från mediabiblioteket.

## 6 Lägga till en Smart3-åtgärd

Om du lägger till en av **Smart3**-åtgärderna i en ruta i kommunikationsrutnätet, går det att justera ljusstyrkan, ställa enheten i standby eller stänga av den eller stänga av mikrofonen genom att välja rutan.

- 1 Öppna **Redigera > Redigeringsläge**.
- 2 Dubbeltryck på rutan där du vill infoga en åtgärd.
- 3 Öppna **Smart3** i åtgärdsgruppen **Åtgärder**.
- 4 Välj ett av följande alternativ i listrutan **Åtgärder > Smart3**:

<b>Öka ljusstyrkan</b>	Ökar skärmens ljusstyrka.
<b>Minska ljusstyrkan</b>	Minskar skärmens ljusstyrka.
<b>Standbyläge</b>	Ställer enheten i standbyläge.
<b>Stäng av</b>	Stäng av enheten.
<b>Mikrofon på</b>	Aktiverar enhetens mikrofon.
<b>Mikrofon av</b>	Stänger av enhetens mikrofon.
<b>Mikrofon på/av</b>	Växlar mellan mikrofonlägena. Om mikrofonen är på, stängs den av med den här åtgärden. Om mikrofonen är av, aktiveras den av med den här åtgärden.

## 7 Lägga till åtgärd för rotera skärm

Om du lägger till en av åtgärderna **Rotera vy** till en ruta i kommunikationsrutnätet och sedan väljer den rutan går det att välja att antingen visa skärmorienteringen Stående eller Liggande eller så går det av växla mellan stående och liggande och vice versa.

- 1 Öppna **Redigera > Redigeringsläge**.
- 2 Dubbeltryck på rutan där du vill infoga en åtgärd.
- 3 Öppna **Rotera vy** i åtgärdsgruppen **Åtgärder**.
- 4 Välj ett av följande alternativ i listrutan **Åtgärder > Rotera vy**:

<b>Stående</b>	Skärmorienteringen Stående används.
<b>Liggande</b>	Skärmorienteringen Liggande används.
<b>Växla vy</b>	Skärmen roteras. Om skärmen är stående visas liggande skärm efter den här åtgärden. Om skärmen är liggande visas stående skärm efter den här åtgärden.



# M Felsökning

## 1 Hitta serienumret till Smart

När du kontaktar supportavdelningen ombeds du ge serienumret på Smart.

- 1 Placera Smart på ett sådant sätt att remmen är uppåt.
- 2 Utför någon av följande aktiviteter:

Enheten har ett skydd	Lossa remmens fäste och ta bort skyddshöljet för att visa etiketten med serienumret.
Enheten har inget skydd	Lossa remmens fäste och skjut remmen till ena sidan för att visa etiketten med serienumret.

## 2 Kontrollera Mind Express-versionen på Smart

- 1 Öppna **Fil > Licensinformation**.
- 2 Mind Express-versionen finns högst upp i dialogrutan **Mind Express**. Till exempel 4.2.3.1267.



### 3 Visa de aktiverade symbolbiblioteken

- 1 Öppna **Fil > Licensinformation**.
- 2 Visa symbolbiblioteken på listan. Visa vid behov hela listan med den lodräta rullningslistan.

Indikation	Förklaring
svart	installerad + licens
grå + *	inte installera eller inte tillgänglig på det valda språket
ljusgrå	installerad, men ingen licens



*Kontakta distributören där du köpte enhetens om du vill begära en licens för andra symbolbibliotek.*

## 4 Felsökning

Problem	Lösning
Pekskärmen är långsam eller fungerar inte ordentligt.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tryck på skärmen med en penna.</li><li>• Starta om enheten för att rätta till eventuella programvarufel.</li><li>• Kontrollera att den senaste programvaran är installerad.</li><li>• Kontakta distributörens supportavdelning om det finns repor eller skador på pekskärmen.</li></ul>
Enheten svarar inte.	Tryck på och håll ned återställningsknappen i fem sekunder. Enheten stänger av. Starta om enheten med startknappen.
Enheten är varm.	Under lång och intensiv användning kan enheten bli varm. Det är normalt och påverkar inte enhetens prestanda.
Det går inte att hitta Bluetooth-enheter.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på enheten du vill ansluta till.</li><li>• Kontrollera att din enhet och de andra enheten är inom det maximala avståndet på tio meter.</li><li>• Ta om nödvändigt bort föremål mellan enheterna.</li><li>• Det kan hända att enheten inte är kompatibel med din enhet.</li></ul>
Ingen anslutning mellan enheten och datorn.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera att kabeln mellan enheten och datorn är korrekt ansluten.</li><li>• Kontrollera att Windows Mobile Device Center är installerat på datorn.</li></ul>
Det går inte att slå på enheten. Strömindikatorn blinkar när enheten slås på.	Batteriet är inte tillräckligt laddat. Anslut nätadaptern och låt enheten ladda ett par minuter innan du slår på den igen.
Batteriet laddas inte ordentligt.	Kontakta distributörens supportavdelning om batteriet inte längre går att ladda fullt.

# N Bilagor

# 1 Acapela

**Tabell 1:** Konsonanter

Symbol	Transkription	Som i:
b	b i:4 l	bil
d	d A:4 l	dal
rd	b u:4 rd	bord
f	f i:4 l	fil
g	g o:4 s	gås
h	h A:4 l	hal
j	j A:4 g	jag
k	s k A:4 l	skal
k_h	k_h A:4 l	kal
l	l 2:4 s	lös
rl	k A:4 rl	karl
m	m i:4 l	mil
n	n o:4 l	nål
rn	b A:4 rn	barn
N	r l4 N	ring
p	s p l4 l	spill
p_h	p_h i:4 l	pil
r	r i:4 s	ris
s	s i:4 l	sil

Symbol	Transkription	Som i:
rs	fO4 rs	fors
S	S};4 k	sjuk
t	s t a4 l	stall
t_h	t_h A:4 l	tal
rt	j U4 rt	hjort
rt_h	o:3 rt_h u1 l	årtull
C	C O4 k	tjock
v	v o:4 r	vår

**Tabell 2:** Vokaler

Symbol	Transkription	Som i:
a	h a4 l	hall
A:	h A:4 l	hal
e	v e4 t	vett
e:	v e:4 t	vet
@	p O3 j k @ n	pojken
l	v l4 t	vitt
i:	v i:4 t	vit
U	b U4 t	bott
u:	s u:4 l	sol
u	b u4 s	buss
};	h };4 s	hus

Symbol	Transkription	Som i:
Y	b Y4 t	bytt
y:	s y:4 l	syl
O	h O4 l	håll
o:	h o:4 l	håll
E	r E4 t	rätt
E:	s E:4 l	säl
{	h {4 r	herr
{:	h {:4 r	här
2	f 24 l	föll
2:	f 2:4 l	föl
9	f 94 r	förr
9:	f 9:4 r	för

**Tabell 3:** Utländska ljud

Symbol	Transkription	Som i:
aa	aa4 b e n t	abend
x	b a4 x	Bach
D	D I4 s	this
T	T I4 N k	think
tS	tS 2:4 tS	church
dZ	dZ a4 N k	junk
w	w e4 b m A: s t @ r	webmaster

Symbol	Transkription	Som i:
z	z e4 s t	zest
a~	t_h a~4	temps
e~	C O p e~4	Chopin
o~	b o~ b o~4	bonbon
9~	9~4	un





# Index

## A

- Acapela 100
- Adressbok 66
- Agenda 58
  - ställa in bakgrund 65
- Aktivitet
  - ändra 63
  - lägga till 61
  - ta bort 65
- Ansluta
  - koppla från anslutningen mellan enheten och datorn. 74
  - till datorn 74
  - till Eddy 72
  - till och koppla från Eddy 72
- Återställ säkerhetskopia
  - av 47
  - av infraröda koder 86
- Återställningsknapp 23
- Åtgärd
  - ansluta till Eddy 89
  - Eddy-ljud på/av 89

- Eddy-text på/av 89
- höja/sänka volymen på Eddy 89
- kamera 91
- koppla från Eddy 89
- ljusstyrka 92
- mikrofon 92
- miljökontroll 90
- rensa Eddy-text 89
- Rotera vy 93
- standby 92
- stänga av 92
- ta en bild 54

## B

- Batteri 15
  - indikator under laddning 23
  - visa kvarvarande laddning 31
  - visa status 30
- Beröra 31

Bilagor 99

Bild 54

ta 54

ta bort 55, 56

visa 55

Bluetooth 70

slå på 78

Bruksanvisningar

användning 11

## D

Dator

ansluta enhet till datorn 74

Dra 31

## E

Eddy

anslut 72

koppla ifrån 72

lägga till åtgärd 89

sök 71

ställa in 71

Vad är Eddy? 70

Enhet

sätta på skyddshöljet 28

slå på 29

ställa i standby 41

stänga av 41

## F

Felsökning 98

Fil 32

ta bort 48

Fonetiska transkriptionen 100

## H

Högtalare 23

## I

Indatapanel 33

ansluta till en extern Input Panel 75

dölja på skärmen 34

visa på skärmen 34

Indatapanel på skärmen 33

dölj 35

show 34

Indikator

batteri 23

strömbrytare 23

Infraröd 84  
  mottagare 23  
  sändare 23  
Infraröda koder  
  återställ säkerhetskopior 86  
  hämta 84  
  skapa säkerhetskopior 85  
Inspelningsläge  
  spela in meddelande 50  
Internminne 15

## J

Justera bildskärmens ljusstyrka 37

## K

Kamera 23, 54  
  lägga till åtgärd 91  
Knapp  
  Återställningsknapp 23  
  Strömbrytare 23  
Kommunikation 88  
Kontakt  
  lägga till 66  
  redigera 66  
  ta bort 67

## L

Laddar 29  
Lagring  
  rensa minnet 47  
Larm  
  ändra 60  
  lägga till 59  
  ta bort 61  
Ljud  
  spela in 50  
  ställa in volymen 37  
Ljusstyrka  
  lägga till åtgärd 92

## M

Mått 15  
Menyfält  
  återställ 39  
  dölj 39  
Mikrofon 23  
  lägga till åtgärd 92  
Miljökontroll  
  lägga till åtgärd 90  
Mind Express  
  kontrollera version 96  
Minne  
  internt 15

rensa 47

Mus

ansluta en extern mus 75

Musläge

spela in meddelande 51

## N

Nätadapter 23

## O

Operativsystem 15

## P

Pekskärm 23

använda 31

Prediktion av mening 45

Prediktion av ord 45

Processor 15

## R

Rem 23

Rengöra 20

Reparation 20

Röst

ställa in rösttyp 36

ställa in volym 36

Rotera vy 38

lägga till åtgärd 93

## S

Säkerhetsföreskrifter 18

Serienummer

Hitta Smart 96

Skapa säkerhetskopia

av infraröda koder 85

Smart 46

Skärm 15

justera ljusstyrka 37

Skriva in text 33, 35

Skyddshölje 19, 23

som medföljer Smart 28

Slå på 29

Smart

ansluta till telefonen 79

användning 13

hitta serienummer 96

inledning 23

medföljande delar 22

vy från baksidan 23

vy från höger 23  
vy från vänster 23

Spela in  
i inspelningsläge 50  
i musläge 51  
ljud 50  
meddelande 50

Spela in meddelande 50  
i inspelningsläge 50  
i musläge 51

Spelar in  
ställa in 40  
ta bort 52

Språk  
ställa in 36  
ställa in programspråk 36

Ställa in avstängningstiden 38  
Ställa in datum 36  
Ställa in programspråk 36  
Ställa in talhastighet 36  
Ställa in tid 36  
Standby 41  
Standbyläge 41  
lägga till åtgärd 92

Stänga av 41  
lägga till åtgärd 92

Start  
ställ in alternativ 39

Strömbrytare  
indikator 23

knapp 23

Symbolbibliotek  
visa tillgängliga 97

## T

Tal  
ställa in 36

Tekniska specifikationer 15

Telefon 78  
anslut till Smart 79  
lägg på 81  
ringa ett telefonnummer 80  
spela in 80  
ställa in 78

Trycka 31

## U

USB 15  
ansluta en extern mus 75  
Ansluta ett USB-minne 75  
ansluta till datorn 74  
ansluta till en extern Input Panel 75

USB-minne  
anslut 75

USB-port 23

Uttalslexikon 44

## V

Visa agenda 58

Volym

ställa in röstvolymen 36

ställa in volymen 36, 37