

Windows controle

Stand van zaken

Windows controle

Online documenten
(actueel beschikbaar)

Online documenten: actueel beschikbaar

Al deze documenten hebben specifieke documentinstellingen*
Menu > Instellingen > Document > Windows Controle. Gevolg:

- Specifieke positie en afmetingen van het document dat Windows controleert
- De positie en afmetingen van het vorige document (bv. communicatiebestand) worden onthouden
- Mind Express zendt nu acties naar andere Windowsprogramma's (i.p.v. enkel naar ME zelf).
- Het Mind Express venster staat bovenop andere programma's ("op voorgrond")

InControl


Windows Controlele via oogsturing






InControl

In jouw ME5

- In ME5 > in je profiel > Menu > Importeren > Online documenten

Ga op zoek in onze vele Mind Express documenten. Selecteer ze en importeer.



-  Symboolcommunicatie
-  Tekstcommunicatie
-  Spelletjes
-  Educatief
-  Apps




Door Jabbla
20-09-2022, 225 downloads
Nederlands

Een complete app met ondersteuning voor bediening van je Windows-omgeving met oogsturing. [Hier](#) op ons YouTube-kanaal vind je een Engelstalige demonstratie van het document.

[Lees meer](#)

InControl

- In
Windows:
- klikken
 - scrollen
 - typen

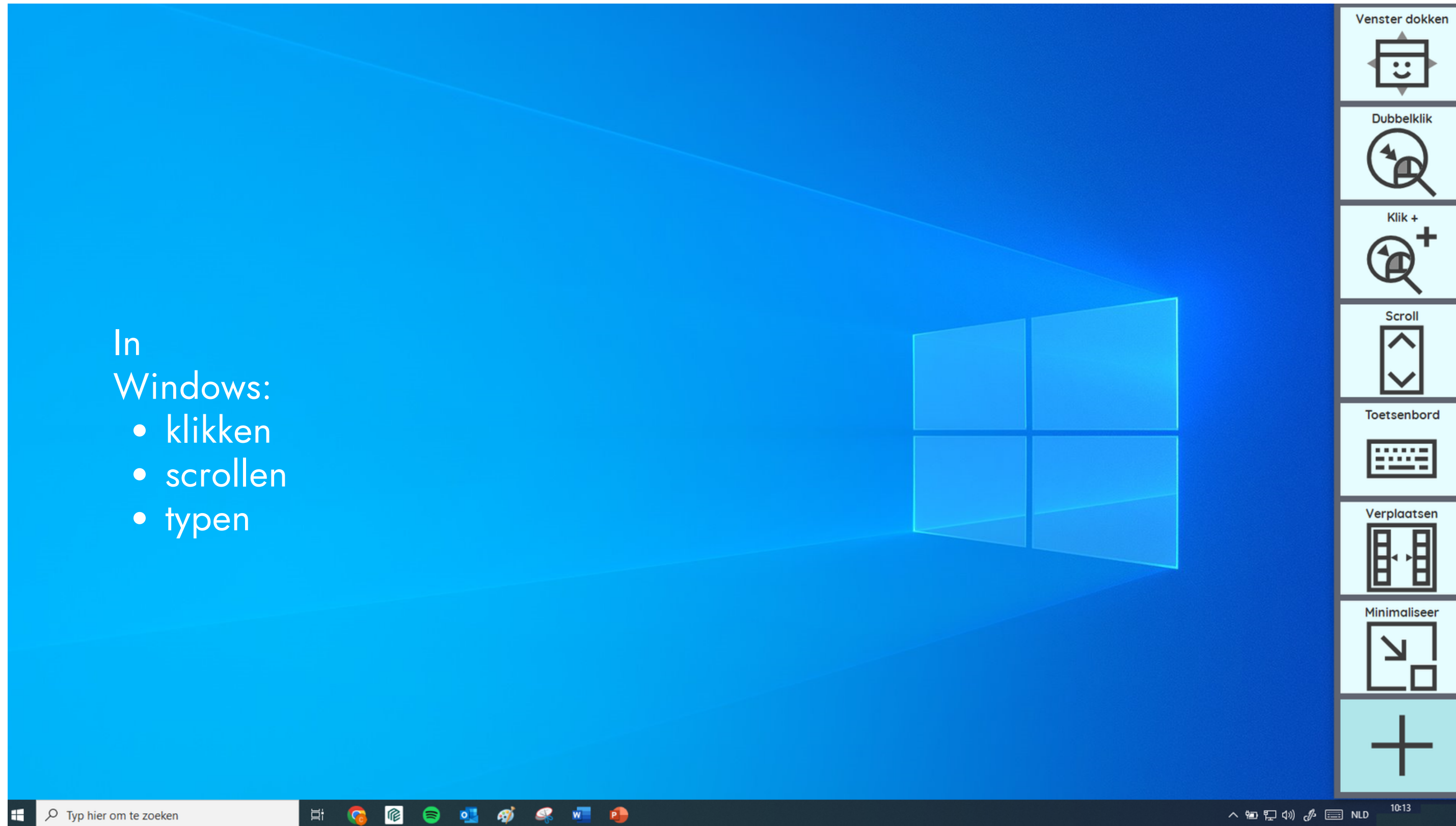

InControl

Klikken (Acties "Bediening > extern dwellen")



Standaard: 1 x dubbelklikken via zoom
2x selecteren: permanent dubbelklikken via zoom ("capslock")




Standaard: permanente linksklik via zoom ("capslock")



Via  worden deze muisfuncties zichtbaar

InControl


Scrollen (Actie "Bediening > Extern dwellen + scrollen")

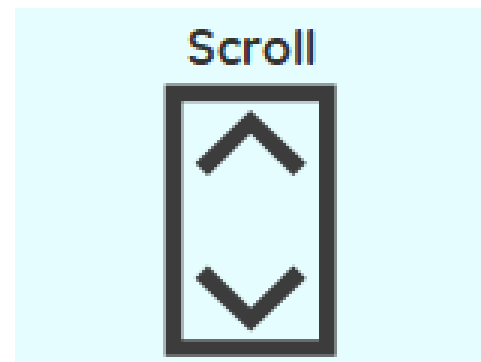

Scrollen buiten Mind Express.

Werkwijze:

- Klik op het vakje "Scroll".
- Selecteer vervolgens een plek buiten Mind Express.
- Deze locatie wordt gebruikt als referentiepunt om te scrollen.
(Noodzakelijk, aangezien sommige programma's meerdere scrolbalken hebben).
- Vervolgens kan je scrollen buiten Mind Express
- Enkel in bedieningsmethode 'Oogsturing', wanneer oogmodule gebruikt wordt.

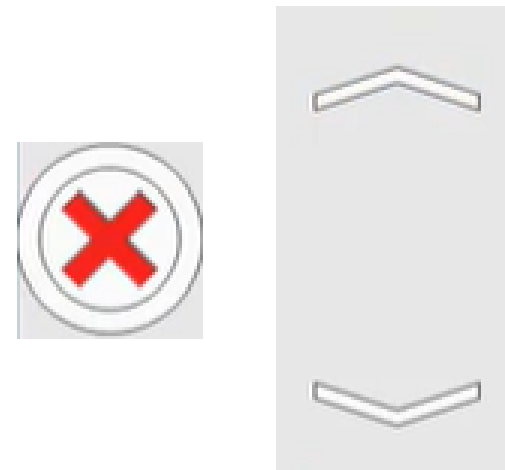


InControl

Scrollen (Actie "Bediening > Extern dwellen + scrollen")

Voelt erg "natuurlijk" aan:

- De blikrichting bepaald de richting en snelheid van het scrollen
- De zone tussen de twee pijlen van het referentiepunt = rust

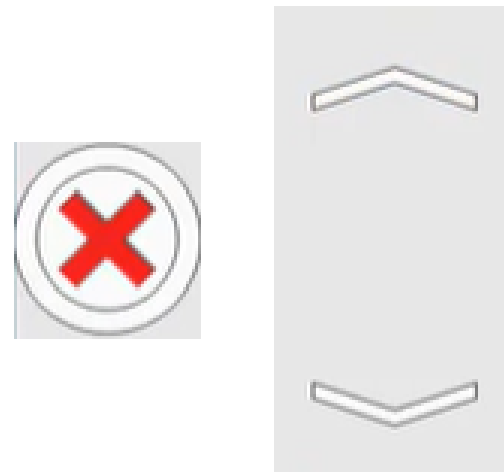

InControl

Typen

- Qwerty: aanpasbaar naar Azerty
- Woordvoorspelling
- Cijfers
- Speciale tekens: ruimte om eigen toetsen toe te voegen
- Functietoetsen

Incontrol

Positioneren

Dock window



Actief programma/venster maximaliseren, zonder overlap met ME-venster.

Verplaatsen



Verplaatsen van ME-venster naar linker- of rechterzijde scherm.

Minimaliseer



Minimaliseren ME voor maximaal overzicht & gebruik Windows.
Bv. tijdens gebruik van Klik +

InControl

Aanpassen Zoom

Snelle zoom



Sneller en minder zoomen


Precisie zoom



Trager zoomen ~ nauwkeuriger selecteren

InControl

Apps: opstarten

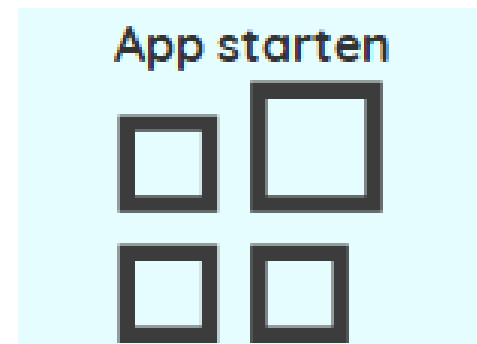

InControl

Apps: aanpassen

In bedieningsmethode van de O.C.-gebruiker:



Positie en zichtbaarheid wijzigen: eerst klikken op app

Layout Apps

Wijzig zelf de indeling van het Apps venster. Klik op een app en gebruik de onderstaande opties om deze te verplaatsen of te tonen/verwijderen.

Google	Disney+	Spotify	Facebook	YouTube	Instagram
Netflix	Nieuws	WhatsApp			

Links

Rechts

Tonen/Verbergen

InControl

Apps: aanpassen

In "Bewerken"-weergave door de begeleider:


- Andere "apps" toevoegen
- Bepalen welke "acties" zichtbaar zijn voor de betreffende app.
 - To Mouse
 - To Extra 1
 - To Extra 2



InControl

Instellingen: Algemeen

- Grootte minimaliseerknop
- Selectiemethode
- Oogmonitor
- Pauzevak
- Geavanceerd:
 - Hoogte scroll zone
 - Actie bij scroll sluiten

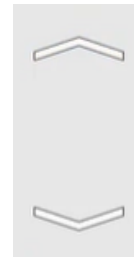

Actie bij Scroll sluiten:

<input checked="" type="checkbox"/>	Scroll stoppen
<input type="checkbox"/>	Stop scrollen en Zoom klik starten
<input type="checkbox"/>	Stop scrollen en Zoom klik+ starten
<input type="checkbox"/>	Stop scrollen en Dwell klik starten
<input type="checkbox"/>	Stop scrollen en Dwell klik+ starten

InControl

Instellingen: Muis

Instellingen muis

Grootte muisvenster:	<input type="radio"/> klein	<input type="radio"/> gemiddeld	<input checked="" type="radio"/> groot
Algemene dweltijd:	<input type="button" value="-"/>	<input type="text" value="1000"/>	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="Layout muis"/> <input type="button" value="Layout extra 1"/> <input type="button" value="Layout extra 2"/>
Zoom start:	<input type="button" value="-"/>	<input type="text" value="1000"/>	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="Layout apps"/>
Zoom snelheid:	<input type="button" value="-"/>	<input type="text" value="2000"/>	<input type="button" value="+"/>
Zoom vergroting:	<input type="button" value="-"/>	<input type="text" value="600%"/>	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="✓"/>

InControl

Instellingen: Toetsenbord

Instellingen toetsenbord

Grootte toetsenbord: klein gemiddeld groot

Algemene dweltijd: - 1000 +

Toetsenbord dweltijd; - 1000 +

Voorspellingen dweltijd: - 1000 +

Toetsenbord dwell herhalen: Uit

Mouse Control

Windows Controle via schakelaar(s)

Mouse control

In jouw ME5



Mouse control

Selecteer

Door Jabbla

17-02-2022, 55 downloads

English, Français, Nederlands, Zweeds

Control the mouse with switches. Use Radar, 4 Directions or Down-Right mode to move the mouse on your screen and select the Click, Double Click, Right Click or Drag action. Combine this file with the KeyVit Mini keyboard to type text using switches.

Terug

Mouse Control

I. Scanmethode


- Vizier (4 Directions)



- Down-Right




- Radar

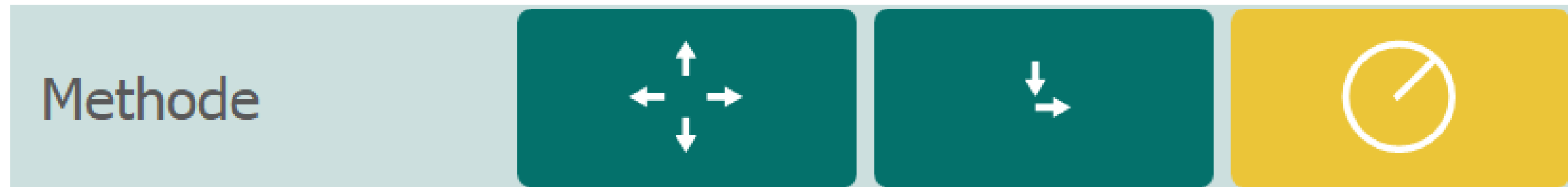

Mouse Control

Vizier (4 Directions)

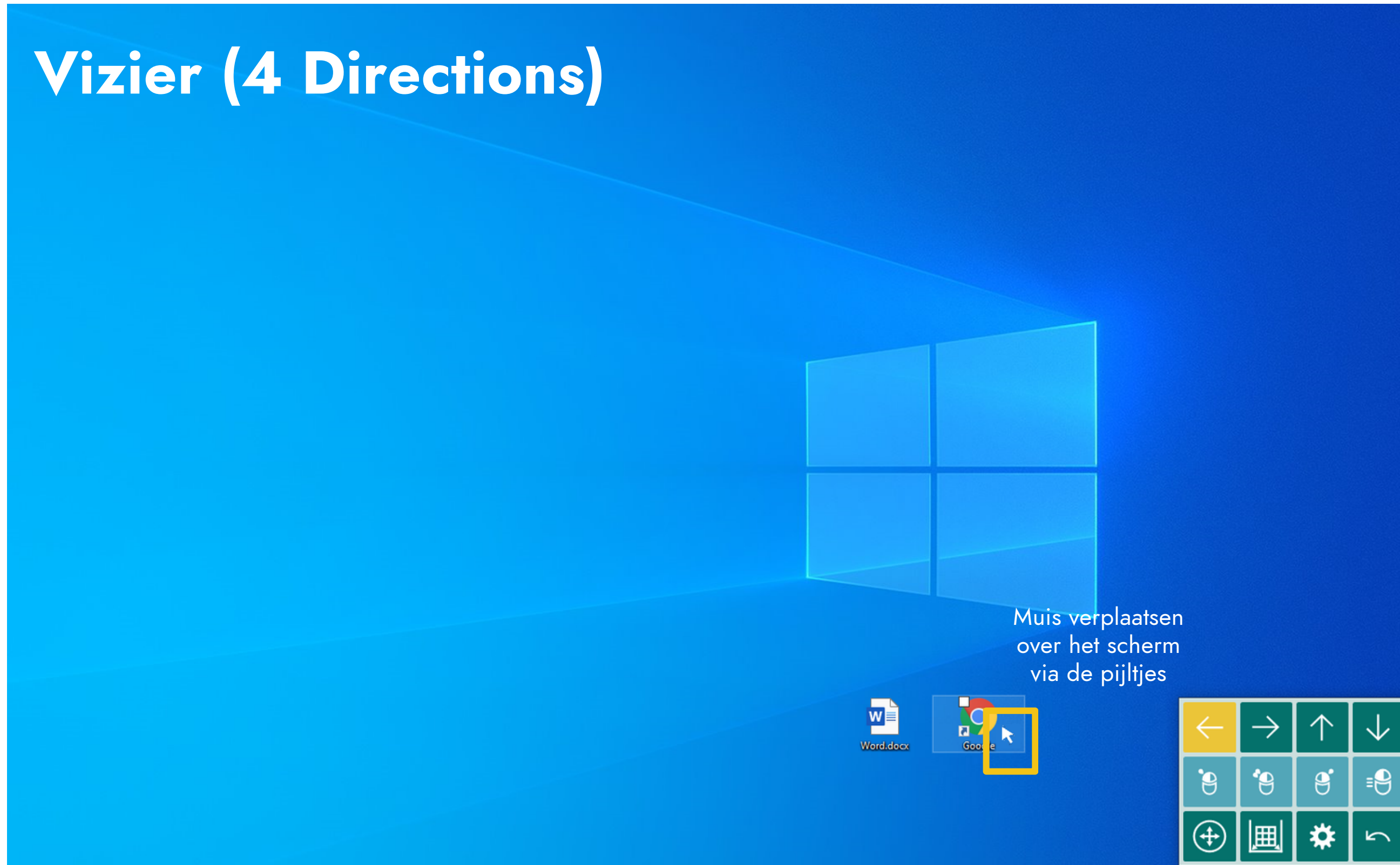

Mouse Control

Down-Right

Muis verplaatsen
over het scherm
via een verticale
en vervolgens
via een horizontale as



Mouse Control

Radar


Muis verplaatsen
over het scherm
via een roterende as.
Startpunt te kiezen.



Mouse Control

I. Scanmethode

- Optie: kleine correctiestap
 - Op de plaats waar je muis staat, verschijnt een streepje.
 - Dit verspringt van boven, naar rechts, naar onder en naar links.
 - Als je een richting kiest, dan springt de muis een sprongetje in die richting.

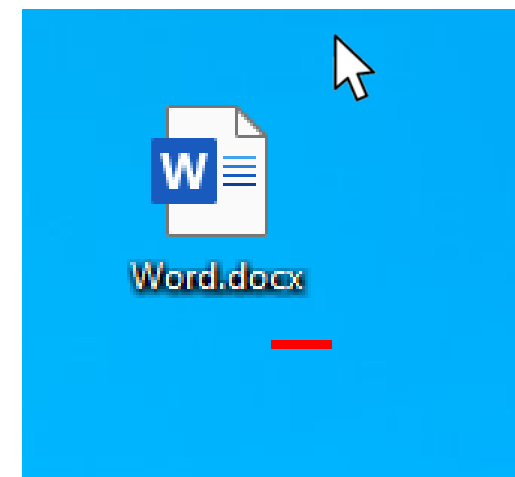

Mouse Control

II. Muis

Na bepalen van positie d.m.v. scanmethode:

- Gewone, linker muisklik
- Dubbelklik
- Rechter muisklik
- Slepen



Mouse Control



III. Positie ME-document (Mouse Control)

- Links onderaan
- Rechts onderaan



Mouse Control

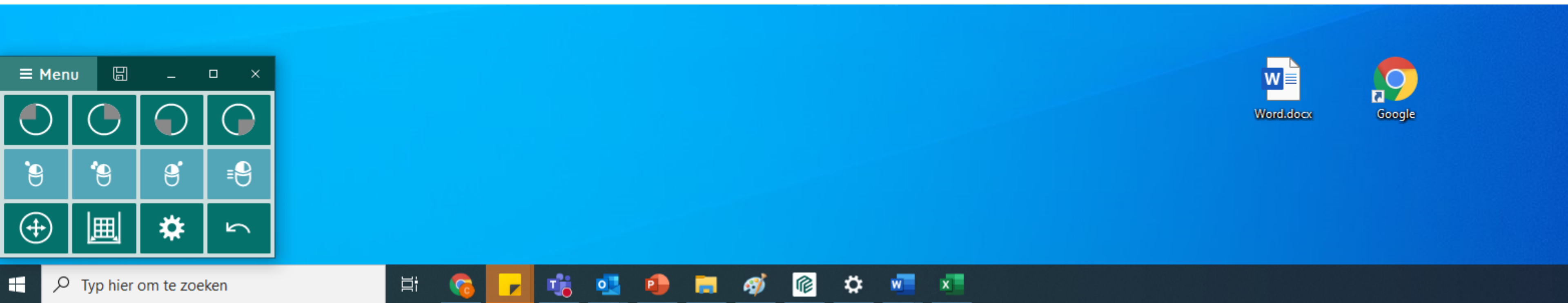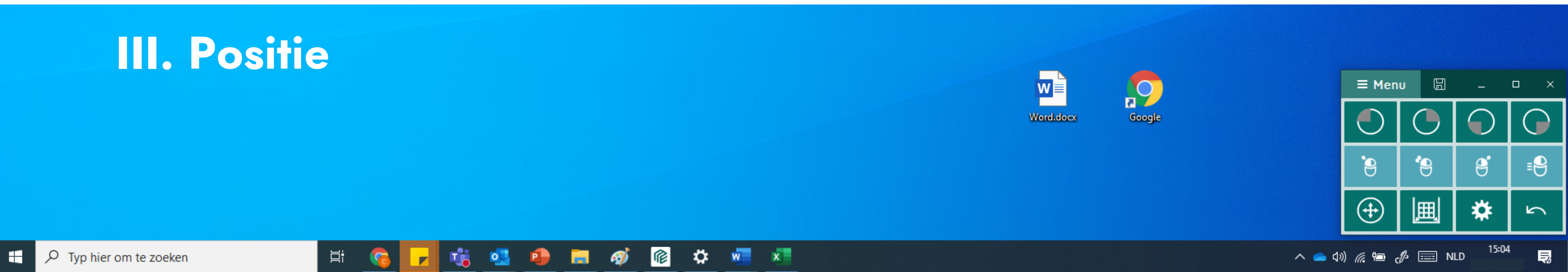


III. Positie









Mouse Control

IV. Instellingen

- Methodespecifiek

Methode			
Snelheid 1	-	8	+
Snelheid 2	-	5	+

Methode			
Snelheid omlaag	-	7	+
Snelheid naar rechts	-	5	+

Methode			
Snelheid radarlijn	-	9	+
Snelheid cursor	-	5	+

Mouse Control

IV. Instellingen


- Ongeacht de methode:
 - Scan snelheid: de algemene snelheid van het scannen in ME. Omdat er daar geen waarde voor opgegeven is, kan je enkel - of + kiezen.
 - Correctiestap aanpassen:
 - Snelheid richting: de snelheid waarbij je de pijltjes naar de verschillende richtingen ziet
 - Grootte sprong: de grootte van het sprongetje

Scan snelheid	-		+
Snelheid richting	-	5	+
Grootte sprong	-	20	+

Mouse Control

V. Toetsenbord (optioneel)

- Automatisch gekoppeld, indien KeyVit **Mini** aanwezig is in het portaal

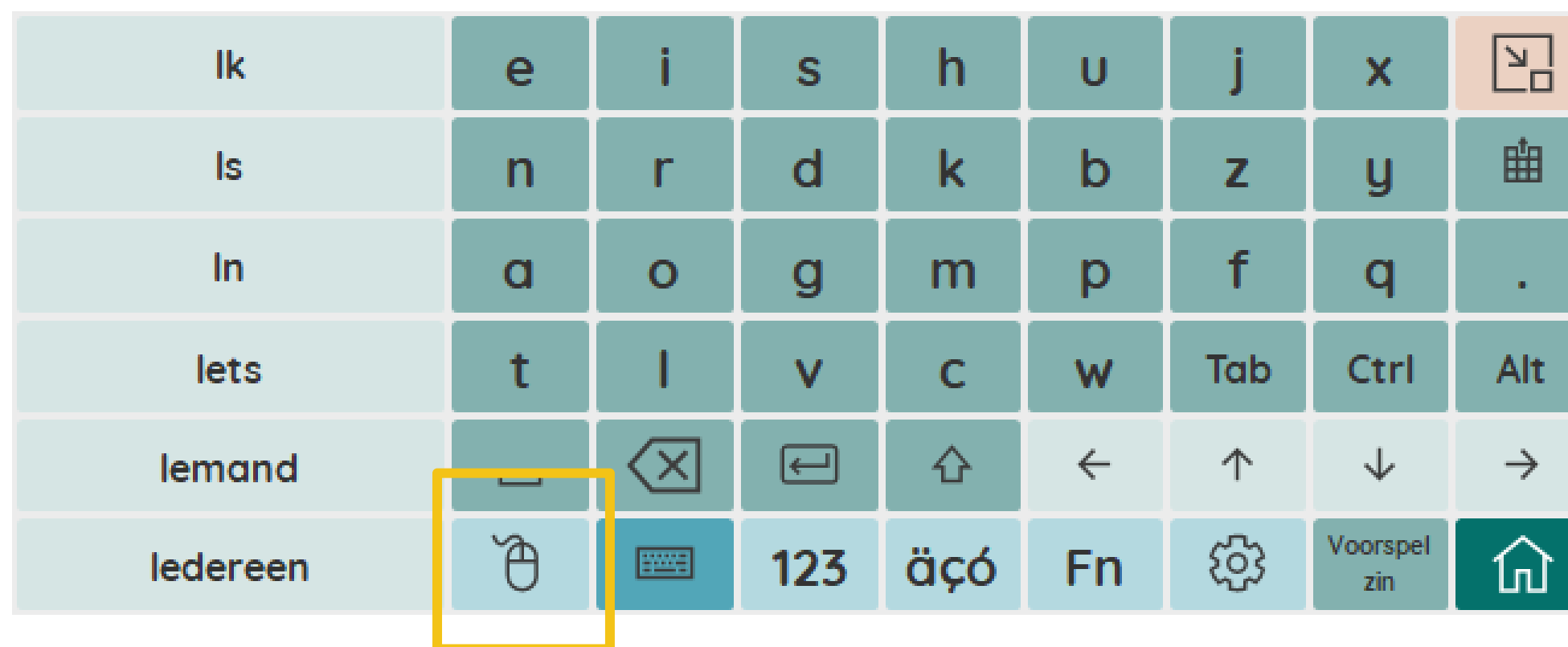


Acties

Ga naar...
Mouse control


Mouse Control

V. Toetsenbord (optioneel)

- Automatisch gekoppeld, indien KeyVit **Mini** aanwezig is in het portaal

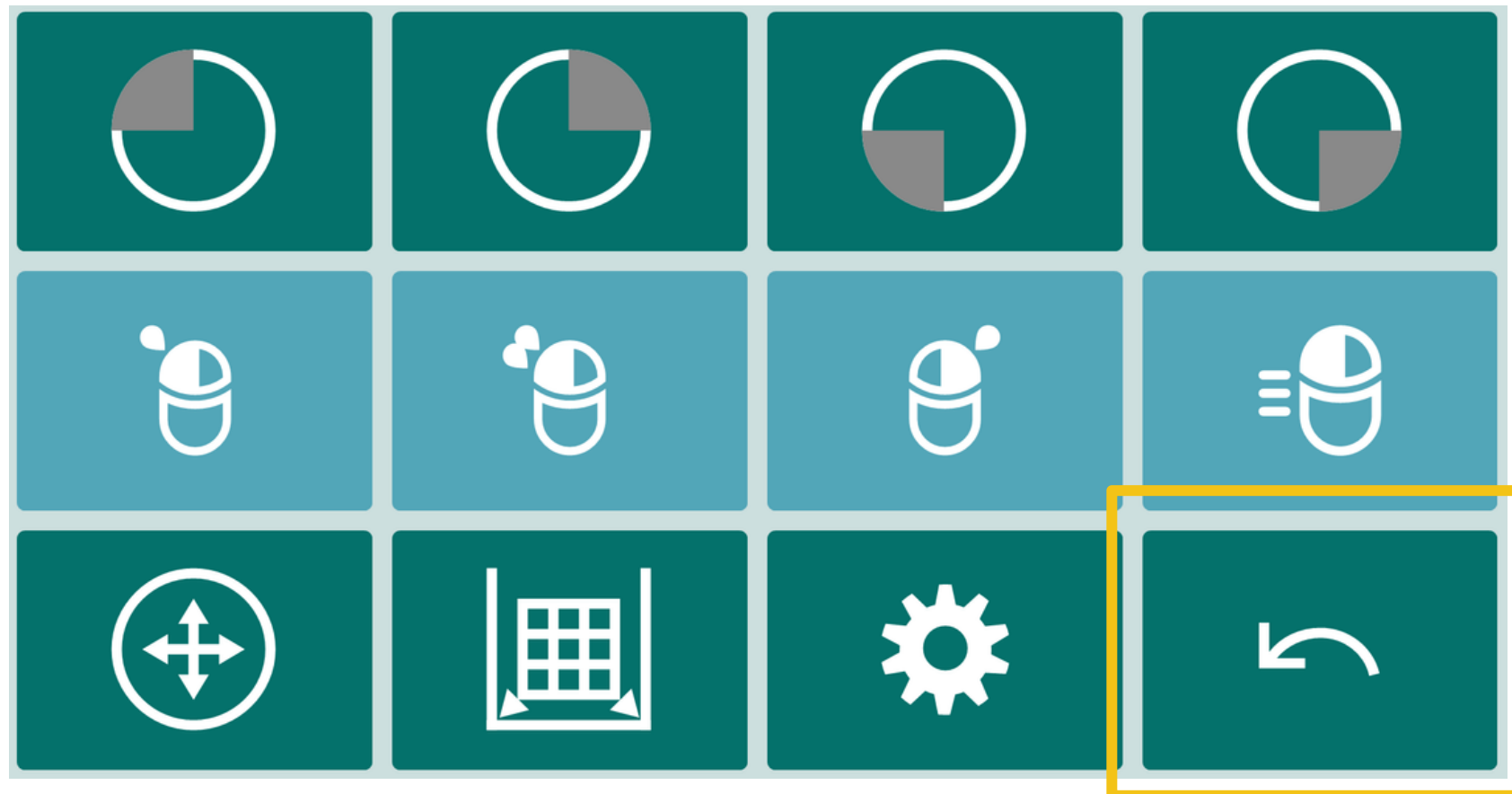

Acties

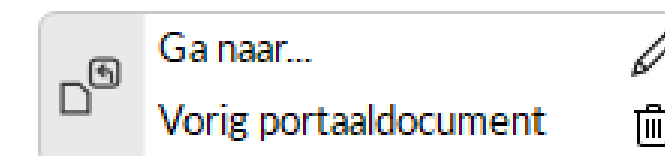


KeyVit (mini)

Typen in Windows via schakelaar(s)

KeyVit (mini)

In jouw ME5

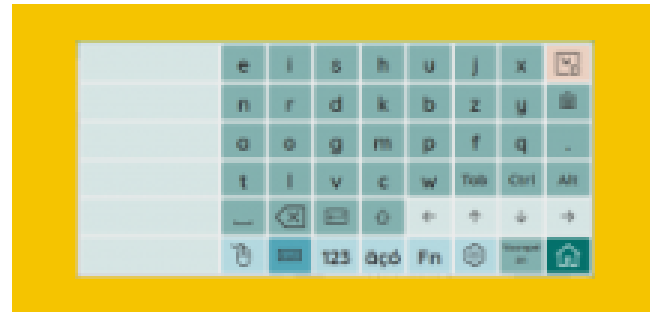

KeyVit Mini


Door Jabbla

16-11-2021, 77 downloads

English, Français, Nederlands

KeyVit Mini is a software keyboard to type in other applications, designed for switch users. Combine this file with the Mouse Control file to control the mouse with switches.

[Lees meer](#)

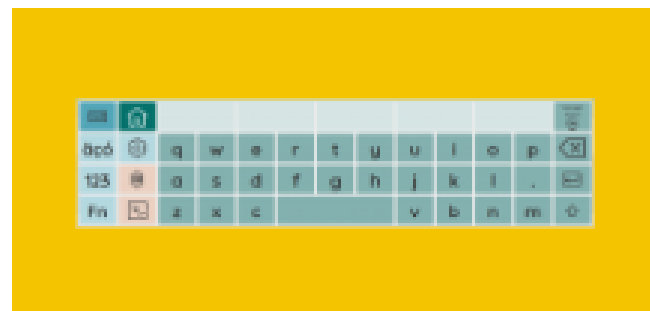

KeyVit

Door Jabbla

08-11-2021, 41 downloads

English, Français, Nederlands

KeyVit is a software keyboard to type in other applications. The keyboard has different layouts (QWERTY, AZERTY, QWERTZU, ABC) and pages with special characters, numbers, function keys,...


[Lees meer](#)

jabbla

KeyVit

I. Toetsenbord

- Azerty, ABC (alsook Qwerty en Qwertzu)

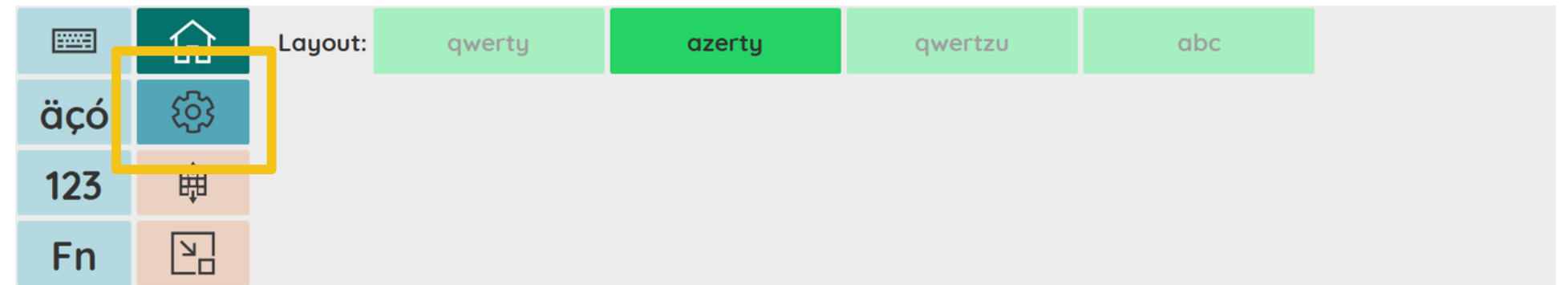

- + speciale tekens + cijfers
- Tools
 - F1 – F12
 - Menu Windows oproepen
 - Ander venster voorop plaatsen (= actief maken)
 - Koppelen van programma aan je toetsenbord.
 - ...




- Woord- en zinsvoorspelling



KeyVit

II. Positie aanpassen




- Toetsenbord boven- of onderaan
- KeyVit minimaliseren

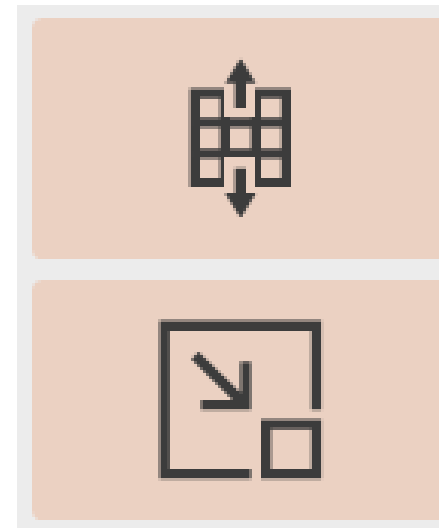

KeyVit mini

I. Toetsenbord


- Frequentie
- + speciale tekens + cijfers
- Tools
 - F1 – F12
 - Menu Windows oproepen
 - Ander venster voorop plaatsen (= actief maken)
 - Koppelen van programma aan je toetsenbord.
 - ...
- Woord- en zinsvoorspelling

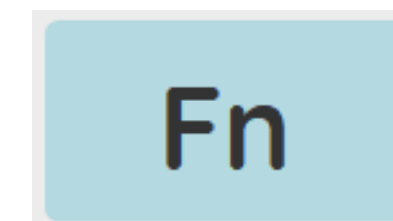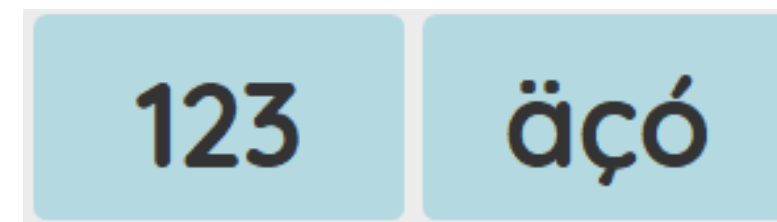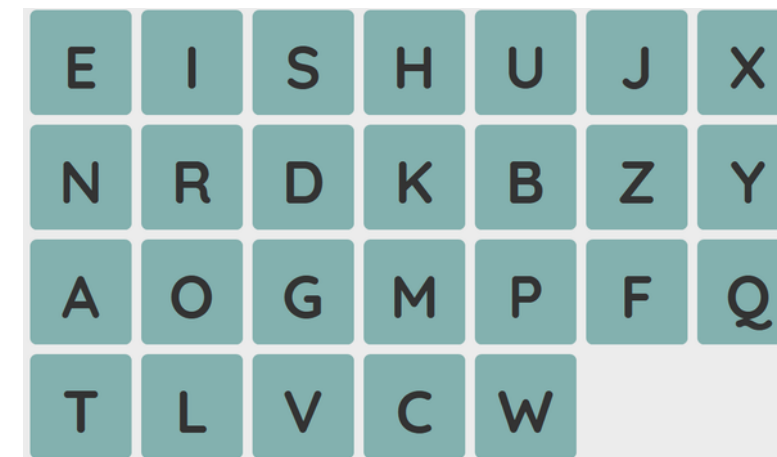


KeyVit mini

II. Muis (optioneel)

- Automatisch gekoppeld, indien KeyVit **Mini** aanwezig is in het portaal

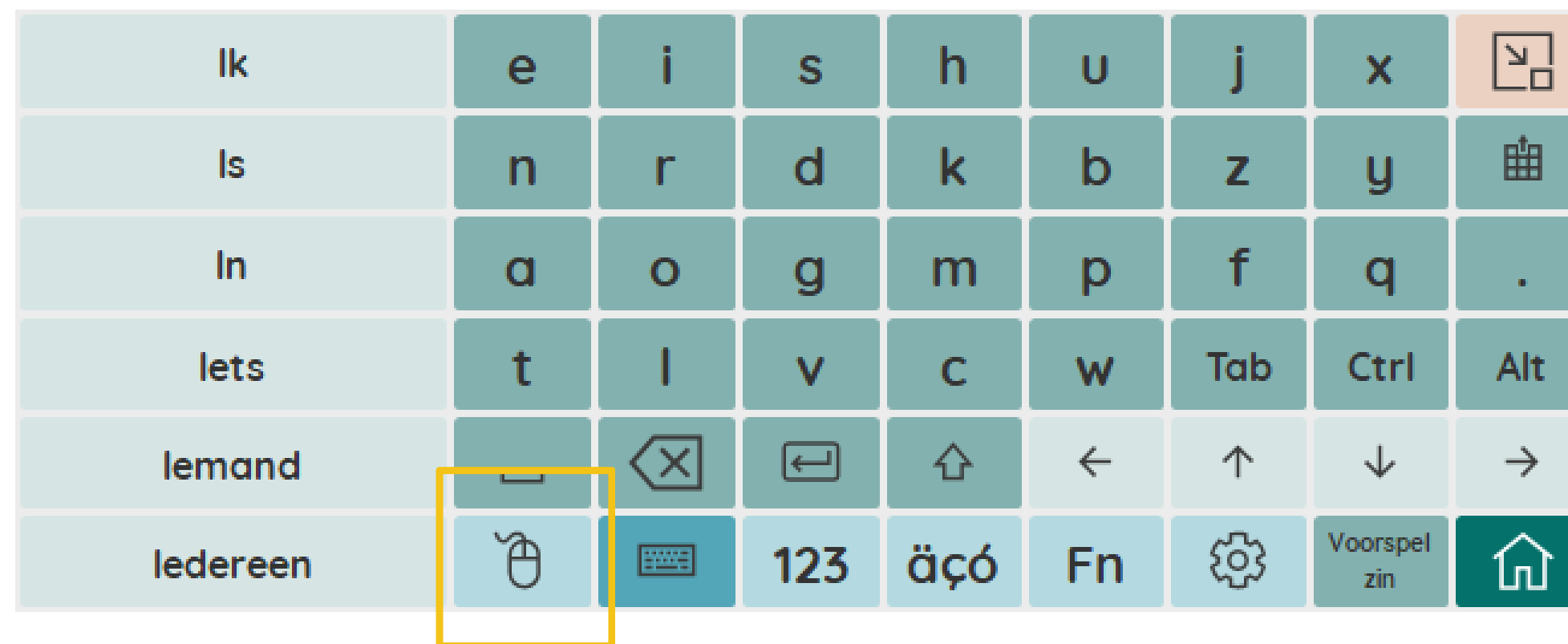


Acties

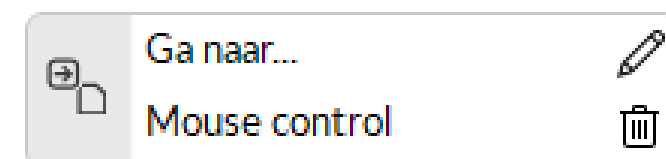


KeyVit mini

III. Positie aanpassen: verplaatsen of minimaliseren

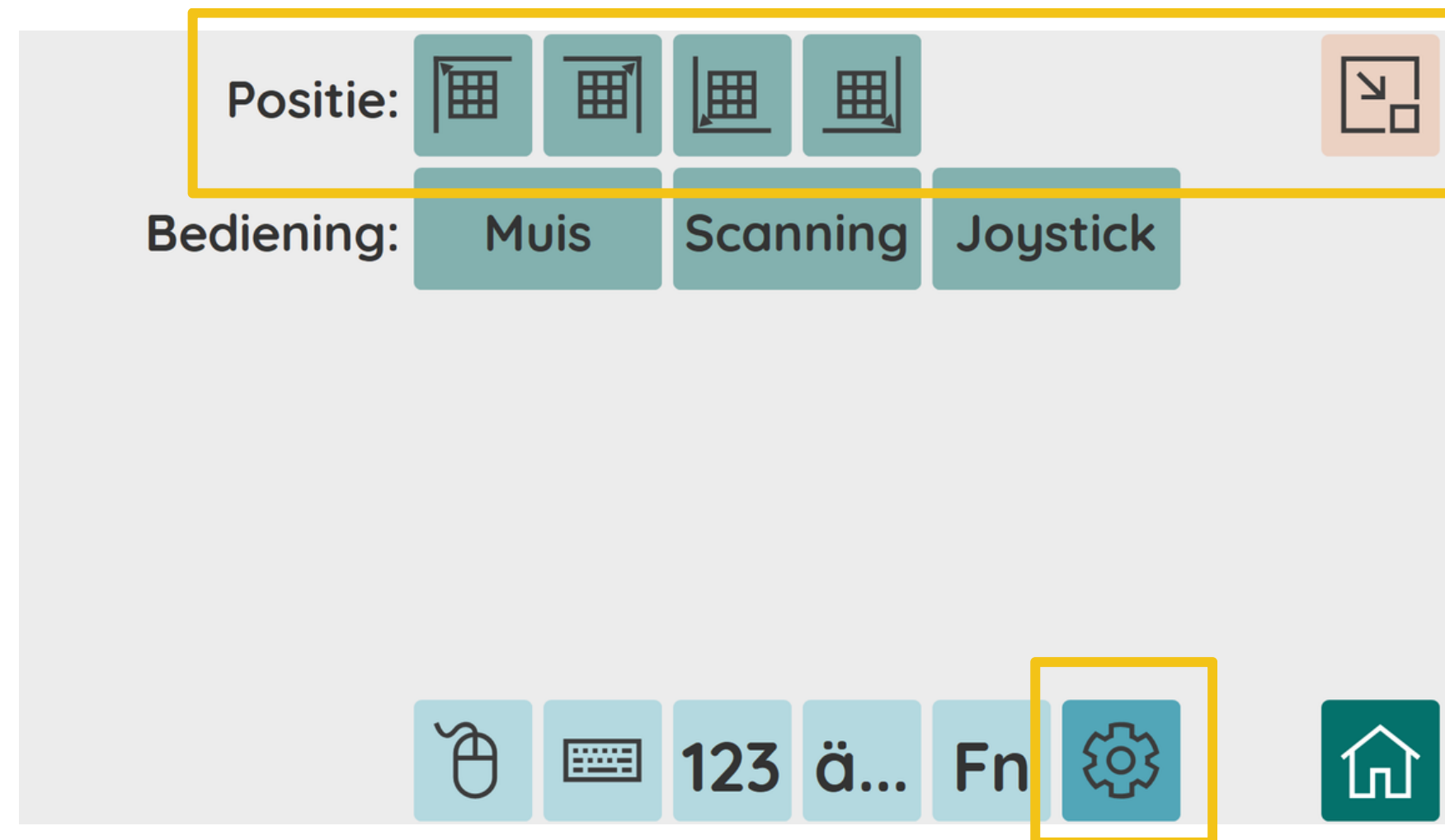

KeyVit mini

IV. Instellingen: bedieningsmethode aanpassen

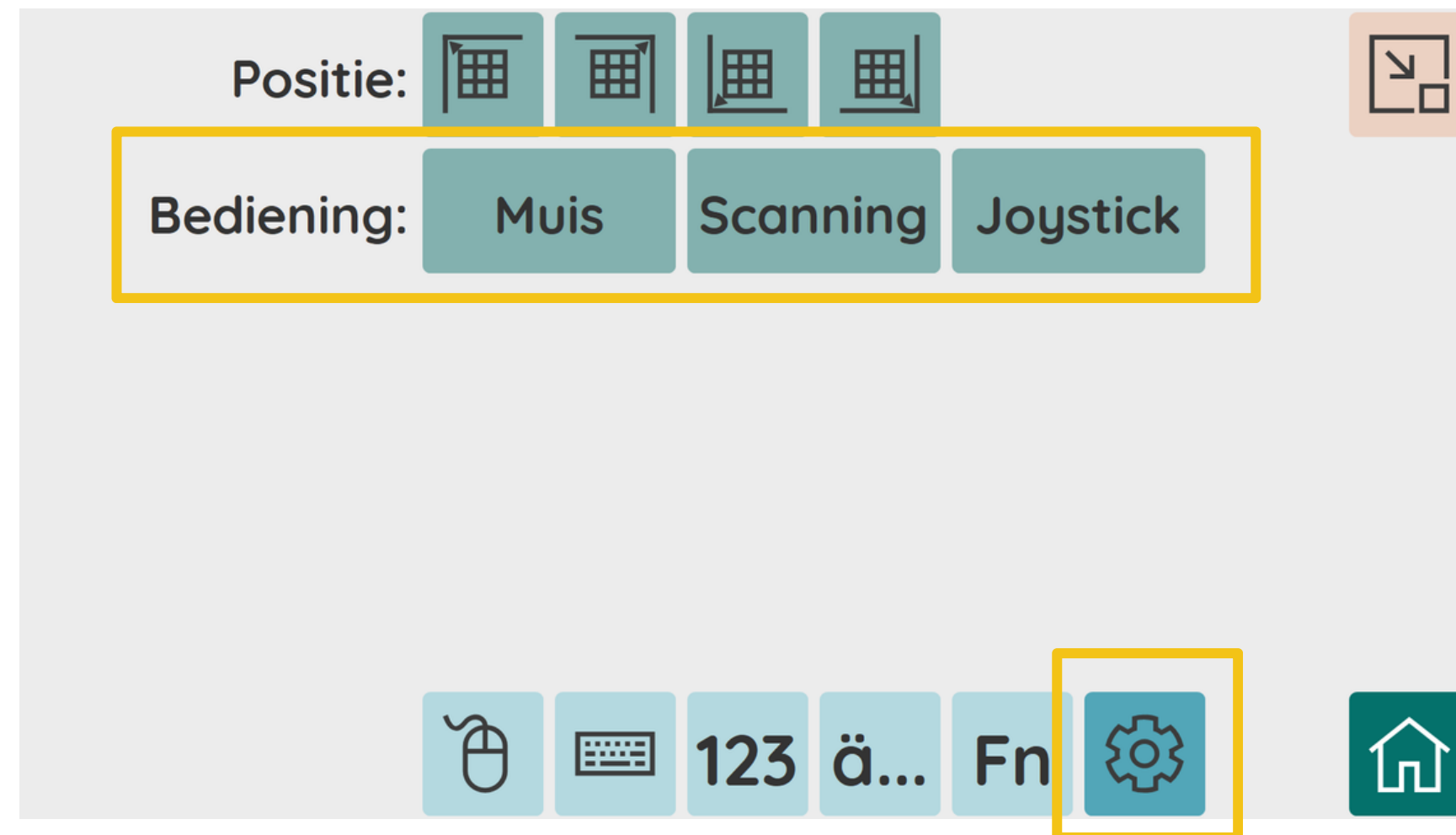

Windows Controle

Top-down

AlphaCore

- In je portaal importeren:

AlphaCore + Mouse Control + KeyVit mini + InControl

- Resultaat:
Windows Controle mogelijk via oogsturing en/of schakelaar(s)

Windows Controle

Bottom-up

Bottom-up: tools

Instellingen & onloaddocument

Gehele document moet Windows Controleren?

- Menu > Instellingen > Document > Windows Controle
- Eventueel: onloaddocument (zie voorbeeld volgende slide)

Bottom-up: tools

Instellingen & onloaddocument

Gehele document moet Windows Controleren?

Voorbeeld in (oude) Facebook via Windows Controle (online document)



Bottom-up: tools

Acties

Binnen één document moet(en) bepaalde pagina('s) Windows Controleren? Gebruik acties (i.p.v. Instellingen)

1. Windows-Controleacties

- Positie bewaren
- Zenden
- Op voorgrond

2. "Ga naar pagina"-actie

3.

The screenshot shows a configuration window titled "Toets zenden" with a search bar at the top right. Below the title bar, there are two radio buttons: "Zend teken" (selected) and "Zend functionele toets". To the right of these buttons are two input fields. Below a horizontal separator line, there is a section labeled "Actie uitvoeren" with a dropdown menu currently showing "indrukken + loslaten".

Windows Controle

Feedback of vragen?

Mindexpress.be > bij de download

Reactie of vraag aan de auteur

Heb je een vraag, wens je verduidelijking of extra informatie over dit bestand? Contacteer de auteur via dit formulier. We beschermen je privacy: je opmerking komt niet online. We delen wel jouw gegevens met de auteur om jouw vraag te beantwoorden.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam *

E-mailadres *

Vraag / Opmerking *