



## Uitspraakwoordenboek ME4 > ME5


### In Mind Express 4

1. Heb je je stem nieuwe uitspraken aangeleerd?

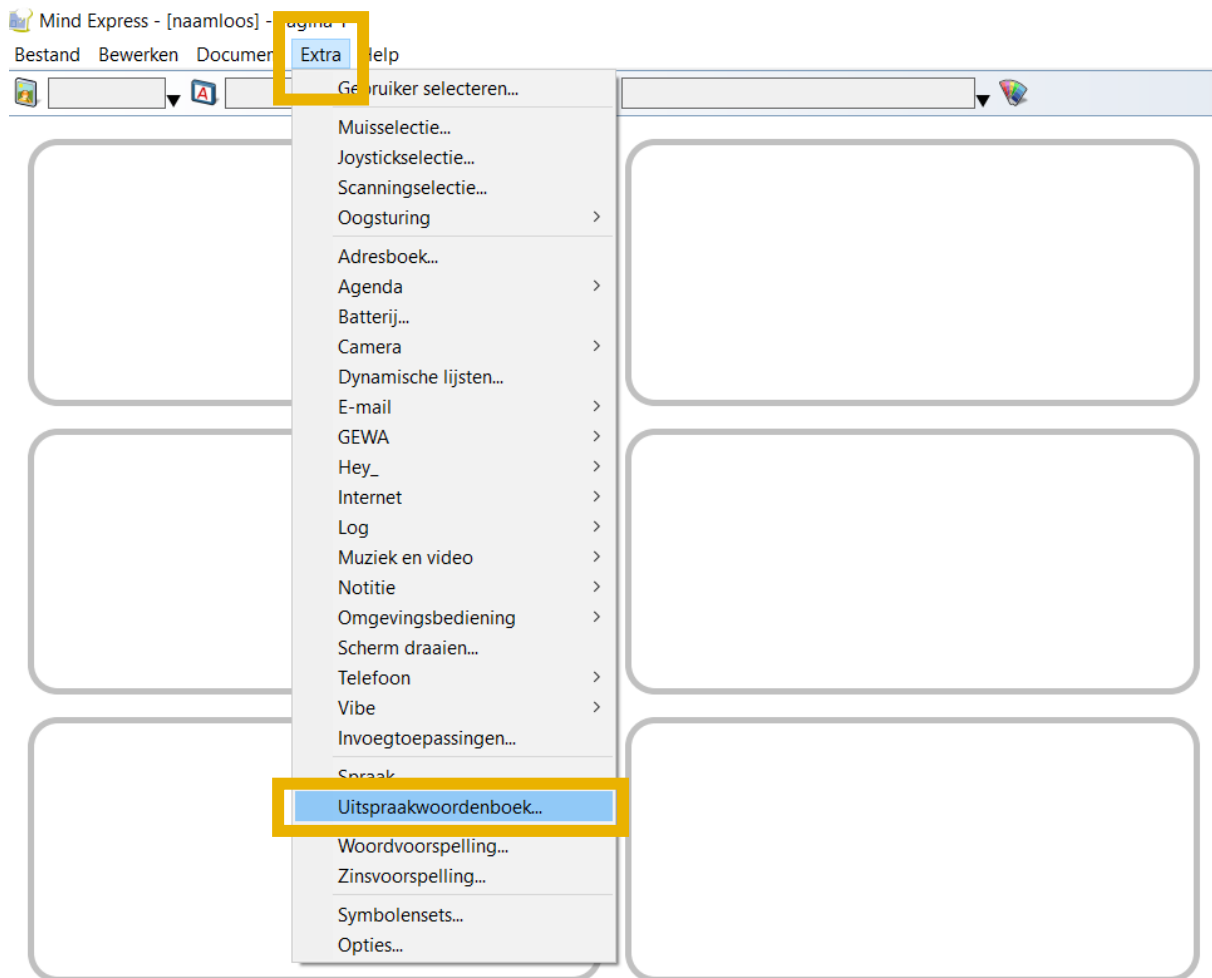


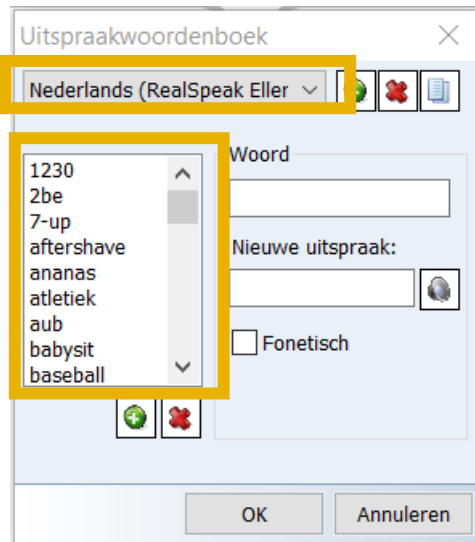


2. Zo ja, dan wil je dit uitspraakwoordenboek misschien wel importeren en gebruiken in ME5? Zo hoef je in ME5 je stem niet opnieuw deze uitspraken aan te leren.
3. Dit ME4-uitspraakwoordenboek staat op een specifieke locatie op je Windows-(spraak-)computer. Ga naar deze locatie.

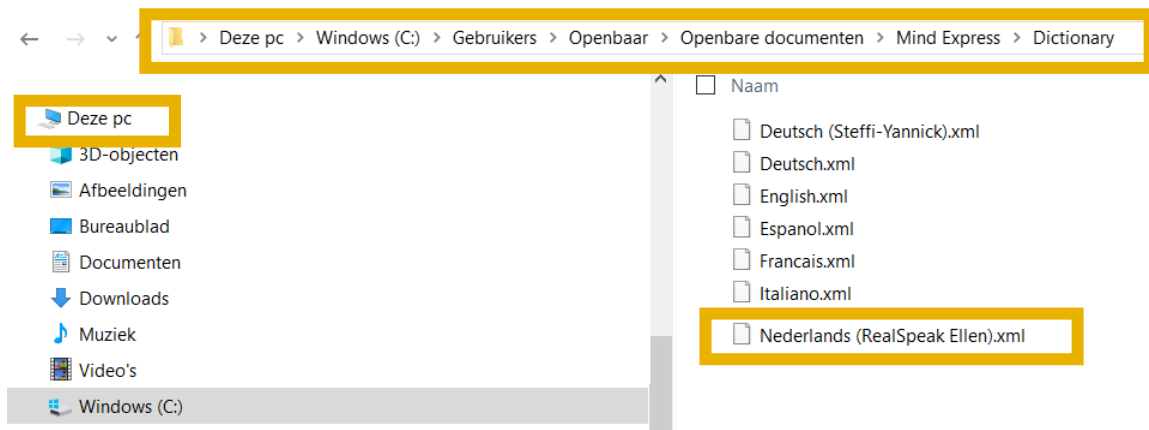

4. Maak op deze locatie een kopie van dit uitspraakwoordenboek:
  - a. via de sneltoetsen Ctrl+C en Ctrl+V
  - b. of via kopiëren en plakken

Vervolgens verschijnt een kopie van dit uitspraakwoordenboek (automatisch met de vermelding "kopie" in de naam).

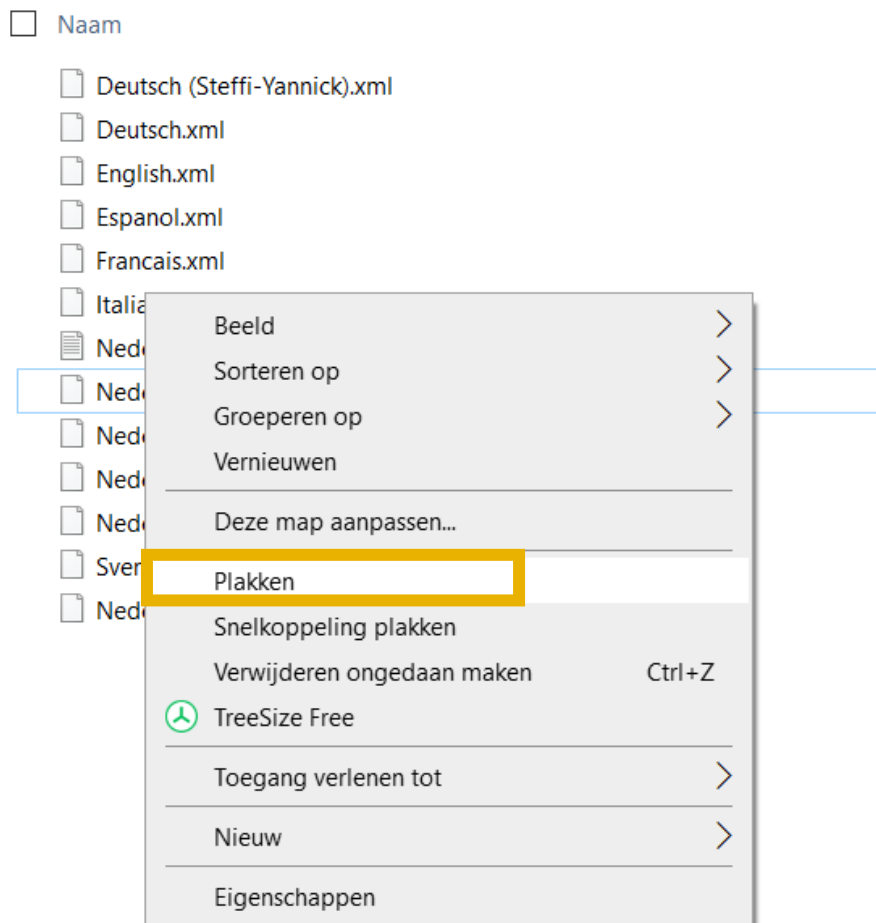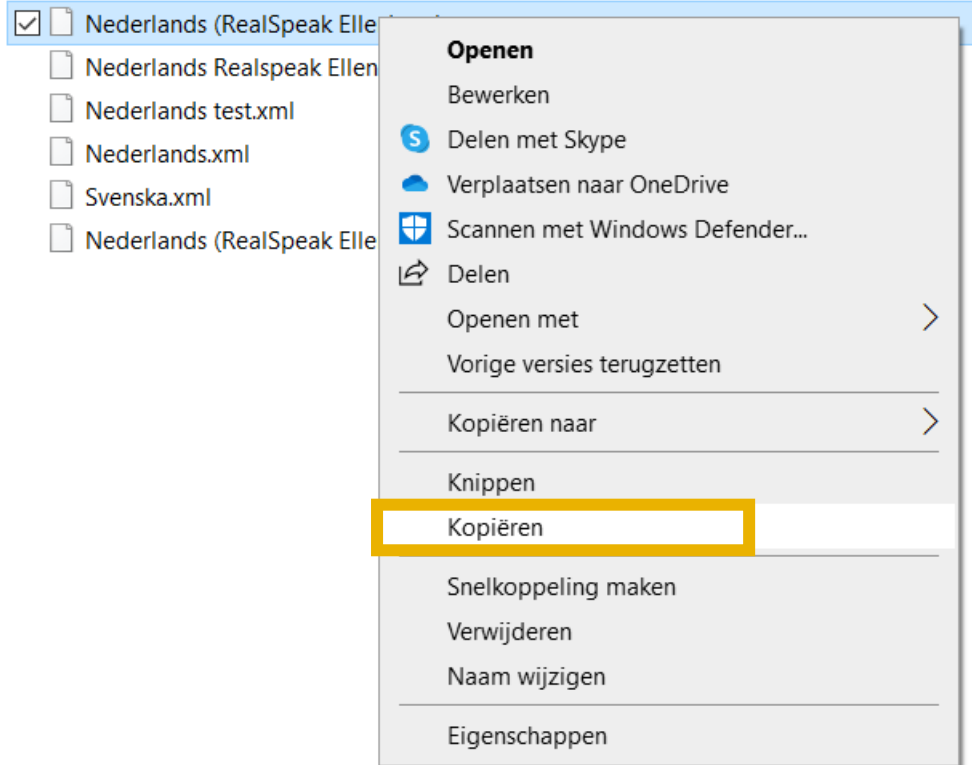

Resultaat:

Naam

Deutsch (Steffi-Yannick).xml

Deutsch.xml

English.xml

Espanol.xml

Francais.xml

Italiano.xml

Nederlands (RealSpeak Ellen) - kopie.xml

Nederlands (RealSpeak Ellen).xml

5. De uitspraakwoordenboeken in ME4 hebben een "xml"-extensie. In ME5 wordt gewerkt met een "dic"-extensie. Bijgevolg moeten we de kopie van het "xml"-uitspraakwoordenboek hernoemen en een "dic"-extensie geven. In de naam kan je na de ".", "xml" verwijderen en "dic" typen:

25/08/2020 14:53

Nederlands (RealSpeak Ellen) - kopie.xml

Nederlands (RealSpeak Ellen) - ME5.dic

Nederlands (RealSpeak Ellen).xml

Nederlands Realspeak Ellen.xml

Nederlands test.xml

Nederlands.xml

Svenska.xml

Nederlands (RealSpeak Ellen).old

**Openen**

Bewerken

Delen met Skype

Verplaatsen naar OneDrive

Scannen met Windows Defender...

Delen

Openen met >

Vorige versies terugzetten

Kopiëren naar >

Knippen


Kopiëren

Snelkoppeling maken


Verwijderen

**Naam wijzigen**

Eigenschappen

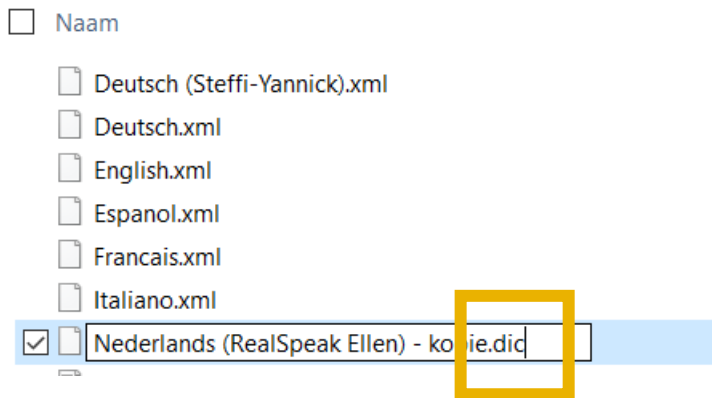


Resultaat: mogelijks krijg je nog een venster te zien, waarin je je bewerking moet bevestigen:

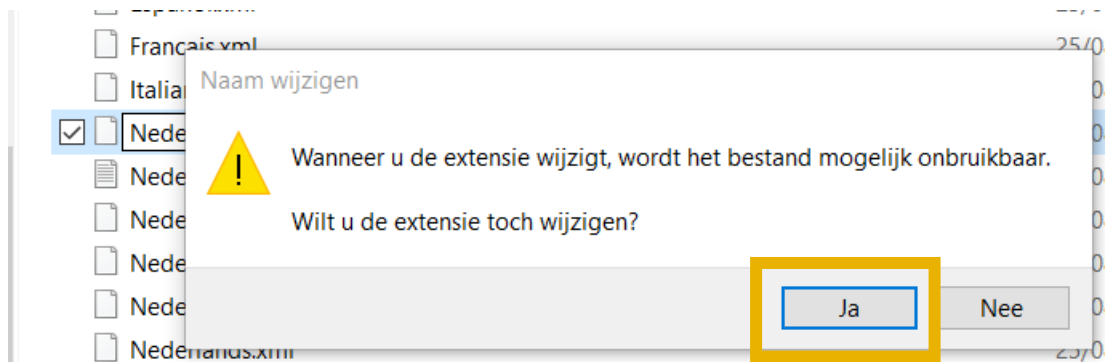


Naam	Gewijzigd op	Type	Grootte
<input type="checkbox"/> Deutsch (Steffi-Yannick).xml	25/08/2020 14:53	XML-document	7 kB
<input type="checkbox"/> Deutsch.xml	25/08/2020 14:53	XML-document	1 kB
<input type="checkbox"/> English.xml	25/08/2020 14:53	XML-document	1 kB
<input type="checkbox"/> Espanol.xml	25/08/2020 14:53	XML-document	1 kB
<input type="checkbox"/> Francais.xml	25/08/2020 14:53	XML-document	2 kB
<input type="checkbox"/> Italiano.xml	25/08/2020 14:53	XML-document	1 kB
<input checked="" type="checkbox"/> Nederlands (RealSpeak Ellen) - kopie.dic	25/08/2020 14:53	Tekstdocument	6 kB
<input type="checkbox"/> Nederlands (RealSpeak Ellen).xml	25/08/2020 14:53	XML-document	6 kB
<input type="checkbox"/> Nederlands Realspeak Ellen.xml	25/08/2020 14:53	XML-document	7 kB
<input type="checkbox"/> Nederlands test.xml	25/08/2020 14:53	XML-document	1 kB
<input type="checkbox"/> Nederlands.xml	25/08/2020 14:53	XML-document	9 kB
<input type="checkbox"/> Svenska.xml	25/08/2020 14:53	XML-document	1 kB
<input type="checkbox"/> Nederlands (RealSpeak Ellen).old	22/04/2011 8:30	OLD-bestand	4 kB

## In Mind Express 5

6. Nu heb je een "dic"-versie van je ME4-uitspraakwoordenboek. Dit kan je vervolgens importeren in je gewenste ME5-profiel(en):
  - a. Open ME5
  - b. Ga naar het gewenste profiel
  - c. Ga naar "Menu" > "Instellingen" > "Sprak" > "Uitspraakwoordenboek"
  - d. Scrol naar beneden in het Uitspraakwoordenboekvenster.
  - e. Klik op het icoontje naast "Lijst importeren"

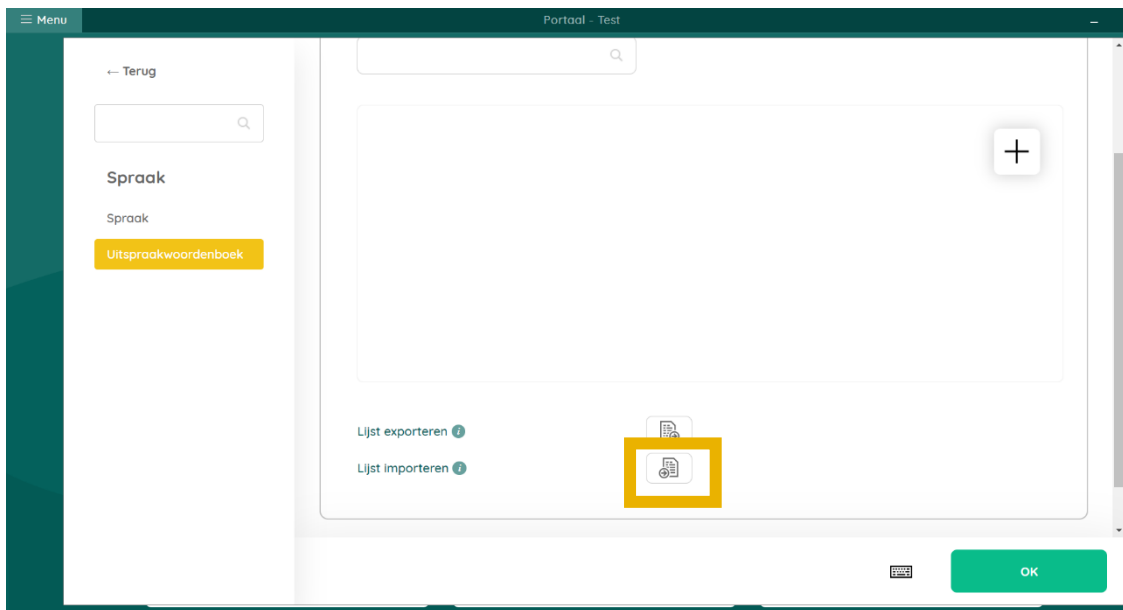

- f. Ga opnieuw naar de locatie, waar je "dic"-uitspraakwoordenboek opgeslagen staat
- g. Selecteer het bestand
- h. Bevestig je keuze ("Openen")

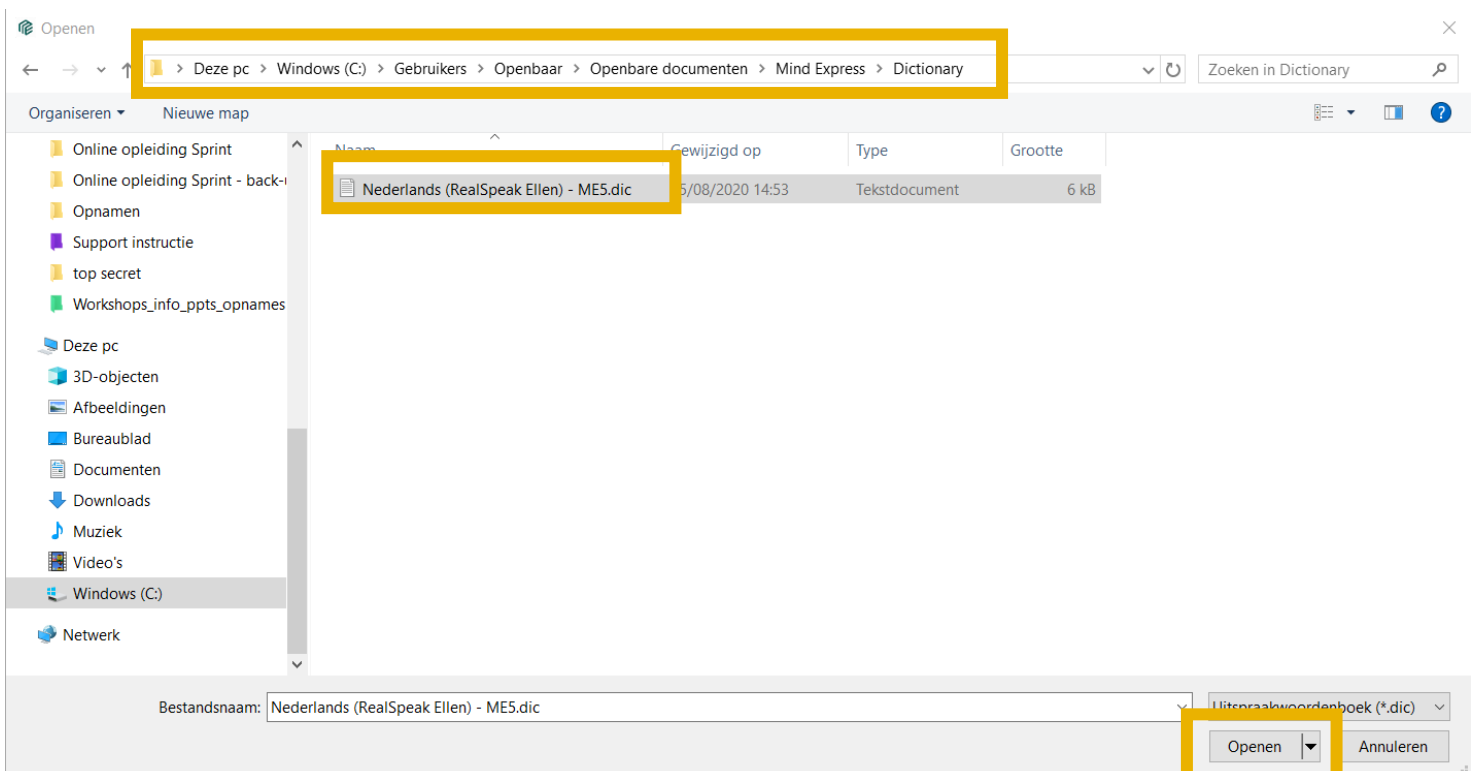

7. Nu zou je ME4-uitspraakwoordenboek zichtbaar en operationeel moeten zijn in dit ME5-profiel.

