



Vibe 12

© Copyright Jabbla

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgedragen, overgeschreven, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of vertaald in enige taal of computertaal in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, optisch, chemisch, handmatig of op een andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jabbla.

Dit document is de oorspronkelijke gebruikershandleiding.

Versie 20211210

Inhoud

A	Inleiding	3
1	Inleiding.....	3
2	Beoogd gebruik.....	3
3	Verboden gebruik.....	3
4	Levensduur.....	3
5	Het typeplaatje van de Vibe 12.....	3
6	Technische gegevens.....	3
B	Beschrijving en werking	5
1	Kennismaken met de Vibe 12.....	5
2	Opties.....	7
3	Werking.....	7
4	Schermbord.....	7
C	Veiligheid	8
1	Veiligheid.....	8
D	Aan de slag	9
1	Wat is er met de Vibe 12 meegeleverd?.....	9
2	Eerste gebruik.....	9
3	Het toestel voor langere tijd opbergen.....	9
E	Bediening	10
1	De Vibe 12 aanzetten.....	10
2	De Vibe 12 opladen.....	10
3	De batterijstatus bekijken.....	11
4	Bedieningsmogelijkheden.....	11
4.1	Aanraakbediening.....	11
4.2	Muisbediening.....	12
4.3	Joystick-bediening.....	12
4.4	Scanningbediening.....	13
4.5	Toetsenbordbediening.....	13
4.6	Het schermtaetsenbord gebruiken.....	14
5	Omgevingsbediening Vibe 12.....	14
6	De Vibe 12 in slaapstand zetten.....	15
7	De Vibe 12 uit slaapstand halen.....	15
8	Het meeleesschermbord en de luidsprekers achteraan resetten.....	16
9	De Vibe 12 volledig resetten.....	16
10	De Vibe 12 afsluiten.....	17
F	Instellingen	18
1	Het volume instellen.....	18
2	Windows 10-instellingen.....	18
2.1	Windows 10-instellingen via de taakbalk.....	18
2.2	Windows 10-instellingen via het Windows 10 pictogram.....	19
2.3	Windows 10-instellingen voor slaapstand.....	19

3	De slaapstand uitschakelen.....	19
G	Onderhoud en problemen oplossen	20
1	Onderhoud.....	20
1.1	Herstellingen.....	20
1.2	Het toestel reinigen.....	20
2	Problemen oplossen.....	20
2.1	Het serienummer van de Vibe 12 opzoeken.....	20
2.2	Licentie-informatie voor Mind Express weergeven.....	20
2.3	Problemen oplossen.....	20
H	Buitenbedrijfstelling en afdanking	22
1	Buitenbedrijfstelling.....	22
2	Afdanking.....	22
	Index	23

A Inleiding

1 Inleiding



VOORZICHTIG

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en bewaar deze voor later gebruik.

De Vibe 12 is een veelzijdig communicatiehulpmiddel gebaseerd op het grafisch communicatieprogramma Mind Express. De Vibe 12 maakt gebruik van Windows 10 als besturingssysteem.



TIP

Wanneer je niet vertrouwd bent met Windows 10, dan raden wij u aan enkel de handelingen uit te voeren die beschreven staan in deze handleiding en in de handleiding van het programma Mind Express.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van het toestel, raden we je aan deze handleiding te lezen alvorens je het toestel gebruikt. Het is tevens aangeraden om over een basiskennis van het programma Mind Express te beschikken. Er wordt in de handleiding van het toestel regelmatig verwezen naar het gebruik van Mind Express.

2 Beoogd gebruik

Het toestel heeft een communicatie-ondersteunende functie. Het toestel is bedoeld voor mensen met een communicatieve beperking (niet of slecht kunnen spreken) voor algemeen gebruik in het dagelijks leven. De gebruikers moeten over voldoende motorische en cognitieve vaardigheden beschikken om het toestel te gebruiken.

Het toestel is ontworpen voor gebruik binnens- en buitenshuis.

3 Verboden gebruik

Het toestel mag niet worden ingezet voor klinische of diagnostische toepassingen.

Het toestel mag niet worden gebruikt voor andere zaken dan vermeld in het beoogd gebruik.


Er mogen geen wijzigingen worden aangebracht aan het toestel zonder overleg en toestemming van Jabbla. Het aanbrengen van wijzigingen kan gevolgen hebben voor de veiligheid, de garantie en de naleving van voorschriften.

4 Levensduur

De verwachte levensduur van het toestel bedraagt 5 jaar. De kwaliteit en levensduur van de batterij zijn afhankelijk van het gebruik.

5 Het typeplaatje van de Vibe 12

Aan de achterkant van het toestel bevindt zich het label met het serienummer van het toestel.

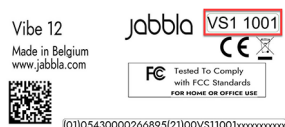

Figuur 1: Typeplaatje Vibe 12

6 Technische gegevens


Technische gegevens Vibe 12

Specificatie	Uitleg
Processor	Intel® Core i5

Specificatie	Uitleg
Besturingssysteem	Windows 10 Pro (64-bit)
Harde schijf	256 GB SSD
Intern geheugen	8 GB
Aanraakscherm	• 12.3 inch capacitief aanraakscherm • 10-punts multi-touch • Resolutie: 2736 x 1824 • Aspect ratio 3:2
Meeleescherm	• 3.12 inch • mono groen PMOLED • Resolutie: 256 x 64
USB	1 x USB-C
Batterij	Standaard Li-Polymeer batterij
Batterijduur	• 12 uur bij normaal gebruik en standaardinstellingen • 6 uur bij intensief gebruik (voortdurend video en audio afspelen) Batterijduur varieert aanzienlijk, afhankelijk van instellingen, gebruik en andere factoren.
Gewicht	1 200 g (2.64 lbs)
Afmetingen	• Hoogte: 25 cm (9.8 inch) • Breedte: 30 cm (11.8 inch) • Diepte: 1,5 - 4 cm (0.6 - 1,6 inch)
Webcam	• Voorzijde: 5 MP • Achterzijde: 8 MP
Montage	Montageplaat voor REHADAPT montagesysteem of DAESSY montagesysteem.
Connectiviteit	• Wifi 802.11a/b/g/n/ac • Bluetooth BT 5.0
Audio	• 1 geïntegreerde microfoon • 2 geïntegreerde luidsprekers
Voedingsadapter	65 W - Microsoft Surface

B Beschrijving en werking

1 Kennismaken met de Vibe 12

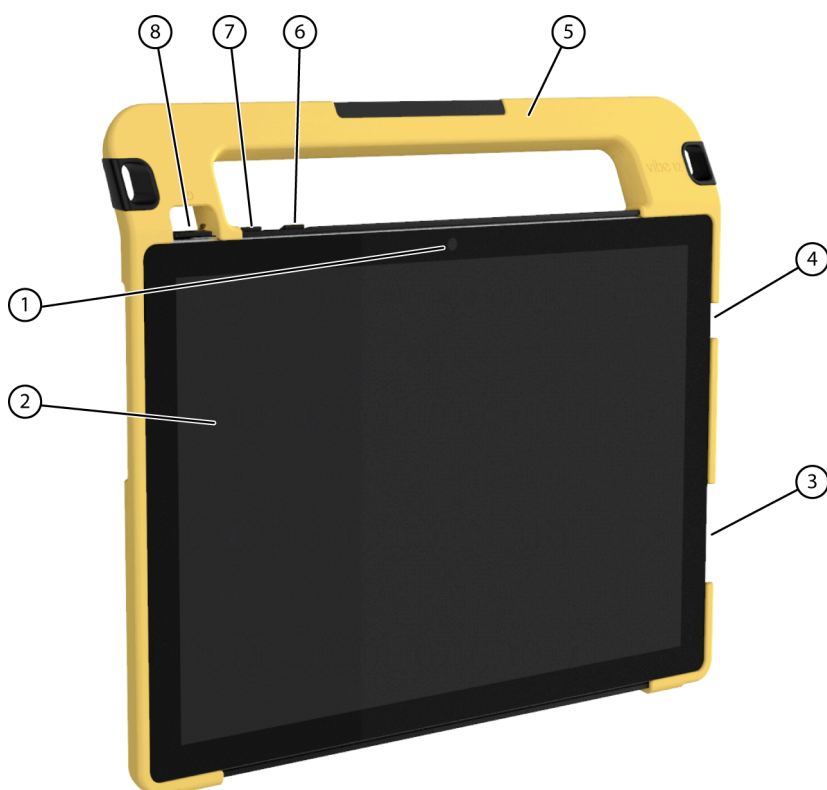

Figuur 2: Vibe 12 vooraanzicht

Nr	Benaming	Uitleg
1	Webcam vooraan	Het toestel is vooraan voorzien van een camera waarmee foto's en video's kunnen worden gemaakt.
2	Aanraakscherm	Het toestel is voorzien van een 12.3 inch capacitief aanraakscherm. Zie Scherm op pagina 7.
3	Voeding	Via deze aansluiting kan je het toestel opladen.
4	USB-poort type C	Via de USB-poort kan je het toestel opladen en kan je een USB-C-hub aansluiten. Via de USB-C-hub kan je toestellen en randapparatuur aansluiten.
5	Handvat	Stevig handvat met openingen om een draagriem vast te maken.
6	Volumeknop +	Met deze volumeknop kan je het volume verhogen. Zie Het volume instellen op pagina 18.
7	Volumeknop -	Met deze volumeknop kan je het volume verlagen. Zie Het volume instellen op pagina 18.
8	Aan/uit-knop	Hiermee kan het toestel aan en in slaapstand worden gezet.



Figuur 3: Vibe 12 achteraanzicht

Nr	Benaming	Uitleg
9	Luidsprekers	Het toestel is voorzien van een aantal krachtige luidsprekers.
10	Escape	Deze knop wordt gebruikt: • om alle geluid te stoppen • om de titelbalk en menubalk in Mind Express weer te geven • uit scanning te gaan in Mind Express • scripting in Mind Express te stoppen
11	Reset	Deze knop wordt gebruikt om het meeleesscherm en de luidsprekers te resetten.
12	Tafelstatief	De Vibe 12 heeft een uitklapbaar statief. Het statief is ontworpen om het toestel op een ergonomische manier op tafel te plaatsen en te ondersteunen met dit statief.
13	Aansluiting schakelaar 1	Via deze ingang kan je schakelaar 1 aansluiten. Sluit enkel een niet-gevoede, spanningsloze schakelaar rechtstreeks aan op het toestel!
14	Aansluiting schakelaar 2	Via deze ingang kan je schakelaar 2 aansluiten. Sluit enkel een niet-gevoede, spanningsloze schakelaar rechtstreeks aan op het toestel!
15	Montageplaat (optioneel)	Montageplaat voor REHADAPT montagesysteem. Je kan ook een montageplaat voor DAESSY montagesysteem kiezen.
16	Infrarood-ontvanger	Met de infrarood-ontvanger kan je het toestel infraroodcodes laten aanleren.

Nr	Benaming	Uitleg
17	Infrarood-zender	Met de infrarood-zender kan je infraroodsignalen uitzenden naar andere apparaten. Bijvoorbeeld: muziekinstallatie, televisie.
18	Meeleesscherm	De Vibe 12 is achteraan voorzien van een meeleesscherm waar tekst kan verschijnen.
19	Webcam achteraan	Het toestel is achteraan voorzien van een camera waarmee foto's kunnen worden gemaakt.

2 Opties

De Vibe 12 kan optioneel worden geleverd met een REHADAPT montage-systeem of een DAESSY montage-systeem.

3 Werking

De Vibe 12 is een veelzijdig communicatiehulpmiddel gebaseerd op het communicatieprogramma Mind Express. De gebruiker kan via Mind Express gesproken boodschappen vormen door het selecteren van afbeeldingen en/of symbolen. Het selecteren gebeurt via:

- aanraakscherm
- toetsenbord
- (aangepaste) muis
- schakelaars

De Vibe 12 heeft een helder 12.3" aanraakscherm met een hoge resolutie.

De Vibe 12 maakt gebruik van Windows 10 als besturingssysteem.

De meegeleverde rubberen beschermingshoes en het geïntegreerde tafelstatief zorgen voor de nodige antislip wanneer de Vibe 12 voor gebruik op een oppervlak wordt geplaatst.



TIP

Wanneer je niet vertrouwd bent met Windows 10, dan raden wij u aan enkel de handelingen uit te voeren die beschreven staan in deze handleiding en in de handleiding van het programma Mind Express.

4 Scherm

Het capacitieve aanraakscherm kan op volgende manieren worden bediend:

- de vingers
- een (capacitieve) stylus die de vingers nabootst (verkrijgbaar in de vakhandel of via webwinkels)

C Veiligheid

1 Veiligheid

**VOORZICHTIG**

Zorg bij de montage van het toestel op een rolstoel dat het toestel goed is vastgemaakt en bijkomend is vergrendeld, zodat het niet zomaar bij de minste schok of stoot naar beneden kan vallen.

**OPMERKING**

Het toestel maakt gebruik van een Li-Polymeer batterij. Gooi het toestel niet zomaar weg. Volg de afvalvoorschriften die van toepassing zijn in uw regio.

**OPMERKING**

Wanneer je het toestel voor een langere periode niet gebruikt, berg het dan op met een half opgeladen batterij. Zorg er ook voor dat het toestel is uitgeschakeld.

**VOORZICHTIG**

Vermijd warmtebronnen in de buurt van het toestel, of ruimtes waarin het bijzonder warm kan worden. In de zomer kan het bijvoorbeeld erg warm worden in een auto. Te hoge temperaturen kunnen de werking en de levensduur van de batterij negatief beïnvloeden.

**VOORZICHTIG**

Het toestel is niet waterdicht. Probeer dus situaties te vermijden waarbij vocht of vuil via openingen in het toestel kan binnen geraken. Neem ook uw voorzorgen bij het reinigen van het toestel en volg de reinigingsvoorschriften.

**VOORZICHTIG**

Gebruik het tafelstatief niet als draaghendel! Het gebruik van het tafelstatief als draaghendel kan er voor zorgen dat het tafelstatief loskomt van het toestel, waardoor het toestel valt en eventueel kan beschadigd raken.

De Vibe 12 is uitgerust met wifi en Bluetooth. Houd volgende veiligheidsvoorschriften in acht:

**VOORZICHTIG**

Gebruik het toestel niet op het vliegtuig. Schakel het toestel uit.

**VOORZICHTIG**

Gebruik het toestel niet in het ziekenhuis wanneer je in de buurt bent van medische elektronische toestellen. De uitgezonden radiogolven kunnen de apparatuur beïnvloeden.

**VOORZICHTIG**

Gebruik het toestel niet in een omgeving waar ontvlambare gassen aanwezig zijn (bijvoorbeeld: tankstations).

D Aan de slag

1 Wat is er met de Vibe 12 meegeleverd?

De Vibe 12 wordt geleverd met volgende onderdelen:

- voedingsadapter met stekker en kabel
- USB-C-hub
- toetsenbord
- muis
- USB-stick
- draagtas
- rubberen beschermingsshoes
- draagriem
- Mind Express weblicentie

2 Eerste gebruik

In principe is de Vibe 12 bij levering reeds voldoende opgeladen. Een oplaadstatus tussen 40 % en 90 % verhoogt de levensduur van de batterij.



Start het toestel. Druk enkele seconden op de aan/uit-knop (8). Het toestel is klaar voor gebruik als Mind Express volledig is opgestart.

Zie ook

- [De batterijstatus bekijken op pagina 11](#)
- [De Vibe 12 opladen op pagina 10](#)

3 Het toestel voor langere tijd opbergen

1. Laad het toestel op tot ongeveer 50 %.
2. Sluit het toestel af.



OPMERKING

Het toestel mag niet in slaapstand staan!

3. Bewaar het toestel op een droge plaats bij kamertemperatuur (20 °C).
4. Laad om de 3 maanden de batterij op tot ongeveer 50 %.

Als je de batterij leeg laat lopen dan zal het toestel niet meer opstarten. Volledig opladen kan de levensduur van de batterij verminderen.

Zie ook

- [De Vibe 12 opladen op pagina 10](#)
- [De batterijstatus bekijken op pagina 11](#)
- [De Vibe 12 afsluiten op pagina 17](#)

E Bediening

1 De Vibe 12 aanzetten



Figuur 4: Aan/uit-knop

Druk enkele seconden op de aan/uit-knop (8).

Indien het toestel uit slaapstand komt, kan het onmiddellijk worden gebruikt. Indien het toestel uit afgesloten toestand komt, dan moet eerst Windows 10 worden opgestart.

Zie ook

[De Vibe 12 afsluiten](#) op pagina 17

[De Vibe 12 volledig resetten](#) op pagina 16


2 De Vibe 12 opladen

De tijd dat je het toestel kan gebruiken zonder op te laden, is sterk afhankelijk van het gebruik van het toestel en van:

- het volume van de audio
- de ingestelde tijd om in slaapstand te gaan
- het gebruik van de Bluetooth en wifi

Wanneer het toestel veelvuldig wordt gebruikt, is het aangeraden om het toestel dagelijks op te laden. Gebruik hiervoor enkel de meegeleverde voedingsadapter. Tijdens het opladen kan het toestel verder worden gebruikt. Een oplaadstatus tussen 40 % en 90 % verhoogt de levensduur van de batterij.

Laad het toestel bij voorkeur op bij kamertemperatuur (ongeveer 20 °C). Temperaturen kouder dan 5 °C en hoger dan 45 °C kunnen een negatief effect hebben op de batterij.

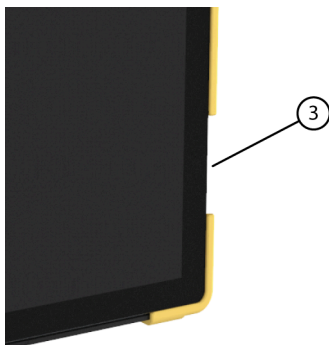

Figuur 5: Aansluiting om het toestel op te laden


1. Bekijk de batterijstatus. Zie [De batterijstatus bekijken](#) op pagina 11.
2. Sluit de meegeleverde voedingsadapter aan tussen het toestel (3) en de netstroom.

Zie ook

[De batterijstatus bekijken](#) op pagina 11

3 De batterijstatus bekijken

De batterijstatus checken is een standaard Windows 10 procedure.

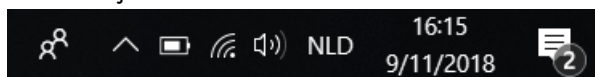

Figuur 6: De Windows 10 taakbalk

Selecteer het batterijpictogram  rechts in de Windows 10 taakbalk.

De resterende batterijlading van de Vibe 12 verschijnt.



OPMERKING

Als het batterijpictogram verborgen is op de taakbalk, selecteer je eerst het pictogram verborgen pictogrammen weergeven  en daarna selecteer je het batterijpictogram .



TIP

Je kan de batterijstatus ook weergeven en laten voorlezen in Mind Express. Zie de helpfunctie van Mind Express.

Zie ook

De Vibe 12 opladen op pagina 10

4 Bedieningsmogelijkheden

4.1 Aanraakbediening

De manier van selecteren op het aanraakscherm, kan worden aangepast aan de gebruiker. Zie de helpfunctie van Mind Express.



VOORZICHTIG

Gebruik geen scherpe hulpmiddelen, om krassen op het aanraakscherm te voorkomen.



OPMERKING

Tik met je vinger, niet met je vingernagel!



VOORZICHTIG

Zorg dat het aanraakscherm niet met water in aanraking komt.

Gebruik de volgende technieken om het aanraakscherm te bedienen:

Actie	Techniek
Linkermuisklik	Tik één keer met je vinger op het object.
Dubbelklik	Tik twee keer kort na elkaar met je vinger op het object.
Slepen	Om een (verplaatsbaar) object te verplaatsen, raak je het object aan en sleep je het naar de gewenste plaats. Om de weergave volledig scherm in Mind Express te verlaten, sleep je met je vinger (of met de muisaanwijzer) van bovenaan het aanraakscherm naar beneden.
Rechtermuisklik	Raak zacht met je vinger het aanraakscherm aan, laat hem daar enkele tellen rusten en verwijder hem terug.



OPMERKING

De mogelijkheid om te slepen in communicatiekaarten, is een instelling die in Mind Express kan worden ingesteld.

Zie ook

- Muisbediening op pagina 12
- Joystick-bediening op pagina 12
- Scanningbediening op pagina 13
- Toetsenbordbediening op pagina 13
- Het schermtoetsenbord gebruiken op pagina 14

4.2 Muisbediening

De standaard Windows-functies van het toestel en Mind Express kunnen worden bediend met een muis. Het toestel beschikt over één USB-C-poort (4) waarop je de meegeleverde USB-C-hub kunt aansluiten. Aan de USB-C-hub kan je de meegeleverde muis met USB-A-kabel aansluiten.

i OPMERKING Voor de bediening van de standaard Windows-functies van het toestel en Mind Express kan je ook een capacitieve stylus, een fysiek toetsenbord of een schermtoetsenbord gebruiken. Voor de bediening van Mind Express kan je ook een joystick gebruiken.



Figuur 7: USB-C-poort


💡 TIP Voor meer info over het activeren en instellen van de muisbediening in Mind Express, zie de helpfunctie van Mind Express.

Zie ook

- Aanraakbediening op pagina 11
- Joystick-bediening op pagina 12
- Scanningbediening op pagina 13
- Toetsenbordbediening op pagina 13
- Het schermtoetsenbord gebruiken op pagina 14

4.3 Joystick-bediening

Mind Express kan worden bediend met een joystick (of via een capacitieve stylus, muis, fysiek toetsenbord of schermtoetsenbord). Het toestel beschikt over één USB-C-poort (4) waarop je de meegeleverde USB-C-hub kunt aansluiten. Aan de USB-C-hub kan je een joystick met USB-A-kabel aansluiten.

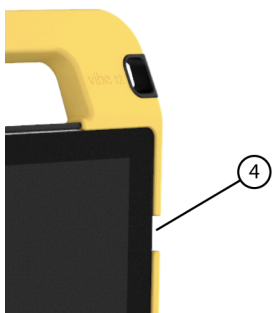

Figuur 8: USB-C-poort

**VOORZICHTIG**

De bediening van de standaard Windows-functies met een joystick met behulp van software van derden is te vermijden als je Mind Express wil bedienen met een joystick.

**TIP**

Voor meer info over het activeren en instellen van de joystick-bediening in Mind Express, zie de helpfunctie van Mind Express.

Zie ook

[Aanraakbediening](#) op pagina 11

[Muisbediening](#) op pagina 12


[Scanningbediening](#) op pagina 13

[Toetsenbordbediening](#) op pagina 13

[Het schermtoetsenbord gebruiken](#) op pagina 14

4.4 Scanningbediening

Op het toestel kan de bediening in Mind Express gebeuren via scanning. De manier van scannen, kan worden ingesteld in Mind Express. Op het toestel kunnen schakelaars (13) (14) worden aangesloten.

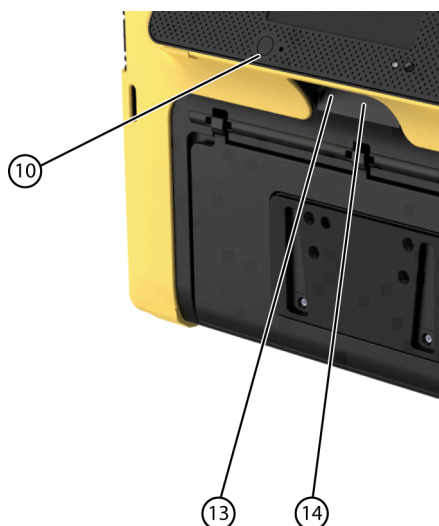

Figuur 9: Schakelaars

**OPMERKING**

Om de scanmode te verlaten moet je de ESC knop (10) gedurende 1,5 sec ingedrukt houden.

**TIP**

Voor meer info over het activeren en instellen van de scanningbediening in Mind Express, zie de helpfunctie van Mind Express.

Zie ook

[Aanraakbediening](#) op pagina 11

[Muisbediening](#) op pagina 12


[Joystick-bediening](#) op pagina 12

[Toetsenbordbediening](#) op pagina 13

[Het schermtoetsenbord gebruiken](#) op pagina 14

4.5 Toetsenbordbediening

De standaard Windows-functies van het toestel en Mind Express kunnen worden bediend met een fysiek toetsenbord. Het toestel beschikt over één USB-C-poort (4) waarop je de meegeleverde USB-C-hub kunt aansluiten. Aan de USB-C-hub kan je het meegeleverde toetsenbord met USB-A-kabel aansluiten.

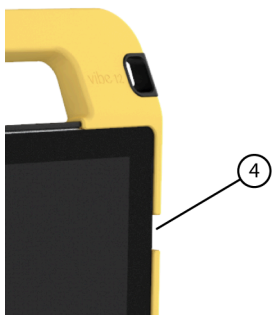

Figuur 10: USB-C-poort



OPMERKING

Voor de bediening van de standaard Windows-functies van het toestel en Mind Express kan je ook een pen, een muis of een schermtoetsenbord gebruiken. Voor de bediening van Mind Express kan je ook een joystick gebruiken.

Zie ook

- [Aanraakbediening](#) op pagina 11
- [Muisbediening](#) op pagina 12
- [Joystick-bediening](#) op pagina 12
- [Scanningbediening](#) op pagina 13
- [Het schermtoetsenbord gebruiken](#) op pagina 14

4.6 Het schermtoetsenbord gebruiken

Naast een USB-compatibel toetsenbord kan je ook gebruik maken van het schermtoetsenbord.

1. Tik op **Schermttoetsenbord**  in de taakbalk.
2. Sleep via de titelbalk het schermtoetsenbord naar de gewenste plaats.



TIP

Voor meer info in verband met het schermtoetsenbord, raadpleeg de Windows helpfunctie.

Zie ook

- [Aanraakbediening](#) op pagina 11
- [Muisbediening](#) op pagina 12
- [Joystick-bediening](#) op pagina 12
- [Scanningbediening](#) op pagina 13
- [Toetsenbordbediening](#) op pagina 13

5 Omgevingsbediening Vibe 12



De Vibe 12 is voorzien van een infrarood-ontvanger (16) en een infrarood-zender (17). Hiermee kan je toestellen zoals televisie, radio, dvd-speler bedienen via infraroodcodes.

De infraroodcodes van de toestellen kunnen worden aangeleerd door de Vibe 12.

Houd tijdens de aanleerprocedure de afstandsbediening van het toestel (bijvoorbeeld de afstandsbediening van de televisie) op een afstand van ongeveer 5 cm van de infrarood-ontvanger van de Vibe 12. Druk op het aangegeven moment de knop van de afstandsbediening even kort in.

Raadpleeg de handleiding of de online help van Mind Express, voor het gebruik en het instellen van de infraroodcodes.

6 De Vibe 12 in slaapstand zetten

De slaapstand is een energiebesparende stand, waar het toestel snel kan worden uitgehaald. De Vibe 12 wordt automatisch in slaapstand gezet. Slaapstandinstellingen kunnen worden gewijzigd in de Energiebeheer- en slaapstandinstellingen van Windows 10. De Vibe 12 kan ook manueel in slaapstand worden gezet.



Figuur 11: Aan/uit-knop

Voer één van de volgende handelingen uit:

- Kies  >  > **Slaapstand**.
- Druk kort op de aan/uit-knop (8).

Het aanraakscherm gaat uit.

Zie ook

[De Vibe 12 uit slaapstand halen](#) op pagina 15

[De slaapstand uitschakelen](#) op pagina 19

7 De Vibe 12 uit slaapstand halen

Indien het aanraakscherm van de Vibe 12 uit staat, dan is de Vibe 12 in slaapstand.



Figuur 12: Aan/uit-knop

Voer één van de volgende handelingen uit om de Vibe 12 uit slaapstand te halen:

- Druk op de aan/uit-knop (8).
- Raak het toestel, linksboven aan de achterkant.

i OPMERKING Standaard zijn deze opties in Windows 10 beschikbaar. De gevorderde Windows 10 gebruiker kan via apparaatbeheer deze instellingen wijzigen.

Zie ook

[De Vibe 12 in slaapstand zetten](#) op pagina 15

[De slaapstand uitschakelen](#) op pagina 19

8 Het meeleesscherm en de luidsprekers achteraan resetten

i OPMERKING Het is ook mogelijk om de Vibe 12 volledig te resetten (zie [De Vibe 12 volledig resetten](#) op pagina 16).

! VOORZICHTIG Enkel wanneer het meeleesscherm en/of de luidsprekers volledig zijn vastgelopen, mag je ze resetten.



Figuur 13: Resetknop

Druk met de punt van een balpen in de resetopening (11).

Het display en de luidsprekers worden uitgeschakeld. Het meeleesscherm en de luidspreker starten terug op en zijn klaar voor gebruik.

9 De Vibe 12 volledig resetten

i OPMERKING Als enkel het meeleesscherm en/of de luidsprekers zijn vastgelopen, kan je deze apart resetten (zie [Het meeleesscherm en de luidsprekers achteraan resetten](#) op pagina 16)

**VOORZICHTIG**

Enkel wanneer de Vibe 12 volledig is vastgelopen, mag je het toestel volledig resetten.



Figuur 14: Aan/uit-knop

1. Druk de aan/uit-knop (8) in tot het aanraakscherm volledig donker wordt en laat dan pas de aan/uit-knop los.
2. Druk de aan/uit-knop van het toestel opnieuw enkele seconden in om het toestel terug op te starten.

Zie ook

[De Vibe 12 aanzetten](#) op pagina 10

[De Vibe 12 afsluiten](#) op pagina 17

10 De Vibe 12 afsluiten

Kies  >  > **Afsluiten**.


Zie ook

[De Vibe 12 aanzetten](#) op pagina 10

[De Vibe 12 volledig resetten](#) op pagina 16

F Instellingen


1 Het volume instellen

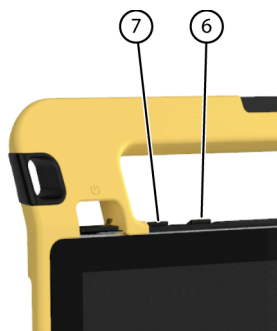

Figuur 15: Volumeknoppen

Naast het gebruik van Mind Express kan je het volume ook instellen via de volumeknoppen (6) (7) en via Windows 10.

OPMERKING
Als het volume-pictogram in de taakbalk van Windows 10 niet zichtbaar is selecteer er dan eerst  om de verborgen pictogrammen weer te geven.

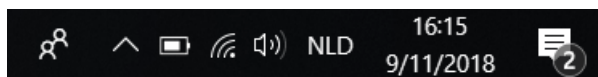

Figuur 16: Taakbalk


Functie	Actie met de volumeknoppen	Actie in de Windows 10 taakbalk
Volume verhogen	Druk de volumeknop (6) in tot het gewenste volume is bereikt.	Selecteer het volume-pictogram  in de taakbalk en verschuif de slider naar rechts tot het gewenste volume is bereikt.
Volume verlagen	Druk de volumeknop (7) in tot het gewenste volume is bereikt.	Selecteer het volume-pictogram  in de taakbalk en verschuif de slider naar links tot het gewenste volume is bereikt.
Volume uitschakelen	Druk de volumeknop (6) in tot het volume op 0 staat.	Selecteer het volume-pictogram  in de taakbalk en verschuif de slider naar links tot het volume op 0 staat.

2 Windows 10-instellingen

De meeste instellingen van de Vibe 12 kunnen gebeuren via de standaardinstellingen van Windows 10.


2.1 Windows 10-instellingen via de taakbalk

Via de taakbalk rechts onderaan kan je de belangrijkste zaken instellen:

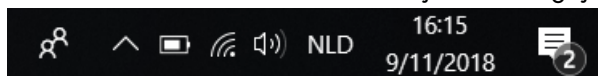

Figuur 17: Taakbalk

Als het pictogram in de taakbalk niet zichtbaar is, selecteer dan eerst  op de taakbalk om de verborgen pictogrammen weer te geven. Bijvoorbeeld het **Bluetooth**-pictogram  is niet zichtbaar op de taakbalk. Klik op  en de verborgen pictogrammen verschijnen. Je kan het **Bluetooth**-pictogram  nu wel selecteren.

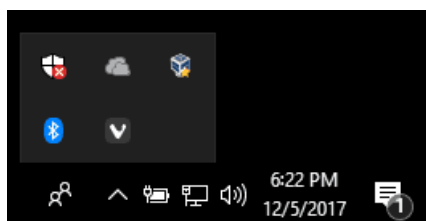

Figuur 18: Verborgen pictogrammen

- volume, zie ook [Het volume instellen](#) op pagina 18
- netwerk- en internetinstellingen
- vliegtuigstand
- **Bluetooth**
- batterij-instellingen
- batterijstatus bekijken, zie ook: [De batterijstatus bekijken](#) op pagina 11
- schermtoetsenbord, zie ook: [Het schermtoetsenbord gebruiken](#) op pagina 14

2.2 Windows 10-instellingen via het Windows 10 pictogram

Links op de taakbalk, via het Windows-pictogram **Start**  > **Instellingen**  vind je uitgebreide instellingen terug en kan je ook zoeken naar instellingen via het zoekvenster bovenaan in het instellingscherm.

2.3 Windows 10-instellingen voor slaapstand

- Om het toestel in slaapstand te zetten, zie [De Vibe 12 in slaapstand zetten](#) op pagina 15.
- Om het toestel uit slaapstand te halen, zie [De Vibe 12 uit slaapstand halen](#) op pagina 15.
- Om de slaapstand helemaal uitschakelen, zie [De slaapstand uitschakelen](#) op pagina 19.

3 De slaapstand uitschakelen

1. Klik op **Start**  en kies vervolgens **Configuratiescherm > Energiebeheer**.
2. Kies links **Wijzigen wanneer de computer in slaapstand gaat**.
3. Kies in de vervolgkeuzelijst **De computer in slaapstand zetten na:** de keuze **Nooit**.

Zie ook

[De Vibe 12 in slaapstand zetten](#) op pagina 15

[De Vibe 12 uit slaapstand halen](#) op pagina 15

G Onderhoud en problemen oplossen

1 Onderhoud

1.1 Herstellingen

Bij schade aan het toestel neem je contact op met de verdeler van het toestel.

Probeer zelf geen herstellingen uit te voeren. Hierdoor zou het toestel beschadigd kunnen raken en valt de garantie weg.

1.2 Het toestel reinigen

Reinig het toestel regelmatig zodat je bacteriën de kans niet geeft zich te verspreiden.

Gebruik bij voorkeur een droge zachte doek voor het verwijderen van stof. Voor lokale vlekken op de behuizing kan je een licht met water bevochtigd doek gebruiken. Gebruik geen product dat alcohol, ammoniak of schuurmiddel bevat. Let vooral op dat er geen vocht binnendringt op de plaats van de openingen (bijvoorbeeld: luidsprekeropeningen en connectoren). Vuil ter hoogte van de connectoren kan je het best verwijderen met een wattenstaafje.

Ook voor het reinigen van schermen gebruik je best een droge doek, geen keukenpapier omdat dit kleine krassen kan maken. Voor het verwijderen van vet of vlekken op de schermen kan je beter reinigingsmiddelen gebruiken die speciaal ontwikkeld zijn voor het reinigen van schermen (spuitbus of vochtige doekjes). Druk niet te hard op schermen tijdens het reinigen.

2 Problemen oplossen

2.1 Het serienummer van de Vibe 12 opzoeken

Bij contact met de supportafdeling kan er worden gevraagd naar het serienummer van jouw toestel.

Aan de achterkant van het toestel bevindt zich het label met het serienummer van het toestel.

Voorbeeld: VI1 1001



Figuur 19: Typeplaatje Vibe 12

Zie ook

[Licentie-informatie voor Mind Express weergeven](#) op pagina 20

2.2 Licentie-informatie voor Mind Express weergeven

Je kan het serienummer, de versie, de toestelcode, opties, ... weergeven

1. Kies **Menu** > **Instellingen**.
2. Kies **Systeem**.
Het tabblad **Instellingen** verschijnt.
3. Kies het tabblad **Licentie**.
De licentie-informatie wordt getoond.

Zie ook

[Het serienummer van de Vibe 12 opzoeken](#) op pagina 20

2.3 Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
Het aanraakscherm reageert langzaam of niet naar behoren.	- Start het toestel opnieuw op om eventuele softwarefouten te verhelpen. - Reinig het aanraakscherm. Zie Het toestel reinigen op pagina 20.
Het Windows besturingssysteem reageert niet.	Druk de aan/uit-knop lang in tot het toestel uitgaat en herstart het toestel. Zie ook De Vibe 12 volledig resetten op pagina 16.
Het meeleesscherm en/of de luidsprekers achteraan reageren niet meer.	Reset het meeleesscherm en de luidsprekers achteraan. Zie Het meeleesscherm en de luidsprekers achteraan resetten op pagina 16.
Het toestel wordt warm.	Bij langdurig en intensief gebruik van het toestel, kan het toestel warm worden. Dit is normaal en dit heeft geen invloed op de levensduur of prestaties van het toestel.
Geen Bluetooth apparaten gevonden.	- Controleer of Bluetooth is ingeschakeld op het apparaat waarmee je verbinding wil maken. - Zorg dat jouw toestel en het andere apparaat zich binnen de maximale afstand van 10 meter bevinden. - Verwijder eventuele voorwerpen tussen het toestel en het andere apparaat. - Het apparaat is mogelijk niet compatibel met jouw toestel.
Het toestel kan niet worden aangezet.	De batterij is onvoldoende opgeladen om te kunnen starten. Sluit de voedingsadapter aan en zet het toestel aan.
De batterij wordt niet goed opgeladen.	Als de batterij niet meer tot 90 % kan worden opgeladen, contacteer dan de supportafdeling van de verdeler waar je het toestel hebt aangekocht.

H Buitenbedrijfstelling en afdanking

1 Buitenbedrijfstelling

1. Sluit de Vibe 12 af. Zie [De Vibe 12 afsluiten](#) op pagina 17.
2. Demonteer de Vibe 12 van de ophanging (indien van toepassing).
3. Haal de Vibe 12 uit de draagtas (indien van toepassing).
4. Verwijder de oplader.

Zie ook

[Afdanking](#) op pagina 22

2 Afdanking

Dank het toestel niet af als huishoudelijk restafval!

Gebruik specifieke inzamelsystemen om de ecologische impact te verminderen. Het toestel moet aan het einde van zijn levensduur op een milieuverantwoorde wijze worden gedemonteerd en afgedankt. Volg hiervoor de huidige lokale wettelijke voorschriften en contacteer de lokale overheid in geval van twijfel.

Indien het toestel is voorzien van een niet-verwisselbare oplaadbare batterij, dan mag die alleen door een bevoegd vakman worden verwijderd.

Indien het toestel is voorzien van een verwisselbare oplaadbare batterij, breng dan de lege batterij uitsluitend naar een bevoegd inzamelpunt.

Gebruikte batterijen worden beschouwd als chemisch afval. Het is conform de lokale wetgeving verboden om batterijen samen met ander industrieel afval of huishoudelijk afval weg te gooien.



Op het label van het toestel is een doorkruiste vuilnisbak afgebeeld om de gebruikers aan te sporen:

- dat het product niet mag worden afgedankt als huishoudelijk restafval.
- om het product en zijn componenten zoveel mogelijk te recyclen.
- het product binnen te brengen in een bevoegd inzamelpunt.

Het op de juiste wijze afdanken, draagt bij tot de gezondheid van de mens en het milieu!

Indien je vragen hebt over het afdanken van het product contacteer je:

- de verdeler van het toestel
- de gemeente waar je woont
- de afvalverwerkingsinstantie

Zie ook

[Buitenbedrijfstelling](#) op pagina 22

Index

A

- Aan de slag 9
- Aan/uit
 - knop 5
- Aanraakscherm
 - bediening 7
 - reiniging 20
 - technische gegevens 3
- Aanzetten
 - toestel 10
- Accessoire 7
- Afdanking 22
- Afmetingen 3
- Afsluiten
 - toestel 17
- Audio 3

B

- Batterij
 - afdanken 22
 - opladen 10
 - status 11
 - technische gegevens 3
- Batterijstatus
 - bekijken in Windows 10 18
- Bediening 10
 - aanraakscherm 11
 - fysiek toetsenbord 13
 - joystick 12
 - muis 12
 - scanning 13
 - schakelaars 13
 - toetsenbord op het scherm 14
- Beoogd gebruik 3
- Bescherming 9
- Beschrijving 5
- Besturingssysteem 3
- Bewaren 9
- Bluetooth
 - instellen in Windows 10 18
- Buitenbedrijfstelling 22

C

- Camera 5
 - figuur 5
 - instellen in Windows 10 19

D

- DAESSY 3, 7
 - montageplaat 5
- Display 5

- Draagtas 9

E

- Eerste gebruik 9
- Escape
 - knop 5

F

- Functie
 - toestel 3
 - verboden 3

G

- Gebruik
 - toestel 3
 - verboden 3
- Geheugen 3
- Gewicht 3

H

- Harde schijf 3
- Hardware
 - instellen in Windows 10 19
- Herstelling 20

I

- Inleiding 3
- Inschakelen
 - luidsprekers/volume 18
 - toestel 10
- Instellingen 18
 - luidsprekers/volume 18
 - Windows 10 19
- Intern geheugen 3

J

- Joystick 12

K

- Knop
 - aan/uit 5
 - escape 5
 - reset 5

L

- Label 3
- Levensduur 3
- Licentie 9
 - informatie weergeven 20
- Luidspreker 5
 - instellen in Windows 10 18
 - instellen met de volumeknop 18
 - resetten 16
 - uitschakelen 18

M

- Meegelieferd 9
- Meeleesscherm
 - reiniging 20
 - resetten 16
- Microfoon 5
 - instellen in Windows 10 19
- Mind Express 9
- Montageplaat 5
 - technische gegevens 3
- Muis 12

O

- Omgevingsbediening 14
- Onderdelen 9
- Onderhoud 20
 - herstelling 20
 - reiniging 20
- Opbergen 9
- Opladen
 - aansluiting voeding 5
 - batterij 10
- Opslaan 9
- Optie 7
- Opties
 - beschikbare en niet-geactiveerde tonen 20

P

- Probleem 20
- Processor 3

R

- RAM-geheugen 3
- Randapparatuur
 - via USB-C-poort 5
- REHADAPT 3, 7
 - montageplaat 5
- Reiniging 20
- Resetten
 - knop 5
 - luidsprekers achteraan 16
 - meeleesscherm 16
 - volledig toestel 16

S

- Scanning
 - bediening 13
- Schakelaar
 - bediening 13
 - technische gegevens 3
- Schermbediening 7, 11
- Scherminhoud 5
- Schermschade 20
- Schermscherm 3
- Schermscherm 14
- Serienummer
 - label 3
 - QR-code 3
 - toestel 20
- Slaapstand
 - in slaapstand zetten 15
 - instellen in Windows 10 19
 - uit slaapstand halen 15
 - uitschakelen 19
- Specificaties
 - technische gegevens 3
- SSD (Solid state drive) 3
- Starten
 - toestel 10
- Statief 5
- Storing 20

T

- Tafelstatief 5
- Technische gegevens 3
- Toebehoren 9
- Toestelcode
 - tonen 20
- Toetsenbord
 - fysiek 13
 - op het scherm 14
- Typeplaatje 3

U

- Uitschakelen
 - luidsprekers/volume 18
 - toestel 17
- USB
 - technische gegevens 3
 - USB-C-poort 5
- USB-C-hub 9

V

- Veboden gebruik 3
- Veiligheid 8
- Versie
 - tonen 20
- Vliegtuigstand
 - instellen in Windows 10 18
- Voedingsadapter 9
 - aansluiting 5
- Volume
 - instellen in Windows 10 18

instellen met de volumeknop 18
knop 5
uitschakelen 18
verhogen 5
verlagen 5

W

Webcam

figuur 5
instellen in Windows 10 19
technische gegevens 3

Werking

toestel 7

Wifi

instellen in Windows 10 18

Windows 10

instellingen 19
problemen 20
resetten 16

